

AccuProbe®

CULTURE IDENTIFICATION REAGENT KIT KULTŪROS IDENTIFIKAVIMO REAGENTŲ RINKINYS

TIK EKSPORTUI

(bioMérieux ref. 39305 / Hologic Kat. Nr. 102800)

NAUDOJIMAS

Reagentai, esantys "ACCUPROBE" KULTŪROS IDENTIFIKAVIMO REAGENTŲ RINKINYJE yra skirti naudoti su "ACCUPROBE" KULTŪROS IDENTIFIKAVIMO REAGENTŲ TYRIMAIS, laikantis taisyklių, nurodytų atitinkamuose pakuočių aprašymuose. Tiekiami reagentai yra skirti 200 bakterijų, 100 mikobakterijų, ar grybelio ištyrimui.

TIEKIAMIOS MEDŽIAGOS IR REAGENTAI

Pastaba: Informacijos apie su reagentais susijusį pavojų ir atsargumo priemones ieškokite saugos duomenų lapų bibliotekoje (Safety Data Sheet Library), adresu www.hologic.com/sds.

KULTŪROS IDENTIFIKAVIMO REAGENTŲ RINKINYS

(bioMérieux ref. 39305 / Hologic Kat. Nr. 102800)

200 Bakterinių ar 100 Mikobakterinių/Grybelinių tyrimų

Reagentas 1 (Lizuojantis reagentas) (1)

Buferio tirpalas su 0.04% natrio azido. 1 x 10 mL

Reagentas 2 (Hibridizuojantis buferis) (2)

Buferio tirpalas. 1 x 10 mL

Reagentas 3 (Selection Reagentas) (3)

Buferio tirpalas. 1 x 60 mL

ISPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Tik *in vitro* diagnostikai.

Reagentai šiame rinkinyje turi natrio azido, kuris gali reaguoti su švinu ar variu ir suformuoti potencialiai sprogus metalo azidus. Utilizuojant reagentus visada atskieskite juos dideliu kiekiu vandens tam, kad išvengti azidų susidarymo kanalizacijos sistemoje.

LAIKYMO IR DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Reagentai, esantys "ACCUPROBE" KULTŪROS IDENTIFIKAVIMO REAGENTŲ RINKINYJE, laikomi prie 2° - 25°C, yra stabilūs iki galiojimo datos pabaigos.

NEUŽŠALDYKITE REAGENTŲ.

Pastaba: Reagentas 2 (Hibridizuojantis buferis) prieš naudojimą turi būti palaikytas kambario temperatūroje.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 (USA)



Hologic N.V.

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Šiam produktui gali būti taikomas vienas ar keli JAV patentai, nurodyti adresu www.hologic.com/patents.