

**MTD Amplification Controls****Pouze Pro Export***(bioMérieux ref. 39223 / Hologic Cat. No. 301043F)***POUŽITÍ**

Činidla v přípravku Hologic MTD Amplification Controls lze použít jako dodatečné kontroly k testu Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

**POSKYTNUTÁ ČINIDLA A MATERIÁL**

**Poznámka:** Informace o H-větvách a P-větvách, které mohou být spojeny s reagensy, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

MTD Amplification Negative Control (NC) 2 x 1 mL  
Pufrovaný roztok.

MTD Amplification Positive Control (PC) 2 x 1 mL  
Neinfekční nukleová kyselina v pufrovaném roztoku.

**VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ**

- A. Pro diagnostické použití in vitro.
- B. MTD Amplification Controls lze použít spolu s Testem Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).
- C. MTD Amplification Controls nemonitoruje sonikační (lytický) krok stanovení.
- D. Oddíl Postup testu v příbalovém letáku vyžaduje k monitorování jak lžy, tak amplifikace buněčné kontroly.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKU A ZACHÁZENÍ S NÍM**

Činidla obsažená v MTD Amplification Controls se musí skladovat při teplotě 2 °C až 8 °C, přičemž jsou stabilní do data vyznačeného na nádobkách.

**POSTUP**

Viz odstavec Amplifikace oddílu POSTUP TESTU v příbalovém letáku Testu Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

1. Na dno amplifikační zkušavky obsahující 50 µL rekonstituovaného Mycobacterium Tuberculosis Amplification Reagent a 200 µL Oil Reagent přidejte 25 µL Mycobacterium Amplification Negative Control nebo Mycobacterium Amplification Positive Control.
2. Pokračujte ve stanovení podle oddílu Amplifikace, krok 4, příbalového letáku testu Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

**OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY**

|                                 | RLU       |
|---------------------------------|-----------|
| Amplifikační negativní kontrola | < 20,000  |
| Amplifikační pozitivní kontrola | ≥ 500,000 |



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**Podpora zákazníků:** +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

**Technická podpora:** +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic and Amplified MTD jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích.

Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v tomto příbalovém letáku, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených Států, které jsou uvedeny na webové stránce [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).



**Hologic N.V.**  
Da Vinciiaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

AW-12602-2601 Rev 003 (CS)  
©1990 - 2018 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.  
2018-03