

MTD Amplifizierungskontrollen

(bioMérieux Best.Nr. 39223/Hologic Kat. Nr. 301043F)

VERWENDUNGSZWECK

Die Reagenzien des Kits Hologic MTD Amplifizierungskontrollen können als zusätzliche Kontrollen mit dem Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direkttest (MTD) verwendet werden.

REAGENZIEN

Hinweis: Informationen zu eventuell mit den Reagenzien verbundenen Gefahren- und Vorsichtshinweisen finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter www.hologic.com/sds.

Die Packung enthält:

MTD Negativkontrolle (NC) 2 x 1 ml
Pufferlösung.

MTD Positivkontrolle (PC) 2 x 1 ml
Nicht-infektiöse Nukleinsäure in Pufferlösung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- A. Für die in vitro Diagnostik verwenden.
- B. Die MTD Amplifizierungskontrollen können zusammen mit dem Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direkttest (MTD) verwendet werden.
- C. Die MTD Amplifizierungskontrollen ermöglichen keine Überprüfung der Ultraschallbehandlung (Lyse).
- D. Für die gleichzeitige Überprüfung von Lyse und Amplifikation wird in der MTD-Packungsbeilage die Verwendung von Zellsuspensionen empfohlen.

LAGERUNG

Die Reagenzien der MTD Amplifizierungskontrollen müssen bei 2°C bis 8°C gelagert werden und sind bis zu dem auf den Behältern angegebenen Verfallsdatum haltbar.

TESTDURCHFÜHRUNG

Siehe Abschnitt Amplifizierung in der Packungsbeilage des Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direkttests (MTD).

1. Pipettieren Sie 25 µl Positivoder Negativkontrolle auf den Boden eines Amplifizierungsröhrchens, das 50 µl gelöstes Mycobacterium Tuberculosis Amplifizierungsreagenz und 200 µl Öreagenz enthält.
2. Führen Sie den Test wie im Abschnitt Amplifizierung (Arbeitsschritt 4) der Packungsbeilage des Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direkttests (MTD) beschrieben, durch.

SOLLWERTE

	RLU
Negativkontrolle	< 20.000
Positivkontrolle	≥ 500.000



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundensupport: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter www.hologic.com.

Hologic und Amplified MTD sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt ist ggf. von mindestens einem US-Patent geschützt (siehe www.hologic.com/patents).



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

AW-12602-801 Rev. 003 (DE)
©1990 – 2018 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
2018-03