

## Roztok ThinPrep® UroCyte® PreservCyt®

## Návod na použitie

Rxiba

IVD



15 °C | 30 °C

**URČENÉ POUŽITIE**

Na uchovávanie a prenos vzoriek moču na cytologické vyšetrenie pomocou zariadenia na spracovanie vzoriek ThinPrep® a systému na prípravu preparátov UroCyte® alebo súpravy na diagnostiku rakoviny močového mechúra Vysis® UroVysion® a na cytológiu moču. Poznámka: Roztok UroCyte PreservCyt nie je určený na použitie so systémom na spracovanie vzoriek ThinPrep® 3000.

**SÚHRN A VYSVETLENIE**

Roztok PreservCyt® umožňuje prenos a konzerváciu moču.

**PRINCÍPY POSTUPU**

Roztok PreservCyt je médium, ktoré sa používa na ochranu buniek a DNA vzoriek moču.

**ZLOŽENIE**

Pufrovaný konzervačný roztok na báze metanolu. Metanol 35 – 55 %. CAS 67-56-1

**VÝSTRAHY**

**Nebezpečenstvo.** Horľavé. Obsahuje metanol.

H301 – Toxický pri požití.

H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou.

H370 – Spôsobuje poškodenie orgánov.

H331 – Toxický pri vdýchnutí.

H226 – Horľavá kvapalina a pary.

Na diagnostické použitie in vitro.

Nie je určený na externé alebo interné použitie u ľudí alebo zvierat.

Nemôže sa zmeniť na nejedovatý.

**PREVENTÍVNE OPATRENIA**

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Skontrolujte všetok obsah, či nie je poškodený.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa/horúcich povrchov.

P233 – Nádobku uchovávajte tesne uzavretú.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

Rovnako ako u všetkých laboratórnych postupov sa musia dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia.

# Roztok ThinPrep® UroCyt® PreservCyt®

Nepoužívajte, ak je poškodené tesnenie odolné voči manipulácii.

Používajte na dobre vetranom mieste.

Zabráňte priamemu kontaktu.

## **PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA**

Nevyšaduje sa žiadna rekonštitúcia, miešanie alebo riedenie.

## **SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA**

Nepoužívaný roztok PreservCyt skladujte pri teplote 15 °C – 30 °C. Nepoužívajte po dátume expirácie. Flaštičku s roztokom PreservCyt a nádobku na odber vzoriek uchovávajte zatvorené a pripravené na použitie.

Roztok PreservCyt so vzorkou moču uchovávajte pri teplote 4 °C až 30 °C. Vzorku spracujte do 48 hodín.

## **VZHĽAD A INTEGRITA**

Číry nesterilný roztok.

## **VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY**

Roztok PreservCyt preukazuje bakteriostatické vlastnosti a zabraňuje rastu organizmov vo vzorkách moču, ak sa použije v pomere 2:1 moču k roztoku PreservCyt pri teplote od 4 °C do 30 °C. Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia na spracovanie vzoriek ThinPrep.

## **POKYNY NA SPRACOVANIE**

Poznámka: Pre súpravu na diagnostiku rakoviny močového mechúra Vysis UroVysion sa vyžaduje minimálne 33 ml moču odobratého bežným spôsobom.

1. Opatrne nalejte celý obsah flaštičky s roztokom PreservCyt do nádobky na vzorky obsahujúcej moč. Nádobku so vzorkou dôkladne zatvorte, aby sa zabránilo úniku.
2. Vzorku s roztokom PreservCyt uskladnite pri teplote 4 °C – 30 °C. Odporúčané skladovacie a prepravné podmienky môžete zabezpečiť pomocou vreciek s ľadom (napr. modrý ľad v obale Styrofoam).
3. Vzorku spracujte do 48 hodín podľa pokynov v návode na obsluhu systému na spracovanie vzoriek ThinPrep alebo pokynov výrobcu súpravy na diagnostiku rakoviny močového mechúra Vysis UroVysion.

## **INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII**

Použitú nádobku na odber vzoriek, absorpčnú podložku, prepravné vrečko a všetky zvyšné vzorky zlikvidujte ako biologicky nebezpečný materiál. Zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi.

## **OBMEDZENIA POSTUPU**

Roztok PreservCyt sa nemôže nahradiť žiadnym iným roztokom na odber, prípravu a spracovanie vzoriek. Pred odberom vzorky obmedzte použitie mazív (napr. gél KY® Jelly), pretože tieto látky môžu prekážať prenosu buniek.

## **OPATRENIA PRVEJ POMOCI**

V PRÍPADE POŽITIA: Ak sa necítite dobre, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Kompletnú kartu bezpečnostných údajov nájdete na webovej lokalite [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com)

## Roztok ThinPrep® UroCyt® PreservCyt®



Výrobca



Pozrite si návod na použitie



Diagnostická zdravotnícka  
pomôcka *in vitro*



Autorizovaný zástupca  
v Európskom spoločenstve



Katalógové číslo



Spotrebujte do



Kód šarže



Teplotné obmedzenie



Nepoužívajte opakovane



Horľavé



Akútna toxicita



Dráždi dýchacie cesty,  
toxický pre cieľový orgán



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA  
Tel.: +1 508 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgicko