

„ThinPrep® Orange G“ dažų tirpalas

Naudojimo instrukcija



NUMATYTOJI PASKIRTIS

„ThinPrep® Orange G“ tirpalas skirtas naudoti su bet kuriais „ThinPrep“ branduolių dažais, „ThinPrep“ skalavimo tirpalu, „ThinPrep“ melsvinimo tirpalu ir „ThinPrep EA“ tirpalu atliekant Papanicolaou dažymo procedūrą.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

„ThinPrep Orange G“ tirpalas – tai alkoholinis tirpalas, kuris nudažo ant objektinių stiklelių esančių preparatų ląstelių citoplazmą.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Naudojamas su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir citologinių mėginių preparatais ant objektinių stiklelių, „ThinPrep Orange G“ tirpalas nudažo ląstelių citoplazmą, netrikdydamas branduolių dažymosi ir nekeisdamas morfologijos.

SUDĖTIS

Etanolio, metanolio, izopropilo alkoholio ir dažiklio „Orange G“ alkoholinis tirpalas. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

ISPĖJIMAI

Pavojus. Sudėtyje yra etanolio, metanolio ir izopropilo alkoholio.

H302. Kenksminga prarijus.

H312. Kenksminga susilietus su oda.

H319. Sukelia smarkų akių dirginimą.

H371. Gali pakenkti organams.

H225. Labai degūs skystis ir garai.

Skirta in vitro diagnostikai. Neskirta išoriniam ar vidiniam naudojimui žmonėms arba gyvūnams. Negalima padaryti nenuodingos.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

P210. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių.

P280. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P260. Neįkvėpti garų.

Panaudojus kruopščiai nusiprausti. Tiesiogiai nenaudojant laikyti talpyklą uždarytą. Naudoti esant tinkamam vėdinimui. Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius neįvertinti. Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista.

PIRMINIS APDOROJIMAS

Nereikia tirpinti, maišyti ar skiesti.

„ThinPrep® Orange G“ dažų tirpalas

LAIKYMAS

„ThinPrep Orange G“ tirpalą laikykite pateiktoje talpykloje 15–30 °C (59–86 °F) temperatūroje. Nenaudokite „ThinPrep Orange G“ tirpalo praėjus galiojimo datai, pažymėtai ant talpyklos.

IŠVAIZDA IR KONSISTENCIJA

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR RUOŠIMAS

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, apdorotais bet kuriuo „ThinPrep“ procesoriumi.

PROCEDŪRA

Konkretūs dažymo protokoliai pateikti „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove.

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Būtina naudoti vadovaujantis „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove pateiktais nurodymais. „ThinPrep Orange G“ tirpalo negalima pakeisti jokia kitu tirpalu.

VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKOS

Naudojamas, kaip nurodyta, „ThinPrep Orange G“ tirpalas nudažo ląstelių citoplazmą citologinių mėginių preparatuose ant objektinių stiklelių.

IŠMETIMAS

Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Visą saugos duomenų lapo turinį žr. tinklalapyje www.hologicds.com.



Gamintojas



Panaudoti iki



Degi



Žr. naudojimo instrukciją



Partijos kodas



Dirginanti, kvėpavimo takų dirginimas, odą jautrinanti medžiaga



In vitro diagnostikos medicinos priemonė



Temperatūros apribojimas



Kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga, toksiškumas konkrečiam organui



Igaliojasis atstovas Europos Bendrijoje



Katalogo numeris



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, JAV
Tel. +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija

Australijos užsakovas: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. 02 9888 8000

„ThinPrep Orange G“ dažų tirpalas

Naudojimo instrukcija

Lietuviškai AW-19608-3002 Rev. 001 6-2019