

**Representante autorizado para a Comunidade Europeia:**

Hologic Ltd.
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road
Wythenshawe, Manchester
M23 9HZ, UK
Tel: +44 (0)161 946 2206
Fax: +44 (0)161 602 0995
Email: AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com

I. APLICAÇÃO:

Este produto destina-se a facilitar a extracção de ácido nucleico de amostras expostas a um fixador de formalina.

II. REAGENTES FORNECIDOS

Nota: Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e de precaução que possam estar associadas a estes reagentes, consulte a Biblioteca de fichas de dados de segurança (Safety Data Sheet Library) em www.hologic.com/sds.

Solução de conversão (2 frascos, 115 mL por frasco)

III. COMPOSIÇÃO DO REAGENTE

Mistura tampão com solução tampão Tris e EDTA
pH 7,52 +/- 0,32
Condutividade 52,6 mS/cm, +/- 6,4

IV. CONSERVAÇÃO E MANUSEAMENTO

Os reagentes devem ser conservados à temperatura ambiente e permanecem estáveis até ao prazo de validade indicado no frasco.

Os componentes do produto (resíduos do produto, embalagens) podem ser considerados resíduos laboratoriais. Elimine os reagentes não utilizados e resíduos de acordo com a legislação local e nacional.

V. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Retire o máximo possível de fixador do material celular.
Suspenda o material celular em 0,2 mL de Solução de conversão.
Incube a amostra a 115 °C durante 1 hora.

NOTA: O VOLUME DA SOLUÇÃO DE CONVERSÃO, A TEMPERATURA E O TEMPO DE INCUBAÇÃO DEVEM SER ESTABELECIDOS EMPIRICAMENTE DE ACORDO COM O TIPO DE AMOSTRA E O QUÍMICO DE EXTRACÇÃO.

VI. LIMITAÇÕES

Este produto foi testado em amostras expostas a uma solução de formalina tamponada neutra a 10% e as amostras expostas a um líquido conservante à base de álcool com formalina. A utilização da Solução de conversão com amostras expostas a outros fixadores de formalina ou a soluções à base de álcool não foi avaliada.

VII. INFORMAÇÕES PARA CONTACTO**Fabricante:**

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Apoio ao Cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

VIII. AVISO AO DESTINATÁRIO ACERCA DA LICENÇA LIMITADA

A recepção do Produto da Hologic ou do seu distribuidor autorizado inclui uma licença limitada, não exclusiva, não transferível ao abrigo de determinados direitos de propriedade intelectual detidos pela Hologic. Esta licença serve apenas a finalidade de utilização do Produto nos métodos para os quais se destina. Esta licença limitada não inclui uma licença de utilização do Produto para investigação ou desenvolvimento de novos produtos, fabrico de produtos, engenharia inversa, melhoramentos da tecnologia do Produto ou qualquer outro objectivo comercial. O cliente não está autorizado a transferir este Produto a terceiros para qualquer finalidade sem o consentimento expresso por escrito pela Hologic. Excepto indicação contrária neste parágrafo, nenhuma outra licença é concedida expressa ou implicitamente ou por excepção.

Legal Department (Departamento Jurídico), Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, (508) 263-2900.

IX. GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

GARANTIAS. É concedida ao Comprador original a garantia de que o equipamento, os consumíveis e o software desempenham as suas funções substancialmente em conformidade com as Especificações do produto publicadas durante o período de um (1) ano a partir da data de Instalação (se aplicável) ou a partir da data de Entrega, aquela que ocorrer primeiro. As opções pós-venda e os acessórios estão abrangidos por uma garantia de seis (6) meses e os tubos de raios-x estão abrangidos por uma garantia numa base proporcional contínua conforme indicado nas Especificações do produto aplicáveis ("Período de garantia"). As peças de substituição estão abrangidas por uma garantia relativa ao restante Período de garantia ou de noventa (90) dias a partir da Entrega, o que for mais longo. É concedida uma garantia de que os consumíveis funcionam conforme as especificações publicadas durante um período que termina quando expira o prazo de validade indicado nas respectivas embalagens. É concedida a garantia de que a execução dos serviços é realizada conforme os padrões técnicos. A Hologic não garante que a utilização dos Produtos ocorrerá sem interrupções ou isenta de erros ou que os Produtos funcionarão conjuntamente com produtos de terceiros não autorizados pela Hologic. A TOTALIDADE DA RESPONSABILIDADE DE GARANTIA DA HOLOGIC ESTÁ EXPRESSAMENTE LIMITADA À REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO (POR OPÇÃO DA HOLOGIC E DA FORMA ORIGINALMENTE EXPEDIDA) DO PRODUTO OU À CORRECÇÃO DO SERVIÇO SUJEITO A QUALQUER RECLAMAÇÃO OU, POR ESCOLHA

DA HOLOGIC, AO PAGAMENTO OU CRÉDITO AO CLIENTE DE UM MONTANTE IGUAL AO PREÇO DA HOLOGIC, TAXA OU COMISSÃO RESULTANTE. AS GARANTIAS ANTERIORES SUBSTITUEM E EXCLUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS NÃO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDAS NO PRESENTE DOCUMENTO, QUER SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS POR FORÇA DA LEI OU POR OUTRO MEIO, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. TAL GARANTIA LIMITADA É APENAS ATRIBUÍDA AO CLIENTE ORIGINAL E NÃO É ATRIBUÍDA NEM PODE SER CONFIADA A TERCEIROS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, CLIENTES DO CLIENTE. ESTA GARANTIA É NULA CASO O CLIENTE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO A QUALQUER ENTIDADE QUE SEJA PROPRIETÁRIA DE MENOS DE CINQUENTA (50) PORCENTO DO PRODUTO. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, POR ISSO, AS EXCLUSÕES SUPRAMENCIONADAS PODEM NÃO SE APLICAR AO VOSSO CASO. PODERÃO IGUALMENTE TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO. Estas garantias não se aplicam a qualquer item que: (a) seja reparado, deslocado ou alterado por pessoal que não o pessoal da assistência autorizado da Hologic; (b) seja sujeito a abuso físico (incluindo em termos térmicos ou eléctricos), tensão ou utilização indevida; (c) seja armazenado, mantido ou utilizado de forma inconsistente com as especificações ou instruções aplicáveis da Hologic; ou (d) seja designado como fornecido ao abrigo de uma garantia que não seja da Hologic ou numa base de pré-lançamento "tal como está".

RECLAMAÇÕES AO ABRIGO DA GARANTIA E MEDIDAS CORRECTIVAS.

Na eventualidade de qualquer reclamação ao abrigo da garantia, a Hologic substituirá qualquer peça, componente ou consumível do equipamento que viole a garantia por itens novos ou reparados e envidará os esforços razoáveis para reparar ou fornecer prontamente uma solução para qualquer defeito ou bug de software que impeça o funcionamento em substancial conformidade com as especificações funcionais. Em alternativa, a Hologic pode escolher pagar ou creditar ao Cliente um montante igual ao preço de compra do Equipamento, componente, software, consumível ou serviço com defeito. Os itens substituídos serão propriedade da Hologic. Todas as reclamações serão iniciadas com um contacto efectuado à Hologic dentro do período de garantia aplicável e trinta (30) dias após a detecção da falha ou da não conformidade. A Hologic deve ter acesso razoável e a oportunidade de inspeccionar todos os materiais associados. Se a Hologic e o Cliente forem incapazes de resolver qualquer reclamação e o Cliente não notificar a Hologic no prazo de um (1) ano após o surgimento da reclamação, o Cliente deixará de poder instituir qualquer acção legal daí resultante. Estas medidas correctivas incluem a responsabilidade total da Hologic e a medida correctiva exclusiva do Cliente decorrente da quebra de garantia e substituem quaisquer outras medidas correctivas por força da lei ou equidade.

LIMITE DE RESPONSABILIDADE. A HOLOGIC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS, DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, PUNITIVOS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS OU DESPESAS (INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A PERDAS DE LUCROS, DADOS OU UTILIZAÇÃO), QUE SEJAM DIRECTA OU INDIRECTAMENTE DECORRENTES DA VENDA, MANUSEAMENTO, SERVIÇO OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO ENCOMENDADO OU FORNECIDO, OU DE QUALQUER OUTRA CAUSA DAÍ RESULTANTE, A MENOS QUE EXPRESSAMENTE ACORDADO PELAS PARTES POR ESCRITO. EXCEPTO EM CASO DE LESÕES PESSOAIS OU MORTE RESULTANTES DE ACTOS OU OMISSÕES NEGLIGENTES OU INTENCIONALMENTE ILÍCITOS DA HOLOGIC, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HOLOGIC RESPONSABILIZADA AO ABRIGO DE QUALQUER TEORIA LEGAL OU POR QUALQUER OUTRA CAUSA, QUER SEJA COM BASE NA GARANTIA, CONTRATO, DANO, NEGLIGÊNCIA OU EM OUTRA TEORIA, MESMO SE ACONSELHADO DE TAL POSSIBILIDADE, POR QUALQUER MONTANTE QUE ULTRAPASSE O PREÇO, TAXA OU COMISSÃO RECEBIDA PELA HOLOGIC

Hologic é uma marca comercial e/ou marca registada da Hologic, Inc. e/ou respectivas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Quaisquer outras marcas comerciais que possam aparecer neste folheto informativo pertencem aos respectivos proprietários.

©2011-2016 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.
Referência LBL-02204-601, Revisão 101