

Faxitron® Core

Sistema de radiografia de espécimes



GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

1. ATIVAÇÃO

- Certifique-se de que o interruptor de energia na parte posterior do gabinete do Faxitron Core esteja na posição **ON** (ligado)
- Gire a **chave** na frente do gabinete do Faxitron Core para **on** (ligado)
- **Ligue** o computador e o monitor

2. INICIAR SOFTWARE

- Verifique se não há nada na gaveta de amostras do Faxitron Core
- Clique duas vezes no ícone do **Vision** no centro da área de trabalho

3. CALIBRAR

- Você será solicitado a calibrar depois de fazer o login
Pressione o botão **"Calibrate"** (Calibrar) para prosseguir

4. DADOS DO PACIENTE

- Clique em **"Start Procedure"** (Iniciar procedimento)
- Clique em **"Select from Worklist"** (Selecionar na lista de trabalho)
- Localize o nome do paciente e clique duas vezes nele
- Preencha os campos obrigatórios em falta, tais como Laterality (Lateralidade)
- Clique em **"Accept"** (Aceitar)

5. GERAÇÃO DE IMAGENS EM RAIOS X

- Coloque o(s) espécime(s) na bandeja de espécimes do Faxitron Core
- Coloque a bandeja de espécimes na gaveta
- Feche a gaveta do Faxitron Core
- Pressione o botão verde **"X-ray"** (Raios X) para ativar os raios X; a imagem aparecerá após alguns segundos

6. MANIPULAÇÃO DE IMAGENS

- Segure o **botão esquerdo do mouse** e arraste o mouse para mudar o brilho e o contraste para a função de janela/nível
- **Ajuste o zoom** para ampliar a imagem para visualização

7. ARMAZENAMENTO EM PACS

- Clique no botão **"PACS Store"** (Armazenamento em PACS) no lado esquerdo da tela

8. IMPRESSÃO

- Clique no botão **"PACS Print"** (Impressão em PACS) no lado esquerdo da tela

9. DESLIGAMENTO

- Clique no botão **"System Shutdown"** (Desligamento do sistema) no lado esquerdo e depois clique em **"OK"**
- Gire a chave no gabinete do Faxitron Core para **off** (desligado)



www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 EUA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Bélgica
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

PATROCINADOR NA AU
Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000



Sistema Faxitron Core, conhecido também como Sistema CoreVision.

04-4046-00-2300 Rev. 032 (8/21) Hologic Inc. ©2021 Todos os direitos reservados. Hologic, CoreVision, Faxitron e The Science of Sure são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Hologic, Inc. e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. Estas informações são destinadas a profissionais médicos nos EUA e outros mercados e não se destina a solicitação ou promoção de produtos onde tais atividades são proibidas. Como os materiais da Hologic são distribuídos através de sites, eBroadcasts e feiras, nem sempre é possível controlar onde esses materiais aparecem. Para obter informações específicas sobre os produtos disponíveis para venda em um determinado país, entre em contato com o representante local da Hologic ou escreva para womenshealth@hologic.com.