

Faxitron® Path+

Røntgenfotograferingssystem til prøver

STARTVEJLEDNING

1. TÆND FOR STRØMMEN

- Sørg for, at afbryderen på bagsiden af Faxitron Path+-kabinettet er indstillet til positionen **ON** (TIL)
- Drej **nøglen** på forsiden af Faxitron Path+-kabinettet til **on** (til)
- Tænd for **skærmen** (om nødvendigt)

2. START SOFTWAREN

- Kontroller, at der ikke er noget i Faxitron Path+-røntgenkammeret
- Dobbeltklik på **Vision**-ikonet i midten af skrivebordet

3. KALIBRER

- Når du logger på, bliver du bedt om at kalibrere. Tryk på knappen **"Calibrate"** (Kalibrer) for at fortsætte

4. PATIENTDATA

- Klik på **"Start procedure"** (Start procedure)
- Klik på **"Select from Worklist"** (Vælg fra arbejdsliste)
- Find patientens navn, og dobbeltklik på det
- Indtast eventuelle manglende obligatoriske felter, f.eks. Laterality (Lateraltitet)
- Klik på **"Accept"** (Accepter)

5. RØNTGENSCANNING

- Placer prøven/prøverne i Faxitron Path+-røntgenkammeret - brug forstørrelsesbakken, hvis det ønskes
- Tryk på den grønne knap **"X-ray"** (Røntgen) for at aktivere røntgenstråler - billedet vises efter et par sekunder

6. BILLEDMANIPULATION

- Hold **venstre museknap** nede, og træk musen for at ændre lysstyrke og kontrast for vindue/niveaufunktion
- **Tilpas zoom** for at forstørre billedet til visning

7. LAGRING TIL PACS

- Klik på knappen **"PACS Store"** (PACS Gem) til venstre på skærmen

8. UDSKRIVNING

- Klik på knappen **"PACS Print"** (PACS Udskriv) til venstre på skærmen

9. NEDLUKNING

- Klik på knappen **"System Shutdown"** (Lukning af system) til venstre, og klik derefter på **"OK"**
- Drej **nøglen** i Faxitron Path+-kabinettet til **off** (fra)



www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien
Tlf.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

AU SPONSOR

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tlf.: 02 9888 8000



Faxitron Path+-systemet er også kendt som PathVision-systemet.

5081-4013-1901 Rev. 022 (8/21) Hologic Inc. ©2021 Alle rettigheder forbeholdes. Hologic, Path+, PathVision, Faxitron og The Science of Sure er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Hologic, Inc., og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Disse oplysninger er beregnet til læger på det amerikanske marked og er ikke tiltænkt som produktpromovering eller -godkendelse, hvor sådanne aktiviteter er forbudt. Da Hologic-materialer distribueres via websites, eBroadcasts og messer, er det ikke altid muligt at kontrollere, hvor sådanne materialer vises. Kontakt din lokale Hologic-repræsentant for at få specifikke oplysninger om, hvilke produkter der er tilgængelige i et bestemt land.