



Servidor de análisis de imagen Cenova™

Guía del usuario

Versión de software 2.5

MAN-04756-301 Rev 001



Servidor de análisis de imagen Cenova 2.5 **Guía del usuario**

MAN-04756-301 Rev 001

Asistencia técnica

En Norteamérica, póngase en contacto con:

Llamada gratuita: +1.866.243.2533 (+1.866.CHECKED)

Dirección de correo electrónico: sctechsupport@hologic.com

Horario: De lunes a viernes, de 6.00 a 17.00 h, PT (GMT -8)


Sitio web: www.hologic.com



En Europa, Sudamérica o Asia, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local.

© 2016, Hologic Inc. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la duplicación o distribución sin permiso por escrito. Hologic se reserva el derecho de revisar esta guía del usuario. Publicado en abril de 2016.

Patentes: <http://hologic.com/patents>

Hologic, el logotipo de Hologic, BACS, Cenova, C-View, DigitalNow, Dimensions, ELC, ImageChecker, Quantra, SecurView y Selenia son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hologic, o de sus filiales en los Estados Unidos o en otros países. El resto de marcas comerciales, marcas registradas y nombres de productos usados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

 **Hologic, Inc.**
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT, 06810 USA
Tel.: +1.781.999.7300
Ventas: +1.781.999.7453

  **Hologic Ltd.**
(EU Representative)
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road, Wythenshawe
Manchester M23 9HZ, UK
Tel: +44.0.161.946.2206

Para obtener más información acerca de los productos y servicios de Hologic, visite www.hologic.com.



El kit de herramientas de MergeCOM-3 Advanced Integrator es un producto de Merge Healthcare.

Contenido

Capítulo 1: Introducción	1
1.1. Vista general	1
1.2. Uso de este manual	2
1.3. Recursos disponibles	2
1.4. Advertencias y precauciones del servidor	3
1.4.1. Funcionamiento del sistema	3
1.4.2. Instalación y mantenimiento	4
Capítulo 2: Descripción del sistema	5
2.1. Entradas en Cenova	5
2.1.1. Dispositivos de entrada	5
2.1.2. Formatos de imagen	6
2.1.3. Licencias de los puertos de entrada y de la aplicación	6
2.2. Resultados de Cenova	7
2.3. Flujos de datos	8
2.3.1. Flujo de datos ImageChecker CAD	8
2.3.2. Flujo de datos ImageChecker CAD con DICOM 6000	10
2.3.3. Flujo de datos ImageChecker 3D Calc CAD	11
2.3.4. Flujo de datos Hologic Imaging Biomarkers	12
2.3.5. Flujo de datos DigitalNow HD	14
Capítulo 3: Funcionamiento del sistema	15
3.1. Flujo de trabajo clínico	15
3.2. Envío de imágenes al servidor	16
3.3. Inicio y apagado del servidor	17
3.3.1. Apagado del servidor	17
3.3.2. Inicio del servidor	18
3.3.3. Reinicio del servidor	18
3.4. Acceso a la información del Unique Device Identifier (UDI)	19
3.5. Uso de Case Manager	20
Índice	23

Capítulo 1: Introducción

- ▶ 1.1. Vista general
- ▶ 1.2. Uso de este manual
- ▶ 1.3. Recursos disponibles
- ▶ 1.4. Advertencias y precauciones del servidor

1.1. Vista general

Este manual proporciona instrucciones sobre el funcionamiento y mantenimiento del servidor de análisis de imagen Cenova en un entorno clínico. El servidor procesa imágenes mamográficas digitales mediante algoritmos de software patentados.

El servidor Cenova es un servidor de alto rendimiento que proporciona aplicaciones de software patentadas para asistir a los radiólogos en el análisis de imágenes de mamografía digital. Cenova está diseñado para que lo utilicen los radiólogos de un hospital, de consultas externas o de un centro de obtención de imágenes mamarias. El servidor también se puede utilizar para actividades de investigación.

El servidor puede ubicarse en cualquier entorno donde no haya pacientes, siempre que esté conectado a la red de mamografía. Una vez configurado, apenas se necesita interacción directa con el servidor. Toda la interacción se realiza por medio de una interfaz fácil de utilizar basada en un navegador web.

Convenciones DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine o generación y comunicación de imágenes digitales en Medicina) es un estándar internacional utilizado para desarrollar, transmitir, imprimir y archivar información sobre imágenes médicas. Hologic utiliza las siguientes designaciones estándar DICOM para imágenes mamográficas digitales:

- Imagen de mamografía digital DICOM obtenida mediante rayos X para procesamiento
- Imagen de mamografía digital DICOM obtenida mediante rayos X para presentación
- DICOM Secondary Capture Image (Imagen de captura secundaria) de proyección sin procesar
- DICOM Secondary Capture Image (Imagen de captura secundaria) de C-View sin procesar

Para simplificar, en este manual, estas designaciones se acortan como 'Imágenes para procesamiento', 'Imágenes para presentación', 'Imágenes de proyección sin procesar' e 'Imágenes C-View sin procesar'.

1.2. Uso de este manual

Este manual se organiza del modo siguiente:

- **Capítulo 1: Introducción:** proporciona información general sobre el servidor Cenova y los manuales.
- **Capítulo 2: Descripción del sistema:** se resumen las especificaciones de las imágenes y los formatos de datos que se transfieren entre el servidor Cenova y los demás dispositivos que puedan estar instalados en el centro.
- **Capítulo 3: Funcionamiento del sistema:** proporciona información sobre la gestión del flujo de trabajo clínico, el apagado y encendido del servidor, el acceso a la información UDI y el uso de Case Manager de Cenova.

1.3. Recursos disponibles

Además de este manual, dispone de los recursos siguientes para el trabajo con el servidor Cenova.

- **Formación:** El equipo de aplicaciones de Hologic está a su disposición para formar a su personal, en caso de que necesiten instrucción adicional. Si desea adquirir formación adicional in situ, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor local de Hologic.
- **Manuales:** Hologic proporciona los manuales siguientes para el servidor Cenova y sus aplicaciones:

- *Cenova Image Analytics Server User Guide*
- *Understanding ImageChecker CAD User Guide*
- *Understanding ImageChecker 3D Calc CAD User Guide*
- *Understanding Quantra User Guide*
- *Understanding BACS User Guide*
- *Understanding DigitalNow HD User Guide*
- *Cenova Image Analytics Server Installation & Service Manual*
- *Cenova Image Analytics Server Release Notes*
- *Declaración de conformidad con DICOM del servidor de análisis de imagen Cenova*
- *Cenova Image Analytics Server Cybersecurity Product Report*
- *Cenova Image Analytics Server System Requirements*

Puede obtener copias adicionales de los manuales impresos a través de su proveedor o distribuidor local de Hologic. Puede acceder a los documentos Declaración de conformidad con DICOM y Cybersecurity Product Report en el sitio web de Hologic.

- **Asistencia técnica y mantenimiento:** Para recibir asistencia en Norteamérica, póngase en contacto con:

Llamada gratuita: +1.866.243.2533 (+1.866.CHECKED)

Dirección de correo

electrónico: sctechsupport@hologic.com

Horario: De lunes a viernes, de 6.00 a 17.00, PT (GMT -8).

Sitio web: www.hologic.com

Para obtener asistencia en Europa, Sudamérica o Asia, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local.

1.4. Advertencias y precauciones del servidor



Este manual utiliza las convenciones siguientes para proporcionar información técnica y de seguridad de interés especial.

⚠️ ADVERTENCIA: Instrucción que, de no seguirse, podría resultar en una situación peligrosa.

⚠️ PRECAUCIÓN: Instrucción cuyo seguimiento es esencial para evitar daños materiales en el sistema.

⚠️ Importante: Instrucción esencial para garantizar unos resultados correctos y un rendimiento óptimo, y para aclarar las limitaciones del dispositivo.

⚠️ Nota: Información proporcionada para aclarar un paso o procedimiento concreto.

Antes de usar el sistema lea las advertencias y precauciones siguientes.

1.4.1. Funcionamiento del sistema

⚠️ ADVERTENCIA: Siga las instrucciones indicadas ya que, en caso contrario, podría resultar en una situación peligrosa.

- Solo el personal que haya leído este manual y recibido formación sobre su funcionamiento debería utilizar el servidor. Hologic no asumirá la responsabilidad por los daños personales o materiales asociados a un uso inadecuado o inseguro del sistema.
- Utilice el servidor únicamente fuera del entorno de los pacientes. El servidor está indicado para uso exclusivo en un entorno de oficina.
- No coloque contenedores de líquidos sobre el dispositivo. Si se produce un derrame, desactive la alimentación de todos los componentes del dispositivo antes de limpiarlo para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica. Si los componentes internos quedan expuestos al líquido, no accione el dispositivo; póngase en contacto con el representante del servicio técnico.

⚠️ PRECAUCIÓN: Apague siempre el ordenador de acuerdo con los procedimientos indicados en el manual. Si se apaga el sistema de manera inadecuada, puede producirse la pérdida de datos o daños en el sistema operativo del ordenador.

⚠️ Importante: Siga las instrucciones indicadas para garantizar unos resultados correctos y un rendimiento óptimo, o para clarificar las limitaciones del dispositivo.

- Para un correcto funcionamiento del sistema, la calidad técnica de las imágenes (por ejemplo, el contraste) debería ser aceptable para el radiólogo que las interpreta y debería cumplir con los requisitos presentes en la normativa de calidad para mamografías (MQSA o Mammography Quality Standards Act) o con los estándares nacionales correspondientes.
- El diseño del dispositivo y su modo de funcionamiento cumplen con el protocolo clínico de mamografía estándar actual, según los requisitos de la ley MQSA. Se recomienda a los usuarios que cumplan la MQSA en Estados Unidos, o la normativa nacional correspondiente, a la hora de implantar las aplicaciones mamográficas Cenova en los protocolos clínicos.
- Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase A, conforme a la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra cualquier interferencia perjudicial cuando se utiliza el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. El uso de este equipo en una zona residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia por cuenta propia.

1.4.2. Instalación y mantenimiento



⚠ ADVERTENCIA: Siga las instrucciones indicadas ya que, en caso contrario, podría resultar en una situación peligrosa.

- El símbolo situado junto al conector de alimentación indica un posible riesgo de descarga. Para reducir la probabilidad de descarga eléctrica o el riesgo de incendio, conecte el ordenador únicamente a un receptáculo de alimentación provisto de una conexión a tierra adecuada que suministre tensión y corriente de acuerdo con las especificaciones del servidor.
- Para conectar la alimentación principal al servidor, utilice siempre un cable de alimentación de conexión a tierra de tres conductores que cumpla con la normativa local. El uso de un adaptador de dos clavijas anula la función de toma de tierra y da lugar a un riesgo serio de descarga eléctrica.
- Los servidores Cenova son pesados. Si necesita levantar o colocar el servidor, pida ayuda.
- Antes de limpiar el servidor, apáguelo siempre de acuerdo con los procedimientos indicados en este manual y desconecte el cable de alimentación para prevenir la posibilidad de una descarga eléctrica. No utilice alcohol, benceno, disolventes u otros agentes limpiadores inflamables.

⚠ PRECAUCIÓN: Este producto no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Para prevenir daños en el servidor, haga lo siguiente:

- Mantenga el equipo en un lugar bien ventilado y con aire acondicionado que cumpla con las especificaciones de temperatura y humedad que indica el manual de mantenimiento del producto.
- No instale ni repare el servidor Cenova. Solo el personal capacitado y autorizado por Hologic está cualificado para instalar o reparar el servidor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de mover el dispositivo o efectuar cualquier tarea de mantenimiento.
- Instale el servidor de forma que esté protegido por el firewall para garantizar la seguridad de red y la protección antivirus. Hologic no proporciona ningún tipo de protección antivirus o de seguridad para el servidor. Si necesita software antivirus, visite el sitio web de Hologic con el fin de obtener información sobre el programa de ciberseguridad de Hologic y la guía de instalación del software antivirus.

Capítulo 2: Descripción del sistema

- ▶ 2.1. Entradas en Cenova
- ▶ 2.2. Resultados de Cenova
- ▶ 2.3. Flujos de datos

En este capítulo se describe el flujo de datos que se transfieren entre Cenova y los demás dispositivos que puedan estar instalados en el centro.

2.1. Entradas en Cenova

- ▶ 2.1.1. Dispositivos de entrada
- ▶ 2.1.2. Formatos de imagen
- ▶ 2.1.3. Licencias de los puertos de entrada y de la aplicación

2.1.1. Dispositivos de entrada

El servidor admite entradas de los tipos de dispositivos que se indican a continuación. Algunas restricciones propias de cada país son aplicables.

- **Sistemas de mamografía digital de campo completo:** Cenova procesa imágenes bidimensionales de mamografía digital procedentes de sistemas de adquisición de imágenes de mamografía digital de campo completo (FFDM). Cenova admite entradas de dispositivos FFDM distribuidos por Hologic Inc. (Bedford, MA), GE Healthcare (Waukesha, WI) y Siemens AG (Múnich, Alemania).
- **Sistemas de tomosíntesis digital de mama:** Cenova procesa los conjuntos de datos de mamografías en 3D y las imágenes C-View™ en 2D generadas por los sistemas Hologic Selenia® Dimensions®.
- **Sistemas de digitalización de películas:** Para mamogramas en película, Cenova procesa imágenes de DigitalNow procedentes de cualquiera de los sistemas de escaneado de películas de Hologic.

Además, las imágenes originadas en cualquiera de estos sistemas se pueden enviar a Cenova desde un sistema de archivo de imágenes y de comunicación (PACS).

Si desea obtener más información sobre los dispositivos de entrada admitidos, consulte el manual de la aplicación de software concreta.

2.1.2. Formatos de imagen

El servidor Cenova procesa los objetos digitales de las imágenes de mamografía que se ajustan al estándar DICOM. El servidor procesa los siguientes tipos de objetos de imagen DICOM:

- Los objetos de imagen que el sistema FFDM envía a Cenova tras un examen mamográfico convencional conocidos como imágenes *para el procesamiento* (denominados también imágenes en 2D 'sin procesar').
- Los objetos de imagen enviados por los sistemas de mamografía en 3D de Hologic a Cenova conocidos como imágenes de *proyección sin procesar*.
- Los objetos de imagen enviados por los sistemas de mamografía en 3D de Hologic a Cenova conocidos como imágenes *C-View sin procesar*.
- Los objetos de imagen que envía a Cenova cualquiera de los sistemas de digitalización de películas de Hologic conocidos como imágenes *para presentación*.

El software no procesa determinados objetos de imagen DICOM, en función de la aplicación y la vista de la mamografía que muestra la imagen.

Para obtener más información sobre los formatos de imagen, consulte los diagramas en [2.3. Flujos de datos](#).

2.1.3. Licencias de los puertos de entrada y de la aplicación

Cada dispositivo que produce archivos de imagen digital mamográfica se asigna a un puerto de entrada en el servidor Cenova. El encabezado DICOM de cada objeto de imagen incluye un identificador (por ejemplo, un número de serie) que indica el dispositivo de origen de la imagen.

Para cada servidor Cenova, los centros pueden admitir una de las opciones siguientes:

- Hasta cuatro licencias para cualquiera o todas las aplicaciones de software en 2D más una sola licencia para DigitalNow HD
- Hasta dos licencias para ImageChecker 3D Calc CAD
- Una sola licencia para DigitalNow HD

Tenga en cuenta que exceder estas directrices con un solo servidor puede afectar a los tiempos de respuesta del sistema.

Cada aplicación de software de Cenova necesita una licencia de software para cada dispositivo de entrada. Por ejemplo, si hay cuatro dispositivos FFDM el servidor Cenova debe configurarse con cuatro licencias de software para cada aplicación de software Cenova que se quiera utilizar.

El servidor Cenova también puede procesar imágenes recibidas de un número ilimitado de dispositivos PACS, siempre que las imágenes se originen en uno de los dispositivos de gantry de adquisición.

Para obtener asistencia con las configuraciones de las licencias, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local de Hologic.

2.2. Resultados de Cenova

Cenova envía sus resultados a las estaciones de trabajo de diagnóstico (como Hologic SecurView DX) y a los dispositivos PACS. Dependiendo de la aplicación, Cenova puede transmitir resultados de una o varias formas. La tabla siguiente muestra los formatos de salida de cada aplicación.

Aplicación	CAD SR	Imagen SC	RTSS	Impresora	Imagen MG
ImageChecker CAD (2D)	✓	✓	✓	✓	
ImageChecker 3D Calc CAD		✓			
Hologic Imaging Biomarkers	✓	✓			
DigitalNow HD					✓

- **CAD SR:** El formato Mammography CAD SR es el estándar DICOM utilizado para los resultados de ImageChecker CAD y Hologic Imaging Biomarker.
- **Imagen SC:** Mammography CAD SC (captura secundaria) proporciona las vistas de procesamiento de casos (normalmente las cuatro vistas de examen) con resultados de ImageChecker CAD, Hologic Imaging Biomarkers o patentados de ImageChecker 3D Calc CAD. Con ImageChecker CAD y Hologic Imaging Biomarkers, este formato está dirigido a estaciones de trabajo no compatibles con Mammography CAD SR.
- **RTSS:** El formato de conjunto de estructuras de radioterapia se desarrolló específicamente para mostrar resultados de ImageChecker CAD en determinadas estaciones de trabajo de revisión de GE.
- **Impresora:** Este formato proporciona resultados de ImageChecker CAD para las vistas de procesamiento de casos (normalmente las cuatro vistas de examen).
- **Imagen MG:** Este formato (imagen de rayos X de mamografía digital DICOM: Para presentación) proporciona imágenes DigitalNow HD.

En el caso de estaciones de trabajo y dispositivos PACS que no admiten objetos de ImageChecker CAD Mammography CAD SR, pero sí admiten superposiciones DICOM 6000, la solución DICOM 6000 Interface de Hologic puede utilizarse para convertir los resultados de ImageChecker CAD (consulte el apartado **2.3.2. Flujo de datos ImageChecker CAD con DICOM 6000**). Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local de Hologic.

⚠ Nota: Se requiere la versión 1.1.7. de DICOM 6000 para admitir CAD en los resultados de C-View en 2D como superposición DICOM 6000.

⚠ Nota: La versión 1.1.7 de DICOM 6000 Interface puede permanecer en un servidor Cenova.

2.3. Flujos de datos

Esta sección describe el flujo de información entre los distintos dispositivos de las aplicaciones Cenova, como se indica a continuación.

- ▶ **2.3.1. Flujo de datos ImageChecker CAD**
- ▶ **2.3.2. Flujo de datos ImageChecker CAD con DICOM 6000**
- ▶ **2.3.3. Flujo de datos ImageChecker 3D Calc CAD**
- ▶
- ▶ **2.3.4. Flujo de datos Hologic Imaging Biomarkers**
- ▶ **2.3.5. Flujo de datos DigitalNow HD**

Tenga en cuenta que la configuración del sistema mamográfico dependerá de los dispositivos instalados en el centro.

2.3.1. Flujo de datos ImageChecker CAD

El diagrama siguiente muestra el flujo normal de información entre sistemas con ImageChecker CAD.

⚠ Nota: *ImageChecker CAD también se aplica a imágenes C-View en 2D. Las imágenes C-View sin procesar se envían al servidor Cenova. La imagen de tomosíntesis de mama o las imágenes para presentación correspondientes se envían a las estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS.*

⚠ Nota: *Cuando las imágenes de mamografía en 2D y las imágenes C-View en 2D se envían a Cenova para un estudio ComboHD, el servidor Cenova producirá resultados de ImageChecker CAD separados para las imágenes de mamografía en 2D convencionales y las imágenes C-View en 2D, respectivamente.*

Sistemas de adquisición de imágenes

1, 2, 3: Los sistemas FFDM pueden configurarse para enviar imágenes de rayos X de mamografía digital a cualquier dispositivo que se ajuste al estándar DICOM. El dispositivo FFDM envía dos tipos de imágenes, las imágenes para procesar al servidor Cenova y las imágenes para presentación a las estaciones de trabajo de revisión de diagnóstico y PACS.

Servidor Cenova


4, 5, 6: El servidor Cenova envía los resultados (por ejemplo, objetos de Mammography CAD SR o imágenes CAD SC) a una o más estaciones de trabajo de revisión diagnóstica o dispositivos PACS. El servidor Cenova puede proporcionar, de igual modo, resultados impresos en los que se muestren vistas de procesamiento de casos con marcas de CAD.

Estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS

3, 4, 8: Las estaciones de trabajo de revisión están configuradas para recibir imágenes para presentación (3, 8) y resultados de ImageChecker CAD (4, 8), que el radiólogo deberá revisar a continuación.

7, 8: PACS puede configurarse para enviar:

- Imágenes para procesamiento a Cenova (7), que las procesa y distribuye los resultados de CAD de acuerdo con su configuración, o
- Resultados de ImageChecker CAD o imágenes para presentación a las estaciones de trabajo de revisión (8).

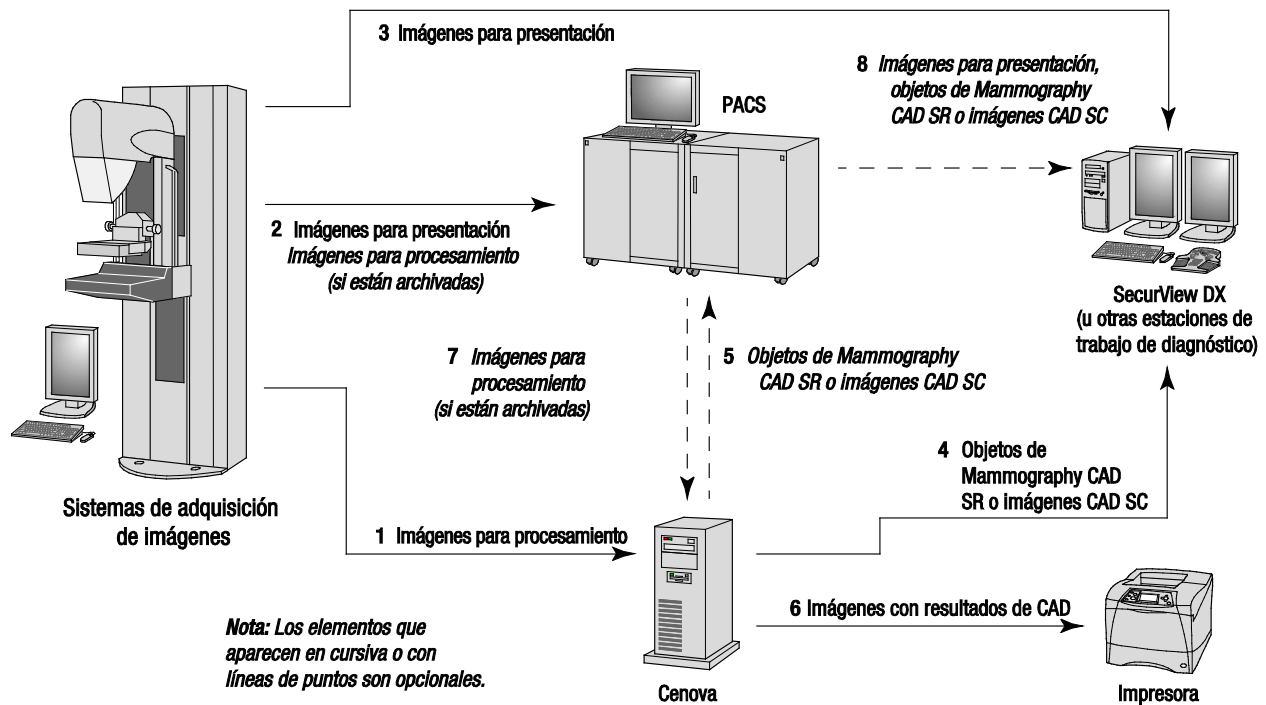

Flujo de datos ImageChecker CAD

2.3.2. Flujo de datos ImageChecker CAD con DICOM 6000

Normalmente, las estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y los dispositivos PACS son compatibles con el formato de resultados Mammography CAD SR. Si su estación de trabajo de revisión o PACS no es compatible con Mammography CAD SR, pero sí lo es con las superposiciones DICOM 6000, puede instalar un ordenador de interfaz complementario. Para obtener más información sobre la opción Hologic DICOM 6000 Interface, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local de Hologic.

Sistemas de adquisición de imágenes

1, 2, 3, 4: El dispositivo FFDM envía imágenes para procesamiento al servidor Cenova, y para presentación a las estaciones de trabajo de revisión diagnóstica, PACS y DICOM 6000 Interface.

Servidor Cenova

5: El servidor Cenova envía resultados CAD en formato DICOM Mammography CAD SR a DICOM 6000 Interface. No es necesario enviar imágenes.

DICOM 6000 Interface


6: DICOM 6000 Interface envía imágenes con superposiciones de resultados DICOM 6000 CAD a la estación de trabajo diagnóstica para su revisión y al PACS para su almacenamiento.

Nota: *DICOM 6000 Interface puede permanecer en un servidor Cenova.*

Estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS

3, 6: La estación de trabajo de revisión recibe las imágenes para presentación y las imágenes para presentación con superposiciones de resultados DICOM 6000 CAD, que ya puede revisar el radiólogo.

7: Si los resultados se almacenan en un PACS, pueden recuperarse y enviarse a la estación de trabajo de revisión en cualquier momento.

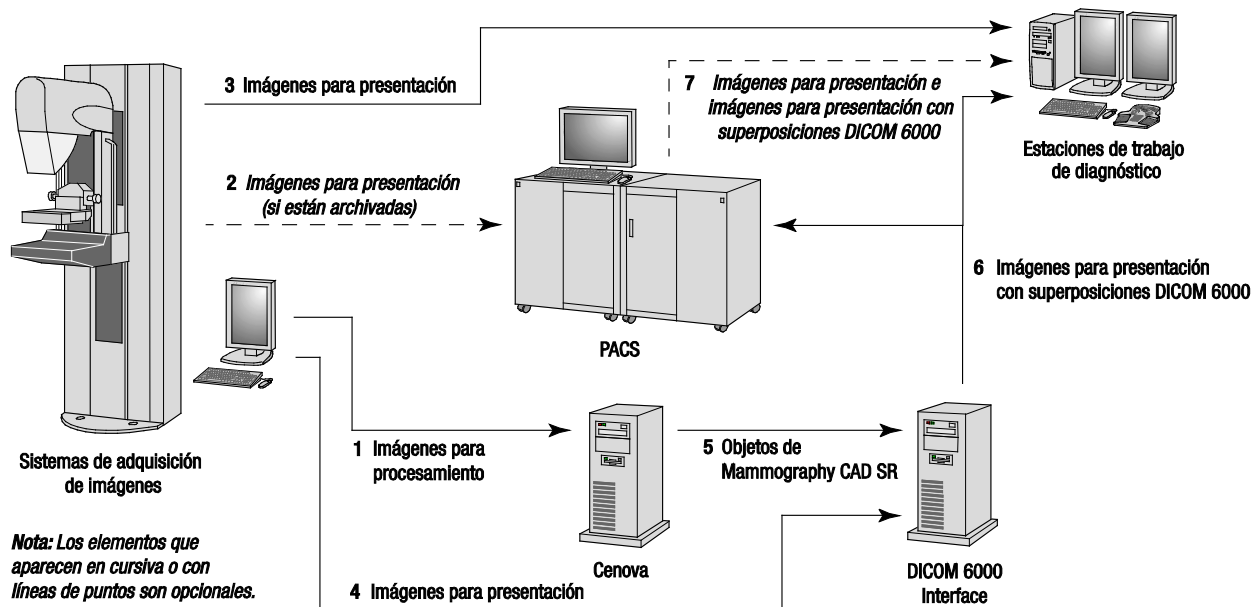

Flujo de datos ImageChecker CAD con DICOM 6000

2.3.3. Flujo de datos ImageChecker 3D Calc CAD

En esta sección se describe el flujo de datos entre los diversos dispositivos durante el procesamiento y la revisión de imágenes de mamografía en 3D de Hologic. Para seguir los flujos de datos, consulte el diagrama siguiente.

Sistemas de adquisición de imágenes

1, 2, 3: Los sistemas de mamografía en 3D de Hologic pueden configurarse para enviar conjuntos de datos de mamografías en 3D a cualquier dispositivo compatible. A efectos de CAD, el dispositivo de mamografía en 3D envía dos tipos de imágenes: al servidor Cenova, las imágenes para procesamiento; y a las estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS, los cortes reconstruidos.

Servidor Cenova


4, 5: El servidor Cenova envía los resultados de CAD a una o más estaciones de trabajo de revisión diagnóstica o dispositivos PACS. Los resultados se codifican de forma patentada dentro de objetos de imagen DICOM Secondary Capture. La salida de Cenova solo puede interpretarse mediante Hologic SecurView. No hay ningún formato DICOM disponible para codificar resultados de CAD de mamografías en 3D que pueda funcionar en distintos sistemas informáticos.

Estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS

3, 4, 7: Las estaciones de trabajo de revisión están configuradas para recibir cortes reconstruidos (3, 7) y resultados de ImageChecker 3D Calc CAD (4, 7) que revisará a continuación el radiólogo.

6, 7: El PACS puede configurarse para enviar:

- Imágenes de proyección a Cenova (6), que las procesa y distribuye los resultados de CAD de acuerdo con su configuración, y
- Resultados de ImageChecker 3D Calc CAD o cortes reconstruidos a las estaciones de trabajo de revisión (7).

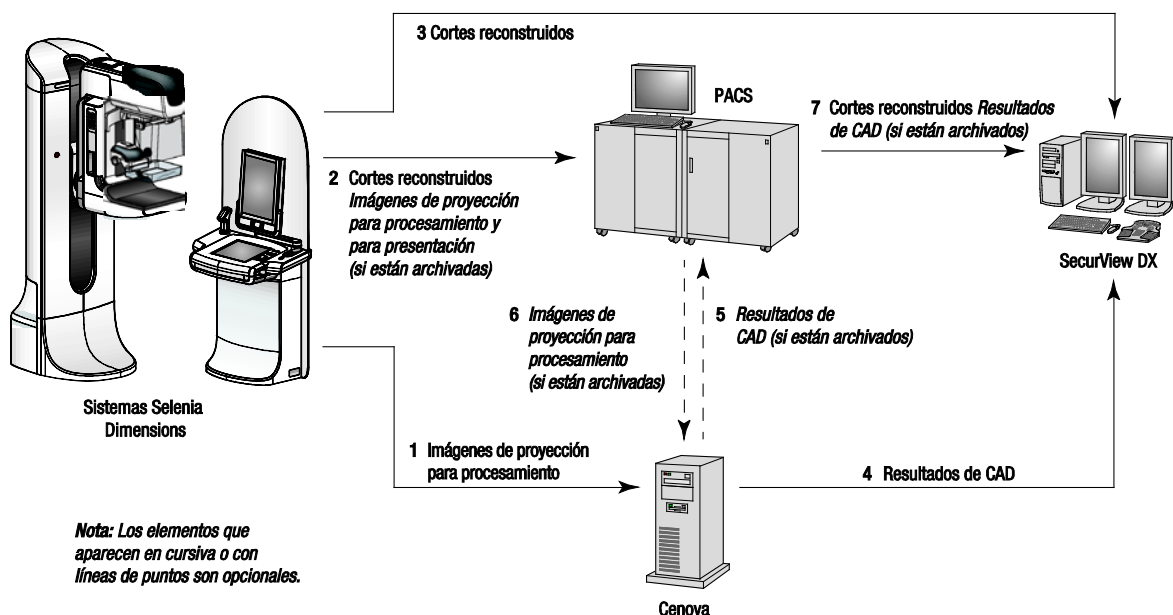

Flujo de datos ImageChecker 3D Calc CAD

2.3.4. Flujo de datos Hologic Imaging Biomarkers

La siguiente cifra muestra el flujo de datos entre los diversos dispositivos con las aplicaciones Quantra y BACS.

⚠ Nota: Cuando las imágenes de mamografía en 2D convencionales y las imágenes de proyección sin procesar se envían a Cenova para un estudio Combo o ComboHD, el servidor Cenova producirá un conjunto de resultados de Quantra para las imágenes en 2D o 3D por cada configuración de Cenova.

Dispositivos de adquisición de imágenes

1, 2, 3: El dispositivo FFDM envía las imágenes para procesar al servidor Cenova y las imágenes para presentación a las estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS. El dispositivo de mamografía en 3D de Hologic envía las imágenes para procesamiento al servidor Cenova; y los cortes reconstruidos a las estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS.

Servidor Cenova

4, 5: El servidor Cenova envía los resultados de Hologic Imaging Biomarker (objetos DICOM SR o imágenes DICOM SC) a una o más estaciones de trabajo de revisión diagnósticas o dispositivos PACS de forma simultánea.


⚠ Nota: Debido a la compleja naturaleza de los objetos DICOM SR, es probable que solo la estación de trabajo SecurView DX de Hologic muestre objetos Biomarker SR a corto plazo. Esta es la razón por la que el servidor Cenova puede configurarse en lugar de enviar los resultados de Biomarker como imágenes de DICOM Secondary Capture.

Estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS

1, 4, 7: Las estaciones de trabajo de revisión están configuradas de manera que puedan recibir imágenes para presentación, cortes reconstruidos y resultados Biomarker, que el radiólogo deberá revisar a continuación.

6, 7: De manera opcional, PACS puede configurarse para enviar:

- imágenes para procesamiento a Cenova (6), que las procesa y distribuye los resultados de Biomarker de acuerdo con su configuración, y
- los resultados de Quontra o imágenes para presentación a las estaciones de trabajo de revisión (7).

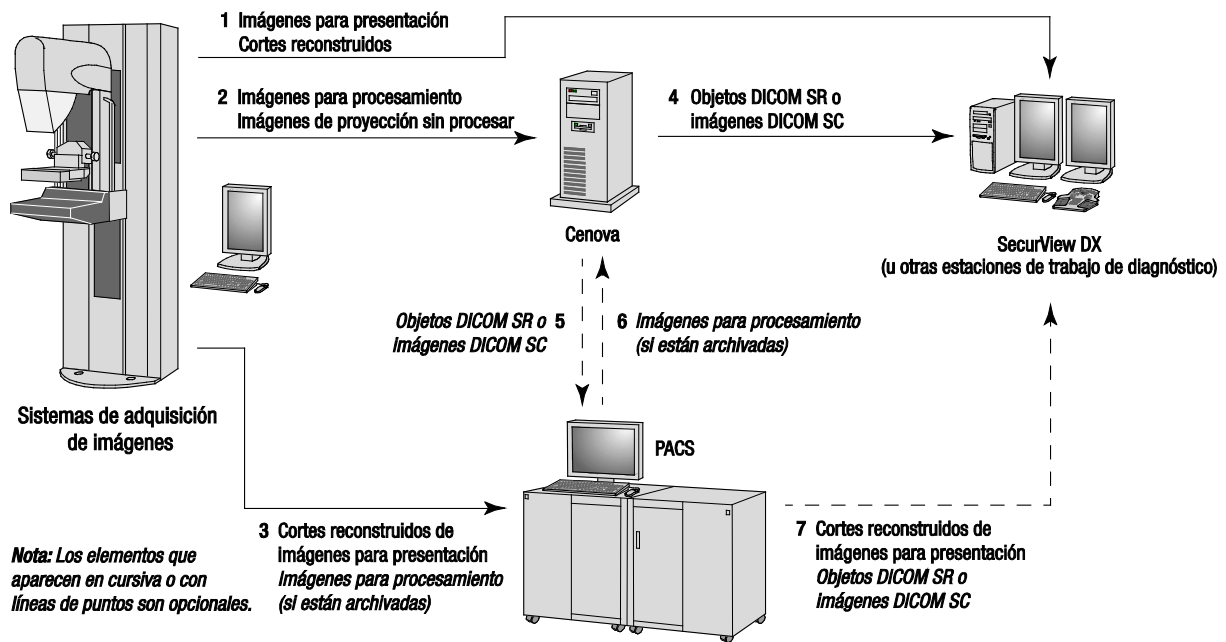

Flujo de datos Hologic Imaging Biomarkers

2.3.5. Flujo de datos DigitalNow HD

La siguiente cifra muestra el flujo de datos entre los diversos dispositivos.

Dispositivo de imagen fuente

1: El sistema de escaneado fílmico de Hologic envía imágenes DigitalNow para presentación al servidor Cenova.

Servidor Cenova


2: El servidor Cenova procesa las imágenes y envía imágenes nuevas DigitalNow HD para presentación al dispositivo PACS.

3: De manera opcional, el servidor también puede enviar imágenes directamente a uno o más dispositivos de estaciones de trabajo de revisión.

Estaciones de trabajo de revisión diagnóstica y PACS

4: PACS se configura para que envíe las imágenes DigitalNow HD para presentación a una o más estaciones de trabajo de revisión. El radiólogo puede revisar las imágenes a continuación.

5: Dependiendo de las necesidades de la instalación, PACS puede configurarse también para enviar imágenes DigitalNow archivadas previamente al servidor Cenova.

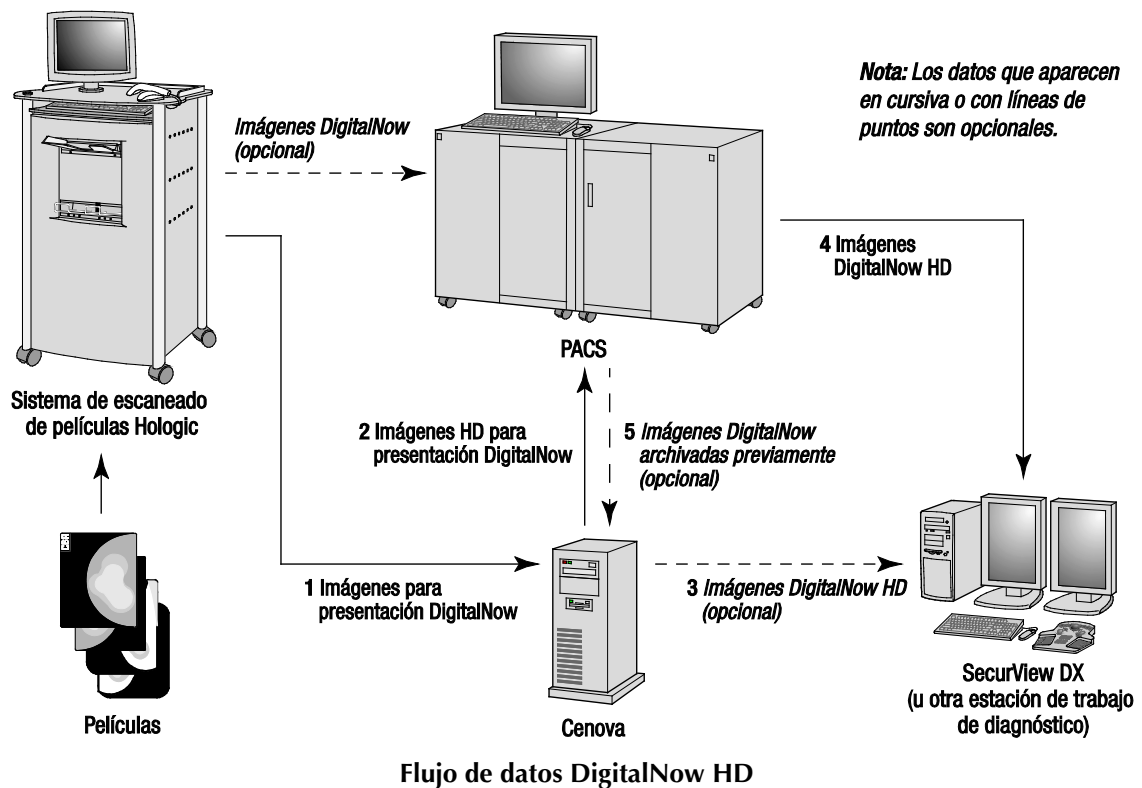

Capítulo 3: Funcionamiento del sistema

- ▶ **3.1. Flujo de trabajo clínico**
- ▶ **3.2. Envío de imágenes al servidor**
- ▶ **3.3. Inicio y apagado del servidor**
- ▶ **3.4. Acceso a la información del Unique Device Identifier (UDI)**
- ▶ **Error! Reference source not found.. Uso de Case Manager**

Una vez configurado, apenas se necesita interacción directa con el servidor Cenova. Toda la interacción con el servidor se realiza por medio de una interfaz fácil de utilizar y un navegador web.


3.1. Flujo de trabajo clínico

Para visualizar los resultados producidos por el servidor Cenova con las imágenes mamográficas del paciente, siga las directrices del proveedor de la estación de trabajo. Los radiólogos, normalmente, revisan las imágenes mamográficas mediante un protocolo similar a la secuencia que aparece en la tabla siguiente:

Para este paso...	El radiólogo...
Revisión preliminar	Revisa las imágenes mamográficas para obtener una opinión preliminar del estado del paciente.
DigitalNow HD	Compara imágenes de películas digitalizadas previamente con las imágenes mamográficas nuevas.
Hologic Imaging Biomarkers	Revisa y anota las detecciones Biomarker.
Evaluación preliminar	Examina las imágenes mamográficas en detalle y realiza un diagnóstico primario.
Detección asistida por ordenador	Visualiza las marcas CAD y evalúa los datos relacionados con ImageChecker para determinar si algún área de las imágenes requiere una revisión adicional.
Evaluación final	Realiza una valoración final y crea un informe.


3.2. Envío de imágenes al servidor

El servidor acepta automáticamente las imágenes a medida que se envían desde el sistema de adquisición, escáner de películas o dispositivo de archivo. El servidor Cenova agrupa en un *estudio* las imágenes sucesivas que tengan el mismo UID (identificador único) de instancia de estudio DICOM, si las imágenes se reciben dentro de un intervalo de tiempo configurado por el representante del servicio técnico al realizar la instalación del sistema. El intervalo de tiempo no es fijo y el servidor lo ajusta automáticamente para maximizar el rendimiento. (Para obtener más información, póngase en contacto con asistencia técnica de Hologic.)

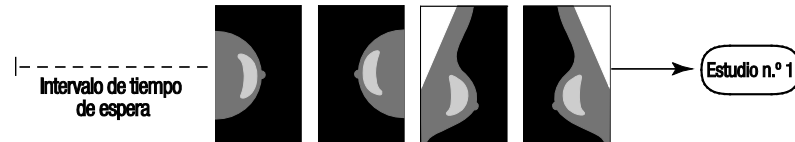

El servidor asigna las imágenes recibidas a un estudio antes de que transcurra el tiempo de espera

El servidor asigna cualquier imagen recibida una vez transcurrido el tiempo de espera a un nuevo estudio con el mismo UID de instancia de estudio. En la estación de trabajo de revisión, se verán dos conjuntos de resultados, que se diferenciarán por la hora y la fecha en que los generó el servidor.

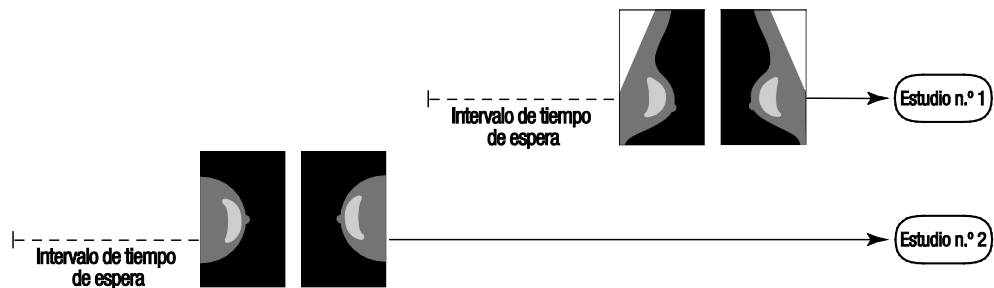

El servidor asigna las imágenes recibidas a un estudio nuevo una vez transcurrido el tiempo de espera

Para reducir la posibilidad de resultados múltiples, Hologic recomienda que las imágenes de exploración de cada paciente se envíen desde el dispositivo de adquisición de imagen juntas, en sucesión rápida y cuando se cierre el estudio.

⚠ Nota: Como alternativa, también puede configurarse el servidor de tal forma que agrupe en un único estudio todas las imágenes con el mismo UID de instancia de estudio, independientemente de cuándo se hayan recibido (es decir, se pueden incluir imágenes de un estudio anterior). Para obtener información adicional, consulte al representante de asistencia técnica.

El representante del servicio técnico es el responsable de configurar el sistema de forma que las imágenes se envíen correctamente al servidor, además de la estación de trabajo de revisión y los destinos finales deseados. Si desea obtener más información sobre el flujo de datos entre los distintos dispositivos, consulte el apartado **2.3. Flujos de datos**.

3.3. Inicio y apagado del servidor

El servidor Cenova no precisa un mantenimiento regular. Los únicos procedimientos que pueden ser necesarios son los siguientes:

- ▶ **3.3.1. Apagado del servidor**
- ▶ **3.3.2. Inicio del servidor**
- ▶ **3.3.3. Reinicio del servidor** (apagado y encendido)

Para estos procedimientos, necesita conocer la dirección IP del ordenador. Puede obtener la dirección IP en la pantalla de Cenova System Settings – Connectivity. Escriba aquí ese número:

Dirección IP del servidor Cenova: _____

⚠ Nota: Utilice estos procedimientos si DICOM 6000 Interface está instalado en un servidor Cenova.


3.3.1. Apagado del servidor

Puede ser necesario apagar el servidor Cenova si va a cambiar de sitio el ordenador o si sabe que va a producirse un corte del suministro eléctrico durante un período de tiempo.

⚠ Importante: si apaga el servidor desde una ubicación remota, para volver a encenderlo deberá disponer de acceso físico al servidor.

▶ Para apagar el servidor:

- 1 Abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer) en un ordenador que esté conectado a la misma red que el servidor.
- 2 Escriba la dirección IP del servidor en el cuadro de dirección y pulse **[Enter]**. No es necesario que escriba «http» ni ninguna otra información además de la dirección IP.
- 3 En la pantalla de conexión, introduzca el nombre de usuario ('siteadmin') y la contraseña. Aparecerá la pantalla About, como se muestra a continuación.

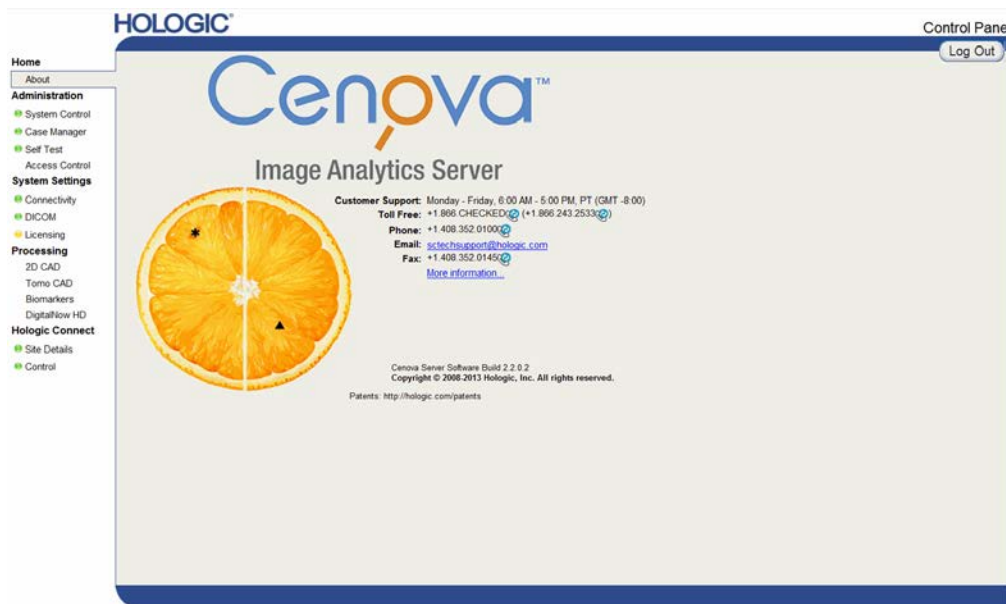

- Haga clic en **System Control** para visualizar la pantalla siguiente:



- Haga clic en **Shutdown**. El servidor le preguntará si está seguro ('Are you sure...?'). Haga clic en **OK** para apagar el servidor.

Shutdown

Nota: Para restaurar la alimentación eléctrica cuando está apagado, se precisa tener acceso físico al servidor. Si el servidor se encuentra en una ubicación remota, utilice **Restart**.

3.3.2. Inicio del servidor

Si se ha desconectado el servidor de la alimentación, puede volver a conectarlo pulsando el botón de alimentación de la parte frontal del ordenador. (Un indicador luminoso señalará si el servidor está encendido o apagado.) El software Cenova se iniciará automáticamente; el servidor debería poder utilizarse en 3–5 minutos.

3.3.3. Reinicio del servidor

Es posible que deba reiniciar el servidor Cenova si los resultados no se transfieren. Normalmente, al reiniciar el servidor se anulan los errores. En algunos casos, el representante del servicio técnico le pedirá que reinicie el servidor.

► Para reiniciar el servidor:

- Abra un navegador web en un ordenador que esté conectado a la misma red que el servidor Cenova.
- Escriba la dirección IP del servidor Cenova en el cuadro de dirección y pulse **[Enter]**. No es necesario que escriba «http» ni ninguna otra información además de la dirección IP.
- En la pantalla de conexión, introduzca el nombre de usuario ('Administrator') y la contraseña. La pantalla About debería aparecer, tal como se mostró en el procedimiento anterior.
- En la pantalla About, haga clic en **System Control**.
- En la pantalla System Control, haga clic en **Restart**. El servidor le preguntará si está seguro ('Are you sure...?'). Haga clic en el botón Restart una vez más. El servidor se apagará y reiniciará automáticamente. El servidor debería estar listo para usar en unos 5 minutos.

Restart

Nota: Para seguir utilizando el servidor, actualice el navegador repitiendo los pasos **1–3**.

3.4. Acceso a la información del Unique Device Identifier (UDI)

El Unique Device Identifier (UDI) es un código numérico o alfanumérico único que identifica un dispositivo médico en su distribución y uso. La información de UDI se muestra en la pantalla About de la aplicación Cenova.

► **Para acceder a la información UDI en Cenova:**

- 1 Inicie la aplicación Cenova e inicie sesión (consulte el apartado **3.3. Inicio y apagado del servidor**). Aparecerá la pantalla About.
- 2 En la pantalla About, haga clic en **More Information**.


La información UDI se muestra en la siguiente pantalla.

3.5. Uso de Case Manager

Case Manager permite mostrar, analizar y solucionar los problemas de los estudios desde el panel de control de Cenova. Puede utilizar Case Manager para lo siguiente:

- Explorar y clasificar estudios
- Buscar un estudio mediante el uso de datos, como la información de los pacientes, la fecha de procesamiento, etc.
- Exportar resultados Biomarker
- Eliminar estudios
- Revisar información para un estudio

Cuando seleccione la opción Case Manager del panel de control de Cenova, aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

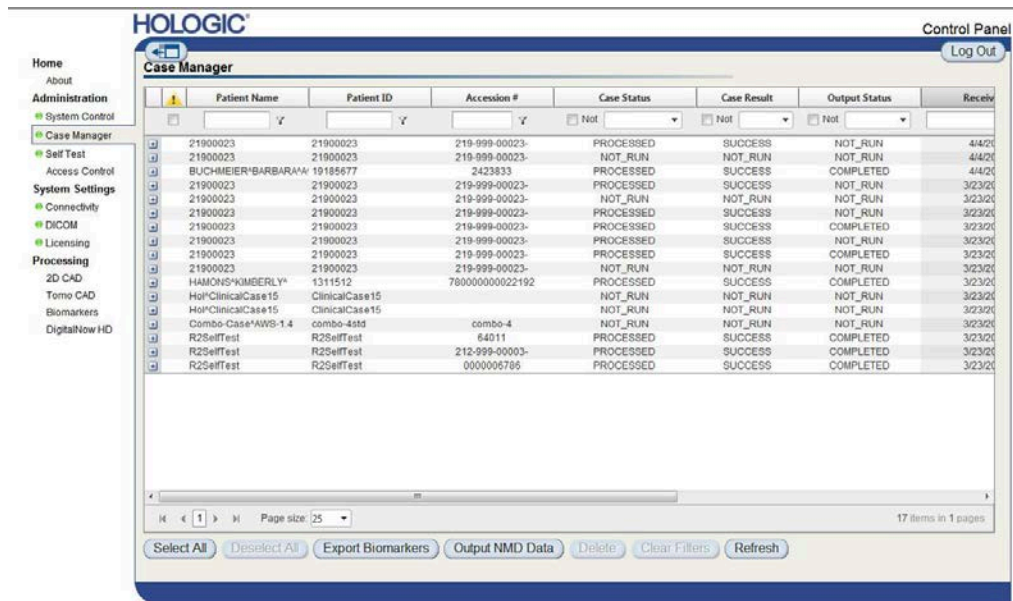

De forma predeterminada, los estudios aparecen en orden cronológico inverso (primero el más reciente). Los registros están dispuestos en filas y columnas. En cada fila se muestra un estudio.



Haga clic en **Hide Navigation Panel** para expandir la ventana de visualización de Case Manager.


► **Para explorar y clasificar estudios:**


Puede clasificar los valores de cualquier columna haciendo clic en sus encabezados (Patient Name, Patient ID, etc.). El servidor clasifica los valores en orden ascendente alfanumérico o por fecha y hora, dependiendo del tipo de datos que se van a clasificar. Haga clic en el encabezado de la columna para clasificarla en orden descendente.

Patient Name	Patient ID	Accession #	Case Status	Case Result
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Not <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Not <input type="text" value=""/>


► **Para buscar un estudio:**

Introduzca el texto o los números que quiera encontrar en los cuadros de búsqueda, y pulse **[Enter]**. El servidor buscará en su base de datos y devolverá únicamente estudios con valores que contengan los caracteres que escriba.

Para eliminar el filtro, haga clic en **el icono de filtro**  y luego haga clic en **NoFilter** en el menú desplegable:

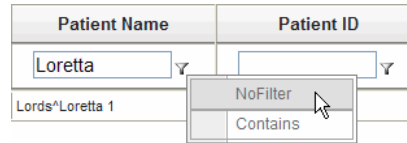

Puede excluir un criterio de búsqueda para algunas columnas marcando la casilla 'Not':

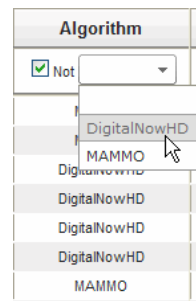

Clear Filters

Para borrar el criterio de búsqueda seleccionado, haga clic en **Clear Filters**.

► **Para exportar los resultados Biomarker:**


Export Biomarkers

Puede recopilar los resultados Biomarker y exportarlo a un archivo .csv, que se puede abrir con una aplicación de hoja de cálculo. Para utilizar esta función, el servidor debe configurarse con una licencia Hologic Imaging Biomarkers válida.

- 1 Seleccione uno o más estudios con la función de búsqueda de Case Manager. Si no selecciona ningún estudio el servidor exportará todos los resultados Biomarker.
- 2 Haga clic en **Export Biomarkers** para mostrar la ventana File Download.
- 3 Haga clic en **Save**. En la ventana Save As, navegue hasta la ubicación en la que quiera guardar el archivo y haga clic en **Save**.

► **Para eliminar estudios:**


Muestre el estudio que quiere eliminar y haga clic en la casilla de verificación que hay junto al estudio:

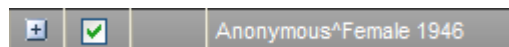


Delete









A continuación, haga clic en **Delete**.

► **Para revisar información para un estudio:**


Haga clic en  para expandir el estudio y revisar las imágenes y los detalles de los trabajos de procesamiento:

	<input type="checkbox"/>	87800006	87800006	PROCESSED	SUCCESS
---	--------------------------	----------	----------	-----------	---------

Images:4

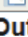	Image ID	View	View Modifier	Case Processing	State
	92	RCC		✓	PROCESSED 
	93	LCC		✓	PROCESSED 
	94	LMLO		✓	PROCESSED 
	95	RMLO		✓	PROCESSED 

Output Jobs:1

Job ID	Format	Destination	Status
40	5.X SR - CAD	DVT_STORE2	Complete 

Haga clic en  para ver detalles adicionales de cada imagen.

Case ID: 26, View: LCC

Case		Image	
Case ID	26	Image ID	90
Patient Name	10100191	View	LCC
Patient ID	10100191	View Modifier	
Study Date	20060508	State	PROCESSED
Algorithm	MAMMO	Start Time	1/31/2009 12:45:47 AM
Case Result	SUCCESS	End Time	1/31/2009 12:46:11 AM

AlgoName	Result
Masses	SUCCESS
Calcifications	SUCCESS
Volumetric Assessment	SUCCESS

ImageDetails.aspx?id=90

Índice

A

advertencias
 Cenova, 3–4
apagado del servidor, 17–18
atención al cliente, recursos, 2

B

BACS, 12

C

Case Manager, 20–22
ciberseguridad, 4
C-View, 1, 5, 6

D

DICOM, 1
 clases de imágenes, 8, 12
DICOM 6000 Interface, 7
 en flujo de datos de sistema, 10
DigitalNow HD, 7
 flujo de trabajo clínico, 15

E

entradas en Cenova, 5–6
estaciones de trabajo de adquisición,
 10
estaciones de trabajo de revisión, 16
 en flujo de datos del sistema, 8–14
examen, vistas, 7

F

FFDM, sistemas
 en el flujo de datos del sistema, 12
 en flujo de datos del sistema, 10
flujos de datos, 8–14
formación, 2

G

GE Healthcare, 5

H

Hologic
 sistemas de escaneo de películas,
 5
 sistemas Selenia, 5
 sistemas Selenia Dimensions, 5
Hologic Imaging Biomarkers, 7, 15

I

ImageChecker 3D Calc CAD, 7
 flujo de trabajo clínico, 15
ImageChecker CAD, 7
 con DICOM 6000, 10
 flujo de trabajo clínico, 15
impresión, 8
impresora, 7
inicio del servidor, 18

M

Mammography CAD SC, 7, 8
Mammography CAD SR, 7, 8, 11
Mamografía en 3D, 6, 11, 12

P

PACS, 5, 7, 13, 14
 en flujo de datos del sistema, 8–14
precauciones
 Cenova, 3–4
productos antivirus, 4
puertos, entrada, 6

Q

Quantra, 12

R

recursos, 2
reinicio del servidor, 18
resultados
 visualización, 15
resultados Cenova
 archivo, 5
 formatos, 7
 impresión, 7

S

SecurView, estación de trabajo de
 revisión diagnóstica, 7, 9, 11, 13, 14
servidor Cenova
 apagado, 17–18
 configuración, 16
 directrices de uso, 15
 en flujo de datos del sistema, 8–14
 envío de resultados a DICOM 6000
 Interface, 10
 funcionamiento del sistema, 15–22

- inicio, 18
- reinicio, 18
- Siemens AG, 5
- sistemas FFDM
 - modelos compatibles, 5

T

- técnica, asistencia, ii

U

- Unique Device Identifier, 15, 19

HOLOGIC®



Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
Telephone: +1.781.999.7300
Sales: +1.781.999.7453



Hologic Ltd.
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road
Wythenshawe, Manchester
M23 9HZ, UK
Tel: +44 (0)161 946 2206

Asia Pacific:

Hologic Inc.
7th Floor, Biotech Centre 2
No. 11 Science Park West Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin, New Territories, Hong Kong

Australia:

Hologic (Australia) Pty Ltd
Suite 402, Level 4, 2 Lyon Park Road, Macquarie Park NSW 2113
Telephone: +61 2 9888 8000

