

ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO DETEKCJI

(bioMerieux ref. 39300 / Hologic Cat. No. 201791)

ZASTOSOWANIE

Dwa odczynniki zawarte w zestawie ODCZYNNIKI DO DETEKCJI są przeznaczone do odczytywania wyników testów Hologic zgodnie z instrukcjami załączonymi do opakowania oraz podręczną instrukcją obsługi aparatu.

DOSTARCZONE ODCZYNNIKI I MATERIAŁY

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące zagrożeń oraz oświadczenia o środkach ostrożności w postępowaniu z odczynnikami, należy skorzystać z Safety Data Sheet Library [Biblioteki Kart Charakterystyki Bezpieczeństwa Substancji] pod adresem www.hologic.com/sds.

ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO DETEKCJI (1 200 Testów)
(bioMerieux ref. 39300 / Hologic Kat. No. 201791)

Odczynnik do detekcji I (RI)
0.1% Woda utleniona w 0.001 N Kwasie azotowym 1 x 240 mL

Odczynnik do detekcji II (RII)
1 N Wodorotlenek sodu 1 x 240 mL

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Do stosowania w diagnostyce *in vitro*.

Unikać kontaktu Odczynników do Detekcji I i II ze skórą, oczami, i błonami śluzowymi. Jeżeli doszło do kontaktu skóry lub oczu z odczynnikami należy miejsce kontaktu przemyć obficie wodą. Jeżeli odczynniki rozlały się, należy rozcieńczyć je wodą przed osuszeniem powierzchni.

PRZECHOWYWANIE ODCZYNNIKÓW I WYMAGANIA HANDLOWE

Zestaw Odczynników do Detekcji należy przechowywać w temp. od 2° do 25°C, tak przechowywane odczynniki zachowują stabilność zgodnie z datą ważności oznaczoną na opakowaniu. Jeżeli odczynniki zamarzną podczas transportu lub przechowywania, mogą się wytrącić. Podgrzanie odczynników do temp. od 37° to 60°C ułatwi rozpuszczenie precypitatu. Jeżeli konieczne jest podgrzanie, przed użyciem należy ochłodzić odczynniki do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.

PROCEDURA

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi luminometru.

- A. Wylać stare odczynniki do odczytu i usunąć tekst z ekranu używając funkcji PŁUKANIE.
- B. Odwrócić butelki z nowymi Odczynnikami do Detekcji w celu dokładnego wymieszania.
- C. Zainstalować odczynniki w aparacie zgodnie z instrukcją obsługi. Dla aparatów, wymagających użycia Odczynników do Detekcji w dwóch pojemnikach, należy zastosować postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi w celu właściwego użycia pojemników.

UWAGI PRAKTYCZNE

- A. Upewnić się przed użyciem aparatu, że wszystkie ustawienia są prawidłowe łącznie z odczynnikami do odczytu.
- B. Sprawdzić wartość tła nowo przeniesionych odczynników, kiedy działanie aparatu wymaga użycia powtórnego pojemników z Odczynnikami do Detekcji. Średnia wartość tła powinna wynosić poniżej specyfikacji umieszczonej w instrukcji obsługi aparatu.
- C. Sprawdzić czy program aplikacyjny w aparacie odnosi się do nowych wartości Odczynników do Odczytu.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Opisywany produkt może być objęty co najmniej jednym patentem USA, przedstawionym na stronie www.hologic.com/patents.

IN0119CE-PL Rev. 003 2018-03
© 2016-2018 Hologic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.