

Faxitron™ Path

Specimen Radiography System

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. ENCENDIDO

- Compruebe que el interruptor de alimentación de la parte posterior del armario Faxitron Path se encuentra en la posición **«on»** (encendido).
- Gire la **llave** de la parte frontal del armario Faxitron Path a la posición de **on** (encendido).
- Encienda el ordenador y el monitor.

2. INICIO DEL SOFTWARE

- Compruebe que no haya nada en el compartimento de rayos X del Faxitron Path.
- Haga doble clic en el icono de **Faxitron Path** en el centro del escritorio

3. CALIBRACIÓN

- Se le pedirá que realice la calibración cuando haya iniciado sesión. Pulse el botón **«Calibrate»** (Calibrar) para continuar.

4. DATOS DEL PACIENTE

- Inicie el procedimiento.
- Seleccione la lista de trabajo.
- Localice el nombre del paciente y haga doble clic en él.
- Introduzca los campos obligatorios que faltan, como Lateralidad.
- Acéptelo.

5. OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X

- Coloque la(s) muestra(s) en el compartimento de rayos X de Faxitron Path. Utilice la bandeja de aumento si lo desea.
- Presione el botón verde **x-ray** (rayos X) para activar los rayos X. La imagen aparecerá tras unos segundos.

6. MANIPULACIÓN DE IMÁGENES

- Mantenga pulsado el **botón izquierdo del ratón** y arrastre el ratón para cambiar el brillo y el contraste de la función de ventana/nivel.
- **Ajuste el zoom** para ampliar la imagen para su visualización.

7. ALMACENAMIENTO EN PACS

- Seleccione el botón **PACS Store** (Almacenar en PACS) en el lado izquierdo de la pantalla.

8. IMPRESIÓN

- Seleccione el botón **PACS Print** (Impresión en PACS) en el lado izquierdo de la pantalla.

9. APAGADO

- Seleccione el botón **System Shutdown** (Apagado del sistema) en el lado izquierdo y luego haga clic en OK (Aceptar).
- Gire la llave en el armario Faxitron Path a la posición **off** (Apagado).

www.faxitron.com/support | servicedept-faxitron@hologic.com | +1 520.399.8139

Sistema Faxitron Path, también conocido como sistema PathVision™

5081-4001-300 Rev. 021 (8/2019) Hologic Inc. ©2019 Todos los derechos reservados. Hologic, CoreVision, Faxitron y The Science of Sure son marcas comerciales y/o marcas registradas de Hologic, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información está dirigida a profesionales de la medicina en Estados Unidos y otros mercados y no debe interpretarse como una solicitud o promoción de productos si estas actividades están prohibidas. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, transmisiones electrónicas y ferias, no siempre es posible controlar dónde aparecen estos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante local de Hologic.