

# Faxitron<sup>™</sup> Core

Sistema de Radiografia de Espécime

## GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

### 1. INICIALIZAÇÃO

- Certifique-se de que o interruptor de energia na parte posterior do gabinete do Faxitron Core esteja ajustado para a posição **“on”** [ligado]
- Gire a chave na frente do gabinete do Faxitron Core para **on**
- Ligue o computador e o monitor

### 2. INICIAR SOFTWARE

- Verifique se não há nada na gaveta de amostras do Faxitron Core
- Clique duas vezes no ícone **Vision** no centro da área de trabalho

### 3. CALIBRAR

- Será solicitado que você calibre assim que se conectar. Pressione o botão **“Calibrate”** [Calibrar] para proceder

### 4. DADOS DO PACIENTE

- Inicie o procedimento
- Selecione a partir da Lista de Trabalho
- Localize o nome do paciente e clique duas vezes nele
- Insira quaisquer campos faltantes exigidos, tais como Lateralidade
- Aceite

### 5. CAPTURA DE IMAGENS POR RAIOS-X

- Posicione o(s) espécime(s) na bandeja de espécimes do Faxitron Core
- Posicione a bandeja de espécimes na gaveta
- Feche a gaveta do Faxitron Core
- Pressione o botão verde de **Raio-X** para ativar os raios x - a imagem aparecerá após alguns segundos

### 6. MANIPULAÇÃO DE IMAGENS

- Segure o **botão esquerdo do mouse** e arraste o mouse para mudar o brilho e contraste para a função de nível/ janela
- **Ajuste o zoom** para ampliar a imagem para visualização

### 7. ARMAZENAMENTO PARA PACS

- Escolha o botão **PACS Store** [Armazenamento de PACS] no lado esquerdo da tela

### 8. IMPRESSÃO

- Escolha o botão **PACS Print** [Impressão de PACS] no lado esquerdo da tela

### 9. DESLIGAMENTO

- Selecione o botão **System Shutdown** [Desligamento do Sistema] no lado esquerdo e então clique **OK**
- Gire a **chave** no gabinete do Faxitron Core para **off** [deligado]

[www.faxitron.com/support](http://www.faxitron.com/support) | [servicedept-faxitron@hologic.com](mailto:servicedept-faxitron@hologic.com) | +1520.399.8139