

Faxitron[™] Path+

Sistema de Radiografia de Espécimes

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

1. LIGAR

- Certifique-se de que o interruptor na parte traseira do gabinete Faxitron Path+ esteja ajustado na posição “**on**” [ligado]
- Gire a **chave** na parte dianteira do gabinete do Faxitron Path+ para **on**
- **Ligue** o monitor (*se necessário*)

2. INICIAR SOFTWARE

- Verifique se não há nada na câmara de raio-x do Faxitron Path+
- Dê um clique duplo no ícone **Vision** [Visão] na parte central da área de trabalho e insira a senha

3. CALIBRAR

- Você será solicitado a calibrar assim que fizer o login. Pressione o botão “**Calibrate**” [Calibrar] para prosseguir

4. DADOS DO PACIENTE

- Inicie o Procedimento
- Selecione a partir da Lista de Trabalho
- Localize o nome do paciente e dê um duplo clique nele
- Preencha qualquer campo necessário faltante, como **Laterality** [Lateralidade]
- Aceite

5. GERAÇÃO DE IMAGENS EM RAIOS-X

- Coloque o(s) espécime(s) na câmara de raios x do Faxitron Path+ - utilize a bandeja de ampliação, se desejado
- Pressione o botão **x-ray** [raio-x] verde para ativar os raios x - a imagem aparecerá após alguns segundos

6. MANIPULAÇÃO DAS IMAGENS

- Mantenha pressionado o **botão esquerdo do mouse** e arraste o mouse para alterar o brilho e o contraste para a função da janela/nível
- **Ajuste o zoom** para ampliar a imagem para visualização

7. ARMAZENAMENTO PARA O PACS

- Selecione o botão **PACS Store** [Armazenamento de PACS] no lado esquerdo da tela

8. IMPRESSÃO

- Selecione o botão **PACS Print** [Impressão de PACS] no lado esquerdo da tela

9. DESLIGAR

- Selecione o botão **System Shutdown** [Desligamento do Sistema] no lado esquerdo e em seguida clique em OK
- Gire a **chave** no gabinete do Faxitron Path+ para **off** [desligado]