

1.1 Instrucciones de uso del cojín mamario MammoPad

Los cojines mamarios MammoPad® son productos médicos desechables de un solo uso. Son radiolúcidos y no contienen látex. Utilice una almohadilla nueva para cada paciente. Siga este procedimiento para asegurarse de que la almohadilla está bien instalada.

1. Abra la bolsa que contiene los cojines mamarios MammoPad, retire una almohadilla y vuelva a cerrar la bolsa.



Nota

Las almohadillas deben guardarse en una bolsa de plástico sellada para evitar la contaminación que podría afectar a la calidad de la imagen. Almacenar fuera de la luz solar directa y cerrar la bolsa cuando no se utilice.

2. Despegue el papel de la almohadilla y deséchelo.
3. Aplique la cara adhesiva a la plataforma de imágenes de acuerdo con las instrucciones de la siguiente nota para su tipo de sistema. No coloque la almohadilla sobre calcomanías pintadas.



Nota

Sistemas Selenia® y la mayoría de los demás sistemas FFDM - Oriente la esquina redondeada hacia la parte inferior izquierda del detector. Extienda la almohadilla desde la parte trasera hasta la delantera de la plataforma de la imágenes.

Sistemas Dimensions® y GE - Oriente la esquina redondeada hacia la parte inferior derecha del detector. Extienda la almohadilla desde la parte delantera hasta la trasera de la plataforma de la imágenes.

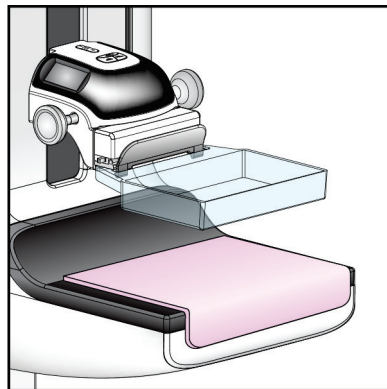


Figura 1: MammoPad instalado en una plataforma de imágenes

4. Siga su rutina de posicionamiento normal para todas las vistas de examen.
5. Una vez finalizado el examen, retire la almohadilla de la plataforma de imágenes y deséchela.



Nota

Si la almohadilla estuvo expuesta a sangre o fluidos corporales, siga el procedimiento de eliminación de materiales de riesgo biológico de su establecimiento.

Si necesita ayuda con el producto MammoPad, póngase en contacto con el servicio de Soporte del producto al 1-877-371-4372.

Representante en la UE autorizado:






Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87



1.2 Símbolos

Símbolo	Descripción	Estándar
	Solo con receta médica	FDA 21 CFR 801.109
	Fabricante	ISO 15223-1:2021, referencia 5.1.1
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	ISO 15223-1:2021, referencia 5.1.2
	Fecha de caducidad	ISO 15223-1:2021, referencia 5.1.4
	Código de lote	ISO 15223-1:2021, referencia 5.1.5
	Número de catálogo	ISO 15223-1:2021, referencia 5.1.6
	Cantidad	Hologic
	No estéril	ISO 15223-1:2021, referencia 5.2.7
	No reutilizar	ISO 15223-1:2021, referencia 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Consulte las instrucciones de uso	ISO 15223-1:2021, referencia 5.4.3

Símbolo	Descripción	Estándar
	Marca CE Conformidad europea	Reglamento MDR (UE) 2017/745
	No contiene látex de goma natural	N/A
	Símbolo de reciclado	Unicode, referencia U+267C
	Dispositivo médico	ISO 15223-1:2021, referencia 5.7.7

© 2023 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. Hologic y Mammopad son marcas comerciales y/o marcas registradas de Hologic, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Este producto está protegido por una o más patentes o solicitudes de patentes de los EE. UU. Consulte www.hologic.com/patent-information para obtener más información.