

# Faxitron® Core

Sistema de radiografia de espécimes



## GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

### 1. ATIVAÇÃO

- Certifique-se de que o interruptor de energia na parte posterior do gabinete do Faxitron Core esteja na posição **ON** (ligado)
- Gire a **chave** na frente do gabinete do Faxitron Core para **on** (ligado)
- **Ligue** o computador e o monitor

### 2. INICIAR SOFTWARE

- Verifique se não há nada na gaveta de amostras do Faxitron Core
- Clique duas vezes no ícone do **Vision** no centro da área de trabalho

### 3. CALIBRAR

- Você será solicitado a calibrar depois de fazer o login  
Pressione o botão **"Calibrate"** (Calibrar) para prosseguir

### 4. DADOS DO PACIENTE

- Clique em **"Start Procedure"** (Iniciar procedimento)
- Clique em **"Select from Worklist"** (Selecionar na lista de trabalho)
- Localize o nome do paciente e clique duas vezes nele
- Preencha os campos obrigatórios em falta, tais como Laterality (Lateralidade)
- Clique em **"Accept"** (Aceitar)

### 5. GERAÇÃO DE IMAGENS EM RAIOS X

- Coloque o(s) espécime(s) na bandeja de espécimes do Faxitron Core
- Coloque a bandeja de espécimes na gaveta
- Feche a gaveta do Faxitron Core
- Pressione o botão verde **"X-ray"** (Raios X) para ativar os raios X; a imagem aparecerá após alguns segundos

### 6. MANIPULAÇÃO DE IMAGENS

- Segure o **botão esquerdo do mouse** e arraste o mouse para mudar o brilho e o contraste para a função de janela/nível
- **Ajuste o zoom** para ampliar a imagem para visualização

### 7. ARMAZENAMENTO EM PACS

- Clique no botão **"PACS Store"** (Armazenamento em PACS) no lado esquerdo da tela

### 8. IMPRESSÃO

- Clique no botão **"PACS Print"** (Impressão em PACS) no lado esquerdo da tela

### 9. DESLIGAMENTO

- Clique no botão **"System Shutdown"** (Desligamento do sistema) no lado esquerdo e depois clique em **"OK"**
- Gire a chave no gabinete do Faxitron Core para **off** (desligado)



[www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
600 Technology Drive  
Newark, DE 1970 EUA  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)



**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Bélgica  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

**PATROCINADOR NA AU**  
**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



Sistema Faxitron Core, conhecida também como Sistema CoreVision.

MAN-10102-2300 Rev. 001 (6/23) Hologic Inc. ©2023 Todos os direitos reservados. Hologic, CoreVision, Faxitron e The Science of Sure são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Hologic, Inc. e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. Estas informações são destinadas a profissionais médicos nos EUA e outros mercados e não se destina a solicitação ou promoção de produtos onde tais atividades são proibidas. Como os materiais da Hologic são distribuídos através de sites, eBroadcasts e feiras, nem sempre é possível controlar onde esses materiais aparecem. Para obter informações específicas sobre os produtos disponíveis para venda em um determinado país, entre em contato com o representante local da Hologic ou escreva para [womenshealth@hologic.com](mailto:womenshealth@hologic.com).