

1.1 MammoPad emlővédő párna – alkalmazási utasítások

A MammoPad® emlővédő párnák egyszer használatos, eldobható orvosi termékek. Sugáráteresztők és latexmentesek. Minden betegnél használjon új párnát. A párna megfelelő rögzítéséhez kövesse az alábbi eljárást.

1. Nyissa fel a MammoPad emlővédő párnákat tartalmazó tasakot, vegyen ki egy párnát, és zárja vissza a tasakot.



Megjegyzés

A párnákat lezárt műanyag tasakban tárolja, hogy elkerülje szennyeződést, amely ronthatja a képminőséget.


2. Húzza le a papír hátlapot a párnáról, és dobja ki.
3. Helyezze fel az öntapadós oldalát a képkötő rendszerre a következő bekezdésben ismertetett, a rendszer típusától függő utasítások szerint. Ne helyezze a párnát festett matricára.



Megjegyzés

Selenia® és a legtöbb egyéb FFDM rendszer: Helyezze fel a párnát az érzékelőre úgy, hogy a lekerekített sarka a bal alsó része felé tekintsen. Simítsa a párnát a képkötő rendszer felületére hátulról előre haladva.

Dimensions® és egyéb GE rendszerek: Helyezze fel a párnát az érzékelőre úgy, hogy a lekerekített sarka a jobb alsó része felé tekintsen. Simítsa a párnát a képkötő rendszer felületére előlről hátrafelé haladva.

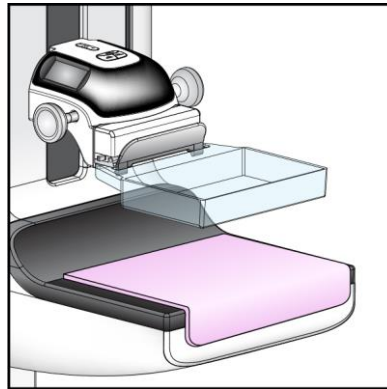

1. ábra: A képkötő rendszerre felhelyezett MammoPad

4. Minden szűrési nézetnél kövesse a szokásos eljárásokat.
5. A vizsgálat befejezése után távolítsa el a párnát a képkötő rendszerről, és dobja el.



Megjegyzés

Ha a párna vérrel vagy testnedvekkel érintkezett, kövesse az intézmény veszélyes biológiai anyagok ártalmatlanítására vonatkozó eljárását.

A MammoPad termékkel kapcsolatos segítségért forduljon terméktámogatási munkatársainkhoz az 1-877-371-4372 telefonszámon.

Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

