

## Aptima® Whole Blood Diluent Tubes

Instrucțiuni de utilizare  
Pentru diagnosticare *in vitro*

### Utilizare prevăzută

Aptima® Whole Blood Diluent (WBD) Tube (Tub cu diluant pentru sânge integral Aptima) este destinat a fi utilizat pentru procesarea eșantioanelor de sânge integral.

### Principiile procedurii

Aptima WBD este utilizat pentru a procesa probe de sânge integral în tuburile WBD preumplute. Consultați prospectul corespunzător al testului pentru instrucțiuni privind manipularea și pregătirea eșantioanelor de sânge integral.

### Materiale furnizate

Tuburi Aptima WBD (nr. cat. PRD-06783)

| Componentă | Descriere                       | Cantitate   |
|------------|---------------------------------|-------------|
| Tuburi WBD | 1 tub conținând 1,425 ml de WBD | 100 fiecare |

### Materiale necesare, dar disponibile separat

Pipetor calibrat și vârfuri cu dopuri hidrofobe pentru transferul eșantionului din recipientul inițial de recoltare în tubul WBD.

### Avertismente și precauții

- A. Pentru diagnosticarea *in vitro*.
- B. Pentru uz profesional.
- C. Consultați prospectul corespunzător al testului pentru avertismente și precauții suplimentare.
- D. Utilizați doar instrumentarul și consumabilele de laborator de unică folosință prevăzute sau specificate.
- E. Respectați precauțiile de laborator obișnuite. Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în zonele de lucru desemnate. Purtați mănuși de unică folosință nepudrate, ochelari de protecție și halate de laborator atunci când manipulați eșantioanele și reactivii. Spălați-vă bine mâinile după manipularea eșantioanelor sau a reactivilor.
- F. Evitați contaminarea încrucișată pe parcursul etapelor de manipulare a eșantioanelor. Eșantioanele pot conține niveluri de ridicate de analiți. Asigurați-vă că recipientele cu eșantioane nu se ating între ele și eliminați materialele utilizate fără a le trece pe deasupra recipientelor deschise. În cazul în care mănușile intră în contact cu eșantioanele, schimbați mănușile, în vederea evitării contaminării încrucișate.
- G. Nu utilizați acest diluant după data expirării.

**Notă:** Informațiile de comunicare a pericolelor pentru etichetarea produselor vândute la nivel global reflectă clasificările fișelor cu date de securitate SUA și UE (FDS). Pentru informații privind comunicarea pericolelor specifice regiunii dvs., consultați FDS specifică regiunii în Biblioteca de fișe cu date de securitate la adresa [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

## Cerințe privind depozitarea și manipularea

După primire, depozitați tuburile Aptima WBD înainte de utilizare la temperatura camerei (între 15 °C și 30 °C).

## Performanța eșantionului

Caracteristicile de performanță a eșantionului pentru testare sunt menționate în prospectul corespunzător al testului. Prospecele testelor sunt disponibile online la adresa [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

**Date de contact și istoricul versiunilor**

Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 SUA



**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Adresa sponsorului australian:

Hologic (Australia și Noua Zeelandă) Pty Ltd  
Macquarie Park NSW 2113

Pentru adresa de e-mail și numărul de telefon ale Serviciului de asistență tehnică și de asistență pentru clienți specifice fiecărei țări, accesați [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Acest produs este destinat exclusiv utilizării în diagnosticarea *in vitro* la pacienți umani.

În caz de incident grav, notificați producătorul și autoritatea competentă din regiunea dvs.

Hologic, Aptima și siglele asociate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Hologic, Inc. și/sau ale sucursalelor sale în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Toate celelalte mărci comerciale care apar în acest prospect aparțin proprietarilor respectivi.

Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. identificate la adresa [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2020–2025 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.

AW-26508-3101 Rev. 001  
2025-01

| Istoric revizuiți     | Data          | Descriere                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AW-26508-001 Rev. 002 | Ianuarie 2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>Această versiune se aliniază cu AW-26508-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26508-001 Rev. 002.)</li></ul> |