

# Faxitron<sup>®</sup> Core

Modello sistema radiografico

## Manuale d'uso

Hologic<sup>®</sup>

MAN-09874-702

Revision: 001

Aprile 2023

Faxitron Core era precedentemente conosciuto come CoreVision

**HOLOGIC<sup>®</sup>**

© 2023 Hologic, Inc.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di quest'opera può essere riprodotta in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, grafico, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazioni o altri sistemi di archiviazione e recupero di informazioni, previa autorizzazione scritta dell'editore.

I prodotti a cui si fa riferimento in questo documento possono essere marchi commerciali e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. L'editore e l'autore non rivendicano alcun diritto su questi marchi commerciali.

Leggere attentamente tutte le informazioni contenute nella presente sezione prima di usare il sistema. Seguire tutte le avvertenze e precauzioni esposte in questo manuale. Tenere sempre questo manuale a portata di mano mentre si eseguono le procedure. Attenersi sempre a tutte le istruzioni riportate nel presente manuale. Hologic, Inc. declina ogni responsabilità per lesioni o danni dovuti a un errato utilizzo del sistema. Hologic, Inc. può organizzare dei corsi di formazione presso la struttura del cliente.

Stampato: Aprile 2023

Sommario.....	0 - 3
Premessa.....	0 - 5
Indicazioni per l'uso .....	0 - 5
<b>SEZIONE 1: Manuale d'uso – Faxitron Core .....</b>	<b>1 - 1</b>
1.0.0 Introduzione .....	1 - 2
1.1.0 Simboli di avvertenza e precauzione nel manuale .....	1 - 2
1.1.1 Simboli di avvertenza e precauzione sull'etichetta .....	1 - 3
<b>SEZIONE 2: Protezione dalle radiazioni e raggi X.....</b>	<b>2 - 1</b>
2.0.0 Introduzione .....	2 - 2
2.1.0 Raggi X .....	2 - 2
2.2.0 Fonti di radiazione.....	2 - 2
2.3.0 Effetti biologici delle radiazioni .....	2 - 3
2.3.1 Effetti deterministici e stocastici.....	2 - 4
2.3.2 Radiosensibilità .....	2 - 5
2.3.3 Rischi da esposizione alle radiazioni .....	2 - 5
2.3.4 Conclusioni sui rischi per la salute .....	2 - 6
2.4.0 Limiti di dose ICRP .....	2 - 6
2.5.0 Gestione del rischio .....	2 - 7
2.6.0 Bibliografia .....	2 - 8
<b>SEZIONE 3: Informazioni sul Sistema Faxitron Core.....</b>	<b>3 - 1</b>
3.0.0 Panoramica.....	3 - 2
3.0.1 Versione DICOM .....	3 - 2
3.0.2 Assistenza e risoluzione dei problemi .....	3 - 3
3.0.3 Piano di manutenzione .....	3 - 3
3.1.0 Specifiche .....	3 - 4
3.2.0 Requisiti di conformità e misure di sicurezza .....	3 - 5
3.3.0 Sistema di controllo raggi X .....	3 - 5
3.4.0 Schermatura e attenuazione .....	3 - 6
3.5.0 Alara .....	3 - 6
<b>SEZIONE 4: Installazione e configurazione di Faxitron Core.....</b>	<b>4 - 1</b>
4.0.0 Avvertenze e precauzioni del sistema.....	4 - 2
4.1.0 Configurazione sistema per campioni Faxitron Core .....	4 - 5
4.2.0 Spostamento del sistema per campioni Faxitron Core.....	4 - 6
<b>SEZIONE 5: Avvio rapido e funzionamento di base del Sistema Faxitron Core .....</b>	<b>5 - 1</b>
5.0.0 Panoramica avvio rapido.....	5 - 2
5.1.0 Sequenza di accensione .....	5 - 3
5.1.1 Avvio del sistema .....	5 - 3
5.1.2 Calibrazione .....	5 - 4
5.2.0 Acquisizione delle immagini .....	5 - 4
5.2.1 Inserimento manuale dei dati del paziente .....	5 - 5
5.2.2 Avvio dell'esposizione .....	5 - 6
5.2.3 Spegnimento del sistema .....	5 - 6

<b>SEZIONE 6:</b>	<b>Software Vision Funzionamento.....</b>	<b>6 - 1</b>
6.0.0	Panoramica del software Vision Faxitron.....	6 - 2
6.1.0	Avvio del software.....	6 - 2
6.2.0	Panoramica calibrazione camera.....	6 - 3
6.2.1	Calibrazione avanzata.....	6 - 5
6.3.0	Dati del paziente.....	6 - 5
6.3.1	Seleziona da elenco di lavoro.....	6 - 6
6.3.2	Continua con il paziente corrente.....	6 - 7
6.3.3	Inserimento manuale.....	6 - 7
6.3.4	Seleziona da database.....	6 - 8
6.3.5	Icona dati paziente.....	6 - 9
6.4.0	Barra degli strumenti e menu.....	6 - 11
6.4.1	Barra degli strumenti laterale.....	6 - 11
6.4.2	Barra del menu superiore.....	6 - 16
6.4.3	Menu View (Visualizza).....	6 - 16
6.4.4	Menu Tools (Strumenti).....	6 - 19
6.4.5	Strumenti immagini.....	6 - 22
6.5.0	Browser immagini paziente corrente.....	6 - 27
6.6.0	Database.....	6 - 28
6.6.1	Opzioni aggiuntive database.....	6 - 29
6.7.0	Funzionalità DICOM.....	6 - 33
6.8.0	Annotazioni utente.....	6 - 40
6.9.0	Guida.....	6 - 43
6.10.0	Informazioni sul software Vision Faxitron.....	6 - 43

# Faxitron® Core

Modello sistema radiografico

---

## **Premessa**

Il presente manuale è stato creato da Hologic®, Inc. Ha lo scopo di guidare l'utente avanzato nella configurazione, nell'installazione e nell'utilizzo dell'hardware Faxitron Core e del sistema software Vision, entrambi sviluppati da Hologic, Inc.

Prima di avviare il software Vision, l'utente deve configurare l'hardware. Si prega di consultare le procedure di configurazione previste nella Sezione 4 di questo manuale prima di continuare.

## **Indicazioni per l'uso**

**Faxitron Core Digital Specimen Radiography (DSR)** è un sistema di imaging con armadio radiologico digitale progettato per generare e controllare i raggi X per l'esame di campioni prelevati da varie regioni anatomiche e permette, inoltre, di verificare rapidamente l'appropriatezza del tessuto escisso durante biopsie percutanee. L'esecuzione della verifica direttamente nella stessa sala operatoria della biopsia consente uno svolgimento delle procedure più rapido, limitando così il tempo necessario al paziente per completare l'esame. La radiografia del campione può potenzialmente limitare il numero di richiami del paziente. Questo dispositivo può essere utilizzato ovunque il personale medico lo ritenga opportuno, comprese la sala operatoria o una sala adiacente.



[www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)

# 1

## SEZIONE 1

# Introduzione e simboli

Il presente manuale è stato creato da Hologic, Inc. Ha lo scopo di guidare l'utente nella configurazione, nell'installazione e nell'utilizzo dell'hardware Faxitron Core e del software Vision, entrambi sviluppati da Hologic, Inc.

Prima di avviare il software Vision, l'utente deve configurare l'hardware. Si prega di consultare le procedure di configurazione e di sicurezza previste in questo manuale, come minimo, prima di tentare di far funzionare il sistema.

Grazie da parte di tutti noi di Hologic, Inc.

## Produttore e informazioni di contatto



**Hologic, Inc.**  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)

## SPONSOR AUSTRALIANO

**Hologic (Australia e Nuova Zelanda) Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgio  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87



Nel presente manuale e nel sistema di guida in linea sono utilizzati i seguenti simboli:

Avverte il lettore di potenziale elettrocuzione nel caso in cui ignorasse l'avviso e utilizzasse deliberatamente strumenti specifici per aprire un armadio elettrico sigillato e gestirne il contenuto. ⚠ Nota: non vi sono strumenti forniti da Hologic, Inc.



Avverte il lettore di una condizione di pericolo. Questo simbolo è generalmente accompagnato da un simbolo più specifico e da istruzioni appropriate circa la natura del pericolo, l'esito atteso e le informazioni per evitarlo.



Avverte il lettore di prestare la massima attenzione nel sollevamento di mezzi pesanti per evitare lesioni personali e danni all'attrezzatura.



Avverte il lettore che le radiazioni ionizzate vengono emesse nell'area etichettata quando il fascio di raggi X è eccitato. Faxitron Core è dotato di interblocchi di sicurezza per impedire l'accesso all'area etichettata mentre il fascio di raggi X è eccitato.



Avverte il lettore di utilizzare protezioni appropriate (come guanti chirurgici o un contenitore di campioni approvato) per evitare l'esposizione a materiali potenzialmente infettivi come i campioni di tessuto del paziente.













## 1.0.0 Introduzione













## 1.1.0 Simboli di avvertenza e precauzione nel manuale






## 1.1.1

### Simboli di avvertenza e precauzione sull'etichetta

Simbolo	Descrizione	Standard
	Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai rifiuti normali. Inviare il materiale da smaltire a Hologic o contattare il rappresentante di zona responsabile dell'assistenza.	Direttiva RAEE 2012/19/UE
	Produttore	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.1
	Data di costruzione	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.3
	Radiazione ionizzata emessa quando il fascio di raggi X viene alimentato	ISO 7010, Riferimento W003
	Avvertenza che impone di utilizzare una protezione adeguata	ISO 7010, Riferimento W009
	Avvertenza: elettricità	IEC 60417, Riferimento 6042
	Avvertenza	ISO 7010, Riferimento W001
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Consultare le Istruzioni per l'uso	ISO 15223-1, Riferimento 5.4.3
	Seguire le istruzioni per l'uso	IEC 60601-1, N. di riferimento Tabella D.2, Simbolo di sicurezza 10 (ISO 7010-M002)
	Questo sistema trasmette energia a radiofrequenza (RF) (radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti)	IEC 60417, Riferimento 5140

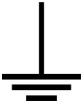

Simbolo	Descrizione	Standard
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.2
	Dispositivo medico	ISO 15223-1, Riferimento 5.7.7
	Numero di catalogo	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.6
	Numero di serie	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.7
	Paese di produzione	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.11
<b>Translations in Box</b>	Traduzioni incluse nella confezione	Hologic
	Attenzione	ISO 15223-1, Riferimento 5.4.4
	Limite di umidità	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.8
	Certificazioni ETL	Standards Council of Canada (SCC) e U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
<b>Rx ONLY</b>	Solo dietro prescrizione medica	FDA 21 CFR 801.109
	Corrente alternata	IEC 60417, Riferimento 5032
	Marchio CE Conformità europea	Normative MDR (UE) 2017/745
	Universal Serial Bus (USB), porta	ISO 7000-3650
	Attenzione – Radiazioni (Emissione di Raggi X)	Hologic

Simbolo	Descrizione	Standard
	Fusibile	IEC 60417, Riferimento 5016
	Avvertenza; raggio laser	ISO 7010, Riferimento W004
	Messa a terra	IEC 60417-5017
	Prestare attenzione nel sollevare carichi pesanti	Hologic
	Nota	Hologic

# 2

## SEZIONE 2

# Protezione dalle radiazioni e raggi X

La radiazione è energia sotto forma di onde o particelle. Una radiazione ad alta frequenza e ad alta energia, che ha energia sufficiente per spostare un elettrone dalla sua orbita attorno a un nucleo, viene definita **radiazione ionizzante**. I raggi X, i raggi gamma, le particelle beta, le particelle alfa e i neutroni sono tutte forme di radiazione ionizzante e possono essere emesse da materiale radioattivo, stelle e apparecchiature ad alta tensione.

Le radiazioni ionizzanti non possono essere percepite con i cinque sensi, per cui sono necessarie apparecchiature di monitoraggio per poterle rilevare.

### Raggi X

I raggi X sono radiazioni ad alta frequenza e ad alta energia con energia sufficiente per spostare un elettrone dalla sua orbita intorno a un nucleo, le cosiddette radiazioni "ionizzanti". I raggi X sono in grado di percorrere lunghe distanze attraverso l'aria e molti altri materiali. La quantità di energia trasportata dalla radiazione è direttamente proporzionale alla frequenza e inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. I raggi X hanno una lunghezza d'onda relativamente corta e ad alta frequenza, quindi possiedono una grande quantità di energia

E sono in grado di produrre dei cambiamenti biologici nel tessuto, utili quando utilizzati in radioterapia. Tuttavia, i raggi X possono anche essere nocivi per gli organismi biologici a causa della loro capacità di danneggiare i cromosomi.

Le sorgenti di radiazioni a raggi X nelle strutture sanitarie includono:

Apparecchiature a raggi X. Le apparecchiature a raggi X sono utilizzate per scopi terapeutici (radioterapia) e diagnostici. Le apparecchiature diagnostiche a raggi X sono utilizzate per effettuare radiografie diagnostiche su varie parti del corpo, ad esempio torace, gambe, seno, ecc. Oggi, solo negli Stati Uniti, la radiologia diagnostica rappresenta i due terzi della dose da fonti artificiali. Le apparecchiature a raggi X possono produrre livelli elevati di radiazioni ionizzanti.

Apparecchiature a raggi X ad armadio. Le apparecchiature a raggi X ad armadio sono dotate di camere di irradiazione completamente chiuse, schermate e interbloccate. L'apparecchiatura può funzionare solo quando lo sportello della camera è ben chiuso. I tassi di esposizione in ogni punto all'esterno rispettano il tasso specificato per le zone non controllate.

### Fonti di radiazione

Siamo tutti esposti alle radiazioni ogni giorno. Secondo l'NCRP (consiglio nazionale statunitense per la protezione radiologica), la dose media di fondo negli Stati Uniti è di 360 mrem/anno (3,6 mSv/anno). Queste esposizioni provengono principalmente da fonti naturali di radiazione, come il radon, le radiazioni cosmiche e i depositi naturali terrestri. Anche il nostro corpo contiene radioattività naturale.

Esistono due sorgenti di radiazioni: naturale e artificiale.

Le fonti naturali di radiazione comprendono i raggi cosmici, i raggi gamma terrestri, i radionuclidi nel corpo, il radon e i suoi prodotti di decadimento. La dose efficace media annua mondiale da fonti naturali è stimata essere di 2,4 mSv (240 mrem). Ci sono dei fattori che influenzano le dosi efficaci di queste sorgenti naturali di radiazioni: le dosi di radiazioni cosmiche dipendono dall'altezza sul livello del mare e dalla latitudine, le dosi di raggi gamma terrestri dipendono dalla geologia locale mentre la dose dai prodotti di decadimento del radon dipende dalla geologia locale e dalla costruzione e dall'uso delle abitazioni. Vedere la Tabella 1 per le dosi efficaci annuali provenienti da queste fonti naturali.

**Tabella 1**

Dose efficace annuale per adulti da fonti naturali

Fonte di esposizione	Dose efficace annuale (mSv)	
	Tipica	Elevata *
Raggi cosmici	0,39	2,0
Raggi gamma terrestri	0,46	4,3
Radionuclidi nel corpo (tranne il radon)	0,23	0,6
Radon e suoi prodotti di decadimento	1,3	10
TOTALE (arrotondato)	2,4	-

\*I valori elevati sono rappresentativi di grandi regioni. Localmente si registrano valori ancora più elevati.

## 2.0.0

### Introduzione

## 2.1.0

### Raggi X


## 2.2.0

### Fonti di radiazione

Le radiografie per scopi medici sono una delle principali fonti di radiazioni artificiali. Queste utilizzano radiazioni ionizzanti per la diagnosi e il trattamento delle lesioni e delle patologie. L'UNSCEAR (Comitato scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti) stima che l'esposizione individuale alle radiazioni per scopi medici varia da 0,4 a 1 mSv all'anno. L'esposizione a radiazioni per scopi medici supera quella di tutte le altre sorgenti artificiali, ma è inferiore alla metà dell'esposizione alle radiazioni naturali di fondo.

Le dosi di radiazioni ionizzanti utilizzate nei raggi X diagnostici sono generalmente piuttosto basse,  $\leq 50$  KeV.

Il grafico seguente mostra i contributi delle varie fonti di radiazione.

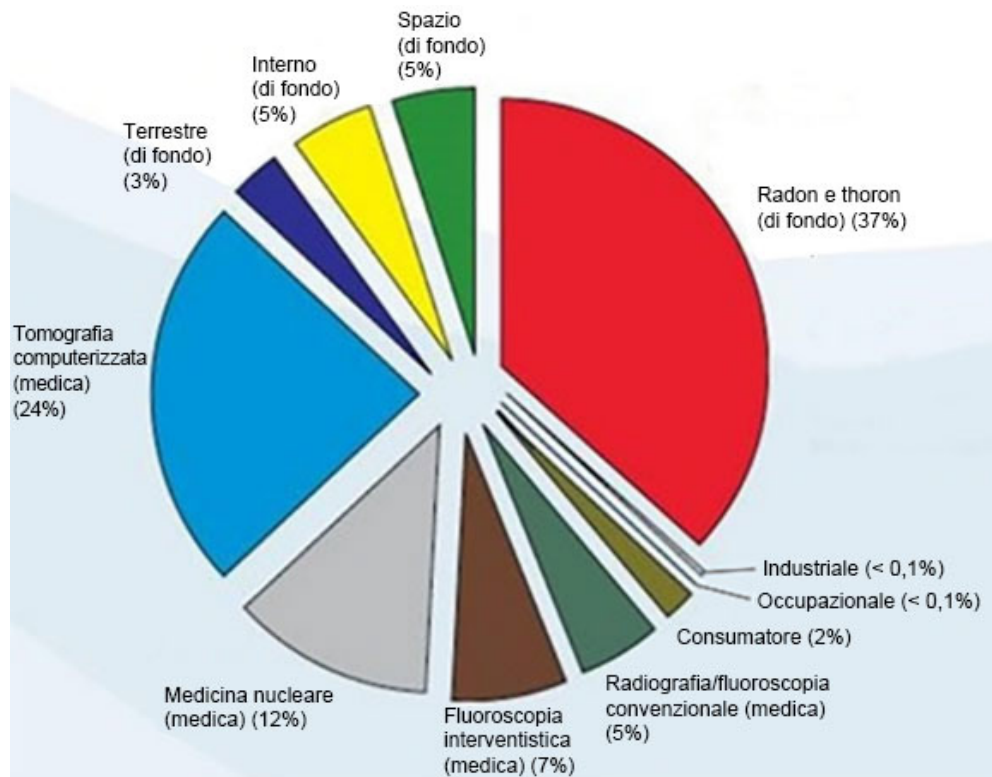

**Figura 2.2.1**  
**Fonti di dose di radiazioni**  
**negli Stati Uniti.**

Da NCRP 160, Fig. 1.1.  
Contributo percentuale di varie  
fonti di esposizione alla dose  
efficace collettiva totale  
(1.870.000 persone-Sv) e alla  
dose efficace totale per individuo  
nella popolazione statunitense.

A causa delle alterazioni provocate in atomi e molecole, l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può avere effetti nocivi sulla salute. Quando le radiazioni ionizzanti passano attraverso i tessuti, delle grandi quantità di energia vengono trasferite a singole molecole. Questo trasferimento di energia provoca lo spostamento degli elettroni dagli atomi e, di conseguenza, un insieme di effetti chimici e fisici. Tra questi, l'effetto più critico è il danno alle molecole di DNA. Il corpo umano è dotato di meccanismi che normalmente riparano questo danno, ma i danni estesi o di un certo tipo potrebbero non essere riparabili. Quando il corpo non è in grado di riparare il danno, la cellula può morire o mutare. Le cellule mutate potrebbero trasformarsi in tumori. L'entità del danno è proporzionale all'energia ceduta o alla dose di radiazioni ionizzanti ricevuta.

Gli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai raggi X possono essere generalmente di due tipi: diretti o indiretti. Si ritiene che i raggi X creino dei radicali nelle cellule esposte del corpo che possono rompere o modificare i legami chimici all'interno di importanti molecole biologiche.

## 2.3.0 Effetti biologici delle radiazioni

Di conseguenza:

- (1) le cellule possono essere ferite o danneggiate, anche se molte cellule si riparano da sole, senza alcun danno residuo;
- (2) le cellule possono morire, cosa che succede a milioni di cellule del corpo ogni giorno e sono sostituite in un normale processo biologico;
- (3) le cellule possono ripararsi in modo errato, provocando un cambiamento biofisico. Infine, i raggi X possono passare attraverso il corpo senza alcuna interazione.

I danni alle cellule causati dalle radiazioni ionizzanti possono provocare:

- una produzione di radicali liberi;
- una rottura dei legami chimici;
- una produzione di nuovi legami chimici e una reticolazione tra macromolecole;
- un danno alle molecole che regolano i processi cellulari vitali (ad es. DNA, RNA, proteine).

Il tasso di dose, la dose ricevuta totale, l'energia della radiazione, l'area del corpo esposto, la sensibilità dell'individuo e la sensibilità cellulare sono tutti fattori che determinano gli effetti biologici dell'esposizione alle radiazioni.

Vi sono due tipi di effetti da esposizione alle radiazioni ionizzanti: effetti deterministici ed effetti stocastici.

## 2.3.0 Cont.

### EFFETTI DETERMINISTICI E STOCASTICI

Gli effetti biologici potenziali dipendono dalla quantità e dalla velocità con cui si riceve una dose di radiazioni. Le dosi di radiazioni possono essere raggruppate in due categorie, dose *acuta* e dose *cronica*.

#### Dose acuta ed effetti deterministici

Un'esposizione acuta alle radiazioni è una dose elevata di radiazioni in un breve periodo di tempo, normalmente da secondi a giorni. Gli effetti causati da dosi di radiazioni acute sono detti *deterministici*; la gravità dell'effetto è determinata dalla quantità di dose ricevuta. Gli effetti deterministici hanno di solito un certo livello di soglia al di sotto del quale, probabilmente, l'effetto non si verificherà, ma al di sopra del quale ci si aspetta l'effetto. Al di sopra della soglia, la gravità dell'effetto aumenta all'aumentare della dose.

Ad esempio, una dose corporea di circa 300 rem (3 Sv), 60 volte il limite annuale di dose professionale, se ricevuta in un breve periodo di tempo (ad esempio, poche ore) causa vomito e diarrea entro poche ore, perdita di capelli, febbre e perdita di peso entro poche settimane e circa il 50% di probabilità di morte senza cure mediche. Questi effetti non si verificherebbero se la dose di 300 rem (3 Sv) venisse accumulata gradualmente nel corso di molti anni.

C'è anche una differenza tra l'esposizione di tutto il corpo e l'esposizione parziale. Una dose acuta di 600 rem (6 Sv) nella mano provoca arrossamento della pelle con un recupero nei mesi successivi e nessun danno a lungo termine atteso. Tuttavia, una dose acuta di tale entità in tutto il corpo potrebbe causare la morte in breve tempo senza cure mediche.

L'utilizzo di adeguati meccanismi di radioprotezione e di limiti di dose di esposizione professionale riducono la probabilità che questi effetti si verifichino.

I limiti di dose professionale sono molto al di sotto delle soglie per gli effetti deterministici.

### 2.3.1 Effetti deterministici e stocastici

## Dose cronica ed effetti stocastici

Una dose cronica è una quantità relativamente piccola di radiazioni ricevute per un lungo periodo di tempo (ad esempio anni). Poiché una percentuale minore di cellule deve ripararsi in un dato momento, il corpo è meglio attrezzato per tollerare una dose cronica che una dose acuta, avendo più tempo per riparare i danni. In questo tempo, infatti, il corpo può sostituire le cellule morte o non funzionanti con cellule nuove e sane. Tuttavia, ciò non comporta un'assenza di rischi legati all'esposizione cronica alle radiazioni.

Il termine stocastico significa "casuale", questo significa che livelli bassi di esposizione alle radiazioni non producono con certezza un effetto. Questi livelli bassi, al di sotto della soglia degli effetti deterministici, possono provocare o meno effetti dannosi per l'organismo.

Però bisogna ricordare che:

- 1) non esiste una soglia di esposizione alle radiazioni al di sotto della quale si possa affermare con certezza che gli effetti non si verificheranno;
- 2) raddoppiando la dose di radiazione, raddoppia la probabilità che si verifichino degli effetti.

L'esposizione cronica può produrre effetti che possono essere osservati solamente qualche tempo dopo l'esposizione iniziale. Questi possono includere effetti genetici e altri effetti come cancro, lesioni precancerose, tumori benigni, cataratta, cambiamenti cutanei e difetti congeniti. In generale, la preoccupazione maggiore è lo sviluppo di una forma di cancro.

Gli effetti immediati non si verificano con dosi inferiori a 25 rem (0,25 Sievert). E gli effetti latenti possono comparire anni dopo la ricezione della dose. Studi sulle popolazioni esposte a radiazioni ionizzanti (> 0,5 Sv) hanno dimostrato che la probabilità che un cancro mortale si verifichi a causa dell'esposizione alle radiazioni è di circa il 5% per Sv.

## RADIOSENSIBILITÀ

La radiosensibilità è la probabilità che una cellula, un tessuto o un organo subiscano un effetto per unità di dose di radiazione. La radiosensibilità è più alta nelle cellule che si dividono rapidamente (altamente mitotiche) o che sono relativamente non specializzate (indifferenziate). Per questo motivo le cellule dell'epidermide basale, del midollo osseo, del timo, delle gonadi e del cristallino sono altamente radiosensibili. Mentre muscoli, ossa e tessuti del sistema nervoso hanno una radiosensibilità relativamente bassa. Inoltre, la radiosensibilità è maggiore durante lo stadio fetale e si riduce progressivamente con l'adolescenza e l'età adulta.

Secondo la legge fondamentale della radiobiologia: gli effetti biologici sono direttamente proporzionali all'indice mitotico e al numero di divisioni future della cellula esposta e inversamente proporzionali al grado di differenziazione. Il termine mitosi identifica il processo di divisione naturale di un nucleo cellulare durante la riproduzione cellulare; il termine differenziazione si riferisce al grado di specializzazione della cellula nello svolgere una funzione specifica all'interno di un organismo.

## RISCHI DA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI

Si stima che circa il 20% (1 su 5) di tutti i decessi negli Stati Uniti siano dovuti a una forma di cancro.

Se ogni membro di una popolazione di 1 milione di persone dovesse ricevere 10 mrem (0,1 mSv) di radiazioni, è possibile che si verifichino altri 5 decessi. Bisogna però ricordare che su questa popolazione di 1 milione di persone, circa 200.000 moriranno di cancro, rendendo questi pochi decessi aggiuntivi statisticamente impossibili da rilevare.

### 2.3.1 Cont.

### 2.3.2 Radiosensibilità

### 2.3.3 Rischi da esposizione alle radiazioni

Inoltre, il rischio di morte per cancro è dello 0,08% per rem (10 mSv) per dosi ricevute rapidamente (acute) e potrebbe essere 2 volte (0,04%, o 4 su 10.000) inferiore a quella per dosi ricevute per un lungo periodo di tempo (croniche).

Sulla base dei dati attualmente disponibili, la commissione di regolamentazione nucleare statunitense NRC ha adottato il valore di rischio per una dose professionale di 1 rem (0,01 Sv) in quanto rappresenta un rischio di 4 su 10.000 di sviluppare un cancro mortale.

La Commissione internazionale per la protezione radiologica (Pubblicazione 103, 2007) indica un valore del 5,5% per Sievert per il cancro e dello 0,2% per Sievert per gli effetti ereditari dopo l'esposizione a radiazioni a basse dosi.

Il rischio associato all'utilizzo diagnostico delle radiazioni ionizzanti è normalmente limitato agli effetti stocastici tardivi, che si stima si verifichino con una frequenza di circa lo 0,01% per un esame medio (danni cutanei deterministici possono verificarsi dopo la fluoroscopia in casi estremi). A livello individuale, questi rischi sono quasi sempre minimi rispetto al beneficio della diagnosi e del trattamento.

## CONCLUSIONI SUI RISCHI PER LA SALUTE

Si presume che qualsiasi esposizione alle radiazioni, per quanto piccola, comporti dei rischi. Tuttavia, questi rischi sono in media paragonabili o inferiori a quelli che si incontrano in altre attività o occupazioni che sono considerate sicure. Avendo un ampio controllo sulla quantità di esposizione alle radiazioni sul lavoro, tale rischio può essere controllato e ridotto al minimo. L'approccio migliore è quello di mantenere la dose a un livello As Low As Reasonably Achievable (livello più basso ragionevolmente conseguibile), o ALARA, trattato in modo più approfondito in seguito. **Riducendo al minimo la dose si riduce al minimo il rischio.**

## LIMITI DI DOSE ICRP

La Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) ha stabilito dei limiti di dose di radiazioni sulla base dei dati disponibili. Questi limiti di dose sono i valori massimi consentiti per l'esposizione di tutto il corpo. L'unità di misura della dose è chiamata Sievert (Sv) che tiene conto di vari fattori per determinare una quantità detta *dose efficace*. I limiti di dose sono stati aggiornati l'ultima volta nel 2007.

Per il pubblico il limite di dose è di 1 mSv/anno (0,001 Sievert all'anno).

Per i lavoratori (coloro che lavorano nell'industria nucleare) il limite di dose è di 20 mSv/anno (0,02 Sievert all'anno).

I limiti di dose escludono gli effetti delle radiazioni di fondo.

Limiti di dose annuale raccomandati dall'ICRP per singoli organi o tessuti

Dose pesata di radiazioni	Lavoratori	Pubblico
Cristallino	150 mSv	15 mSv
Cute <sup>1,2</sup>	500 mSv	50 mSv
Mani e piedi	500 mSv	-

1. La limitazione della dose efficace fornisce una protezione sufficiente per la pelle contro gli effetti stocastici. Un limite aggiuntivo è necessario per le esposizioni localizzate al fine di prevenire reazioni tissutali.
2. In media su un'area di pelle di 1 cm<sup>2</sup>, indipendentemente dall'area esposta.

## 2.3.3 Cont.

## 2.3.4

### Conclusioni sui rischi per la salute

## 2.4.0

### Limiti di dose ICRP



## Fattori determinanti

Gli effetti dell'esposizione ai raggi X dipendono dalla durata dell'esposizione, dalla velocità di erogazione della dose, dall'energia presente nei raggi X, dalla dose totale, dall'entità della dose e dal tipo di esposizione, cioè su tutto il corpo o localizzata. I raggi X a bassa energia (< 50 KeV) possono provocare danni solo alla cute o alle parti esterne del corpo mentre i raggi X ad alta energia possono penetrare nel corpo e negli organi interni. Una dose acuta elevata somministrata in una sola volta potrebbe avere un effetto maggiore rispetto alla stessa dose somministrata nel tempo in frazioni graduali.

In ambienti sanitari il rischio di esposizione alle radiazioni può essere ridotto al minimo:

- evitando tutte le esposizioni superflue alle radiazioni;
- usando dosi AL LIVELLO PIÙ BASSO RAGIONEVOLMENTE CONSEGUIBILE (ALARA);
- seguendo le istruzioni per l'uso dei produttori delle apparecchiature;
- seguendo le istruzioni di manutenzione preventiva dei produttori delle apparecchiature;
- utilizzando una schermatura appropriata.

## ALARA

Il concetto ALARA si basa sul presupposto che qualsiasi dose di radiazione, per quanto piccola, può avere degli effetti nocivi. Secondo ALARA, bisogna utilizzare ogni mezzo ragionevole per ridurre l'esposizione.

Ci sono tre regole generali per ridurre l'esposizione di una persona a qualsiasi tipo di radiazione ionizzante.

1. Ridurre il tempo di esposizione alla sorgente di radiazione.
  - Riducendo il tempo di esposizione si riduce la dose di radiazioni.
2. Aumentare la distanza tra la persona e la sorgente di radiazione.
  - Aumentando la distanza da una fonte di radiazione si riduce significativamente la dose di radiazione.
  - Raddoppiare la distanza da una fonte di radiazione comporta un quarto del rateo di dose.
  - Triplicare la distanza comporta un nono del rateo di dose.
3. Aumentare la schermatura tra la persona e la sorgente di radiazioni.
  - Utilizzando una schermatura appropriata si riduce notevolmente la dose.
  - Il materiale utilizzato e lo spessore dello schermo dipendono dalla sorgente della radiazione.
  - Il piombo è un materiale schermante comunemente usato.

Per le regole e le linee guida specifiche della propria struttura, consultare il proprio incaricato della radioprotezione.

## 2.5.0

## Gestione del rischio

## FONTI BIBLIOGRAFICHE

Radiation Safety Training and Reference Manual, California Institute of Technology, Training and Reference Manual, March 1995 (Revised June, 1996)

Radiation Safety Manual(Revised March 2010), Stanford University, Veterans Affairs Palo Alto, Health Care System, Environmental Health and Safety, Stanford University, Stanford California

Radiation and X-Ray Training - Environmental Health and Safety - University of North Carolina at Chapel Hill

USF (University of Southern Florida) Radiation Safety – Research X-Ray Safety Manual, Radiation Safety Office – 2003

University of Oklahoma Chemical Crystallography Lab, 11-APR-2011

European Nuclear Society – Glossary of Nuclear Terms  
<http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia.htm>

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 1993, Report to the General Assembly, With Scientific Annexes, UNITED NATIONS PUBLICATION, Sales No. E.94.IX.2, ISBN 92-1-142200-0

JEFFERSON LAB – Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab)

Ionizing Radiation Effects and Their Risk to Humans, **T.R. Goodman, MD** *Yale University School of Medicine, New Haven, CT*

IMAGE WISELY – Radiation Safety in Adult Medical Imaging  
<http://www.imagewisely.org/Imaging-Professionals/Imaging-Physicians/Articles/Ionizing-Radiation-Effects-and-Their-Risk-to-Humans.aspx>

**Seibert 2004:** Seibert J A “X-ray imaging physics for nuclear medicine technologists.” Part1: Basic principles of x-ray production *J Nucl Med Technol* 32 139-47

**Shultis 2005:** Shultis J K and Faw R E 2005 Radiation shielding technology *Health Phys* 88 297-322

**Simpkin 1995:** Simpkin D J 1995 Transmission Data for Shielding Diagnostic X-Ray Facilities *Health Phys* 68 704-709

## 2.6.0

### Riferimenti bibliografici

# 3

## SEZIONE 3

### Informazioni sul Sistema Faxitron Core

**Faxitron Core Digital Specimen Radiography (DSR)** è un sistema di imaging radiologico digitale con armadio da scrivania compatto per la verifica rapida delle biopsie di base.

L'esecuzione della verifica direttamente nella stessa sala operatoria della biopsia consente uno svolgimento delle procedure più rapido, limitando così il tempo necessario al paziente per completare l'esame. La radiografia del campione può potenzialmente limitare il numero di richiami del paziente. L'ingombro ridotto di Faxitron Core consente di installarlo in sale operatorie o uffici con spazio limitato.

Il **sistema Faxitron Core Digital Specimen Radiography** utilizza **Vision**, un software completo e potente per l'acquisizione di immagini e la manipolazione dei dati. Il software Vision gestisce l'acquisizione digitale delle immagini radiografiche, la calibrazione, la visualizzazione, l'analisi e la manipolazione delle immagini, la banca dati dei pazienti, l'archiviazione e la trasmissione delle immagini. Il software **Vision** è la parte centrale di questo sistema. Il software **Vision** è conforme alla norma DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 3.0 e viene fornito con DICOM Print, Store e Modality Work List (MWL).

## 3.0.0 Panoramica

### Versione DICOM

Hologic utilizza l'ultimo standard DICOM:

ACR-NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) v3.0, bozza finale, agosto 1993.

Ed è conforme a:

NEMA PS 3.1 - 3.20 (2016), Digital Imaging and Communications In Medicine Set

## 3.0.1 Versione DICOM

### Classi di archiviazione

Faxitron DR fornisce conformità standard alla seguente Classe SOP DICOM V3.0 come SCU.

#### Classe SCU SOP

Classe SOP	UID classe SOP
SOP archiviazione di immagini radiografiche computerizzate	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1
Archiviazione di radiografie digitali per la presentazione	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1
Archiviazione di radiografie digitali per l'elaborazione	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1
Archiviazione di mammografie digitali per la presentazione	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2
Archiviazione di mammografie digitali per l'elaborazione	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1
Richiamo/consultazione root studio Modello-FIND (Cerca)	1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1
Richiamo/consultazione root paziente Modello-FIND (Cerca)	1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1
Modello-FIND (Cerca) modalità informazioni elenco di lavoro	1.2.840.10008.5.1.4.31
Archiviazione presentazione copia elettronica in scala di grigi	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla dichiarazione di conformità DICOM completa presente nel sistema. Il file si trova nella cartella in C:\Faxitron e vi è anche un collegamento sul desktop.

Se necessario, una copia della dichiarazione di conformità DICOM è disponibile su richiesta presso Hologic.

## Assistenza

Nelle apparecchiature Hologic non vi sono parti riparabili. Si prega di contattare il rappresentante autorizzato Hologic per l'assistenza.

USA: +1.877.371.4372  
Europa: +32 2 711 4690  
Asia: +852 37487700  
Australia: +1 800 264 073  
Altri Paesi: +1 781 999 7750  
E-mail: BreastHealth.Support@hologic.com

## Individuazione e risoluzione dei problemi

Fare riferimento al manuale di assistenza Faxitron Core, contattare il rappresentante Hologic o il servizio clienti Hologic.

## PIANO DI MANUTENZIONE

Fare riferimento al manuale di assistenza Faxitron Core, contattare il rappresentante Hologic o il servizio clienti Hologic.

### 3.0.2


## Assistenza e risoluzione dei problemi

### 3.0.3

## Piano di manutenzione

## 3.1.0 Specifiche

**Figura 3.0.1**  
Dimensioni e peso

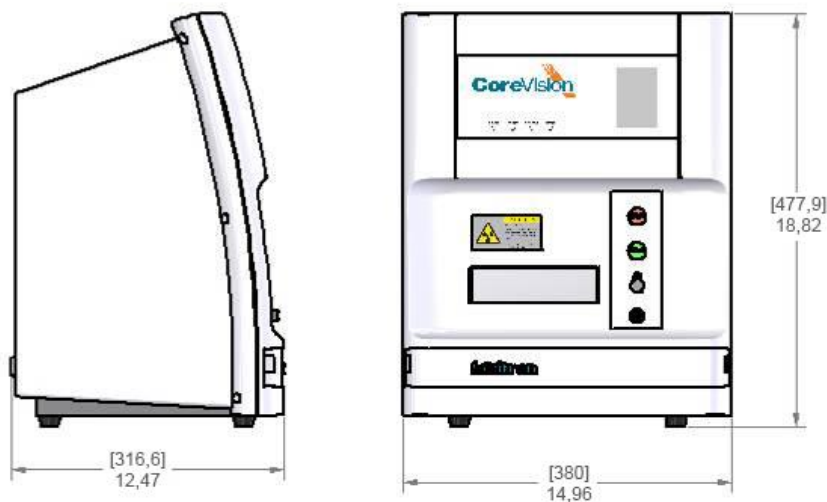

### **DISTANZE SORGENTE-DETTETTORE DI IMMAGINE (SID) e SORGENTE-OGGETTO (SOD):**

- Dalla parte superiore della telecamera al detettore di immagine: 5,8 mm (0,230")
- Dal tubo obiettivo al detettore di immagine: 327,66 mm (12,90")
- Dal tubo obiettivo alla posizione del campione: 227,08 mm (8,94")
- Dal detettore di immagine alla posizione del campione: 100,58 mm (3,96")
- Ingrandimento efficace: 1,44:1

**PESO:** 18 kg (40 libbre)

**REQUISITI DI ALIMENTAZIONE:** 120 V c.a. 60 Hz 150 W max o 230 V c.a. 50 Hz 150 W max

**POTENZA TERMICA:** 500 BTU/h max

**CICLO DI LAVORO RAGGI X:** 50%

**CONTROLLO ESPOSIZIONE:** Automatico o manuale

## Requisiti | Conformità di Faxitron Core

È responsabilità della struttura o dell'istituzione che gestisce questo sistema garantire il rispetto di tutte le normative locali, regionali e federali che riguardano l'uso dell'apparecchiatura a radiazioni ionizzanti.

### Limiti di emissione

Le radiazioni a raggi X emesse dall'unità Faxitron Core non superano un'esposizione di 0,3 milli-Roentgens (mR) per ora in un punto qualsiasi di 5 centimetri (cm) oltre la superficie esterna. Per i paesi che richiedono valori di emissione misurati a 10 cm dalle superfici esterne, la radiazione non supera 0,1 mR per ora a 10 cm.

### Interblocchi di sicurezza

Il sistema Faxitron Core Specimen DR ha due interblocchi di sicurezza sul cassetto portacampioni, sul pannello di accesso frontale e sul coperchio posteriore per evitare la generazione di raggi X a meno che non siano chiusi/installati.

### Pulsante di avvio

In seguito all'interruzione della generazione di raggi X da parte degli interblocchi di sicurezza, il pulsante di avvio sul pannello frontale consentirà di riprendere la generazione dei raggi X quando si è pronti.

### Comando tramite chiave

Interruttore con chiave situato sul pannello frontale, che richiede l'inserimento di una chiave e la rotazione in senso orario in posizione ore 3 per alimentare il sistema ad armadio. La chiave è bloccata in posizione "ON".

### Pulsante di arresto d'emergenza

Sul pannello frontale di Faxitron Core è disponibile un pulsante di arresto d'emergenza per terminare la generazione di raggi X, in aggiunta agli interblocchi di sicurezza sul cassetto del sistema.

### Indicatori di generazione di raggi X

Faxitron Core è dotato di una spia sul pannello frontale che indica la presenza di raggi X e di un'interfaccia grafica utente e produce un segnale acustico durante la generazione di raggi X.

### Accesso al software – Password opzionale

L'utente ha la possibilità impostare una "Password" per aprire il software Vision. Quando questa opzione è attiva, per aprire il software Vision è necessario inserire la corretta *"password definita dall'utente"*. Se non viene inserita la password corretta, il software si chiude.

### Sistema di controllo raggi X

Il sistema di controllo dei raggi X è costituito dall'elettronica di sistema, dagli interruttori di interblocco, dal pulsante di accensione dei raggi X, dal pulsante di arresto d'emergenza e dal software di imaging di sistema (Vision).

Il sistema Faxitron Core è completamente dipendente dal software per l'acquisizione di immagini e la generazione di raggi X.

## 3.2.0

### Requisiti di conformità e misure di sicurezza

## 3.3.0

### Sistema di controllo raggi X

Il software e il firmware della scheda del controller monitorano le condizioni del sistema per determinare:

- 1) se è possibile acquisire immagini;
- 2) i parametri di acquisizione (livello di energia e durata);
- 3) se l'acquisizione di immagini deve essere interrotta;
- 4) cosa visualizzare in caso di messaggi;
- 5) gli indicatori appropriati da attivare.

Per attivare l'acquisizione di immagini e la generazione di raggi X, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) il software Vision deve essere aperto;
- 2) il sistema deve essere armato, con i dati del paziente inseriti;
- 3) gli interruttori di interblocco devono essere chiusi;
- 4) la scheda di controllo deve comunicare con il software di sistema (Vision);
- 5) il rilevatore di immagine deve comunicare con il software di sistema;
- 6) il pulsante di accensione dei raggi X deve essere premuto.

Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte: il software determina i parametri di acquisizione dell'immagine (livello di energia e durata) e il software invia questi parametri alla scheda del controller. Il controller elabora il segnale e lo indirizza verso l'HVPS (alimentazione ad alta tensione). Se il circuito ad alta tensione è attivo, l'HVPS genera l'alta tensione che viene inviata al tubo radiogeno e i raggi X vengono generati. Indicatori e messaggi vengono attivati per informare l'utente che è in corso l'acquisizione di immagini e la generazione di raggi X.

Se in qualsiasi momento durante l'acquisizione delle immagini si apre un interblocco, l'acquisizione si ferma e vengono visualizzate indicazioni e messaggi relativi.

## Schermatura

Il sistema Faxitron Core è progettato per generare energie di radiazione ionizzante pari o inferiori a 30 keV.

L'acciaio inossidabile utilizzato nella produzione della camera a raggi X Faxitron Core è un materiale ad alto numero atomico (Z) che assorbe efficacemente circa il 100% delle radiazioni ionizzanti a questo livello energetico.

Non è necessaria alcuna schermatura aggiuntiva.

## Attenuazione

Il fascio primario emesso dal tubo radiogeno Faxitron Core è diretto verso il fondo del sistema. Eventuali raggi riflessi o dispersi saranno assorbiti dalla parte superiore, dalle pareti e dalla porta della camera a raggi X.

Le misurazioni tipiche della radiazione di fondo presso lo stabilimento di produzione di Hologic sono 0,1 µSv/h (0,01 mR/hr).

Le misurazioni della dose sono effettuate a livelli di energia di 30 keV con un blocco acrilico di 6 mm nel percorso del fascio primario per rappresentare i massimi livelli di energia del sistema e la massima diffusione del fascio. Le misurazioni su superfici accessibili sono generalmente comprese tra 0,1 e 0,5 µSv/ora (0,01 e 0,05 mR/hr).

Hologic esorta a seguire ALARA, As Low As Reasonably Achievable. L'uso dell'AEC (Automatic Exposure Control, controllo esposizione automatico) assicura che vengano generati i più bassi livelli di energia delle radiazioni ionizzanti possibili per ottenere una qualità d'immagine ottimale. Con l'AEC attivato, il sistema preleva un campione di esposizione breve a un livello energetico e una durata predeterminati. Il software valuta quindi l'immagine del campione e calcola le impostazioni migliori di energia e tempo.

### 3.3.0 Cont.

### 3.4.0 Schermatura e attenuazione

### 3.5.0 ALARA



# 4

## SEZIONE 4

# Installazione e configurazione di Faxitron Core

## REQUISITI NORMATIVI

È responsabilità della struttura o dell'istituzione che gestisce questo sistema garantire il rispetto di tutte le normative locali, regionali e federali che riguardano l'uso dell'apparecchiatura a radiazioni ionizzanti.

### Avvertenze

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il sistema.
- Non utilizzare il sistema in modo diverso da quello descritto nel presente manuale. In caso di dubbio contattare Hologic o il proprio distributore autorizzato.
- Non tutti i cavi di alimentazione hanno la stessa potenza. Non utilizzare con questo sistema un cavo di alimentazione diverso da quello fornito in dotazione. Non utilizzare il cavo di alimentazione di questo sistema su altre apparecchiature.
- Il sistema è testato secondo i più elevati standard internazionali, tuttavia si consiglia di contattare le autorità nazionali per qualsiasi requisito operativo locale.
- Questo sistema non è inteso per un uso pubblico. Deve essere situato in una zona in cui il pubblico non può accedervi senza la presenza di un operatore.
- L'uso di controlli o modifiche per eseguire procedure diverse da quelle specificate nel presente documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

### Precauzioni generali

Le seguenti precauzioni devono essere prese per evitare danni al sistema Faxitron Core:

- Non collegare o scollegare mai i cavi di comunicazione e/o di alimentazione mentre il sistema della videocamera è acceso. Se si collegano/scollegano i cavi mentre è in corso l'alimentazione, possono verificarsi danni al rilevatore CMOS o all'elettronica della telecamera.
- Il sistema di telecamere è fragile; prestare attenzione per evitare di danneggiarlo. Il sistema di telecamere non deve mai essere maneggiato in modo scorretto, colpito, urtato o lasciato cadere.
- Il sistema Faxitron Core ha una modalità di calibrazione. La calibrazione deve essere completata quotidianamente per garantire il corretto funzionamento del sistema. Per la procedura di calibrazione, fare riferimento alle Sezioni 5 e 6 del presente manuale.
- Assicurarsi che il cassetto portacampioni sia completamente chiuso prima di spegnere l'unità.
- Assicurarsi che il cassetto portacampioni sia pulito e privo di campioni e/o residui prima di spegnere l'unità.

## 4.0.0

### Avvertenze e precauzioni per il sistema



## Connessioni interoperabili

## 4.0.0 Cont.

Faxitron Core è in grado di funzionare come dispositivo autonomo senza alcun collegamento in ingresso o in uscita con altri dispositivi. Le immagini possono essere acquisite, archiviate e riviste direttamente sul sistema.

Tuttavia, il sistema è dotato di diverse interfacce. L'interfaccia primaria è la connessione di rete che consente di collegare il sistema a un sistema per l'archiviazione e la comunicazione delle immagini (PACS). Le immagini possono poi essere trasmesse dal dispositivo direttamente alla rete delle strutture tramite il nostro software in formato DICOM. Consultare la Sezione 6 per i dettagli sulla versione DICOM. Solo i dipendenti Hologic o il personale IT qualificato presso la struttura dell'utente possono impostare questa comunicazione.

Di seguito sono elencati i collegamenti del sistema e la loro destinazione d'uso. Nessun altro tipo di dispositivo deve essere collegato al sistema Faxitron Core senza l'approvazione di Hologic.

Connessione	Azione	Tipo dispositivo	Destinatario
Porta Ethernet sul retro	Archiviare le immagini radiografiche nella memoria dati in rete.	PACS o memoria di rete	Impostata da Hologic o dal personale IT della struttura. Usata dai medici.
Porta Ethernet sul retro	Consentire la connessione remota da parte del team di assistenza Hologic per poter diagnosticare e riparare il sistema.	Connessione internet di rete	Personale IT di Hologic o della struttura.
Porta USB nella parte anteriore	Trasferire immagini dal dispositivo. Da utilizzare solo se il PACS o la rete non sono disponibili.	Dispositivo di archiviazione USB (unità flash)	Medici o personale IT con accesso approvato al sistema.
Porta USB nella parte anteriore	Per l'assistenza e la manutenzione del sistema potrebbe essere necessario copiare dei file da e verso il computer. Ad esempio, aggiornamenti software o file di log.	Dispositivo di archiviazione USB (unità flash)	Personale IT di Hologic o della struttura.
Porta USB sul retro	Consentire il collegamento di una stampante. Il software Vision consente il collegamento di una stampante DICOM o di una stampante standard compatibile con Windows.	DICOM o stampante Windows	Medici o personale IT della struttura.

## Sicurezza informatica

La sicurezza dei dispositivi è una responsabilità condivisa tra Hologic e le strutture sanitarie. Una sicurezza informatica instabile può comportare la compromissione della funzionalità del dispositivo, la perdita di disponibilità o integrità dei dati (medici o personali) o l'esposizione di altri dispositivi o reti collegate a minacce alla sicurezza. Hologic esegue una serie di controlli per garantire la sicurezza informatica delle sue unità e per garantirne funzionalità e sicurezza.



Tutte le nostre unità utilizzano sistemi operativi Windows standard. Al momento dell'installazione, si consiglia alla struttura di installare tutte le misure di sicurezza necessarie, definite dai propri requisiti interni, come per qualsiasi altro PC collegato alla rete.

La struttura può configurare il sistema operativo Windows con tutti i protocolli di rete e le autorizzazioni necessarie. Per esempio, è possibile aggiungere:

- ID utente e password;
- autorizzazione a livelli con adeguata autenticazione;
- restrizioni alle installazioni di software;
- requisiti di contenuto affidabili, compresa la verifica della firma con codice;
- impostazioni degli aggiornamenti di Windows, incluse le versioni di sicurezza.

Inoltre, il nostro software di imaging (Vision) può essere protetto da password, pertanto alcuni utenti possono accedere al sistema operativo senza poter aprire il software Vision.

L'unità viene fornita con una chiave fisica per accendere il sistema a raggi X. In questo modo il sistema può essere bloccato in modo che, anche se si accede al software, non è possibile avviare le radiografie.

Questa unità è stata progettata per essere utilizzata come unità indipendente o collegata al PACS interno della struttura o ad altre reti a circuito chiuso. Non può essere collegata a Internet a meno che (a) la struttura non sia stata specificamente istruita in tal senso da Hologic, o (b) la struttura non adotti precauzioni adeguate per garantire la sicurezza informatica dell'unità dalle minacce correlate alla connessione Internet.

Hologic svilupperà aggiornamenti o patch per il software Hologic per continuare a garantire la sicurezza dei prodotti, in base alle necessità, durante l'intero ciclo di vita dell'unità.

È possibile implementare ulteriori misure di sicurezza, compresa la crittografia, e Hologic può collaborare con il reparto IT della struttura per ridurre il rischio per i pazienti a seguito di una violazione della sicurezza informatica.

## Eventi di sicurezza informatica

Se si verifica un evento di sicurezza informatica, scollegare il sistema dalla rete e contattare immediatamente Hologic. Lavoreremo con il dipartimento IT per risolvere il problema.

Un evento di sicurezza informatica può essere rilevato in diversi modi:

- funzionamento e/o connessione di rete più lenti del normale;
- pop-up sospetti o pagina iniziale modificata nel browser Internet;
- password non funzionanti;
- programmi non identificati nel menu di avvio o nella barra delle applicazioni;
- dati mancanti, corrotti o modificati.

## Pulizia

### Camera interna

I campioni di tipo biologico possono contenere agenti infettivi pericolosi per la salute. Seguire la procedura di biosicurezza appropriata e indossare guanti quando si maneggiano campioni di tessuto o qualsiasi materiale con cui vengono a contatto.

L'unica parte della camera a raggi X accessibile per la pulizia è il cassetto portacampioni. È possibile pulire delicatamente il cassetto portacampioni con un panno morbido senza pelucchi inumidito con alcol isopropilico al 70–90% o ipoclorito di sodio diluito (5,25%–6,15% di candeggina per l'uso domestico diluita 1:500 fornisce la giusta concentrazione).

- Non utilizzare abrasivi o solventi aggressivi.
- Non strofinare l'area dell'immagine incassata del cassetto, poiché ciò potrebbe graffiare la superficie e creare artefatti dell'immagine.
- Provare i detergenti su una piccola area del cassetto per verificare che non danneggino il materiale.

### Esterno

Pulire periodicamente le superfici esterne con alcol isopropilico, ipoclorito di sodio o sapone neutro e acqua. (Vedere sopra per le concentrazioni appropriate.) Non bagnare o gettare acqua sulle superfici e non utilizzare abrasivi che potrebbero graffiarle. Non lasciare i componenti elettrici del sistema a contatto con l'umidità. Provare i detergenti su una piccola area delle coperture per verificare che non danneggino il materiale.

## 4.0.0 Cont.



## Impostazione del sistema

Faxitron Core deve essere impostato da un rappresentante autorizzato di Hologic, Inc.

## Ispezione delle scatole

Il sistema Faxitron Core è consegnato in una (1) scatola di cartone. La scatola contiene l'armadio radiologico Faxitron Core, il computer, il monitor, il cavo di alimentazione, il cavo video, i cavi, la documentazione, le chiavi dell'armadio radiologico e 25 vassoi per campioni.

Chiedere allo spedizioniere di portare la scatola in un'area dove può essere tenuta al sicuro da furti, danni o condizioni ambientali estreme fino a quando un rappresentante autorizzato di Hologic Inc. potrà installare il sistema.

Controllare che la scatola non sia danneggiata. In caso di danni, contattare Hologic al numero 1-800-447-1856.

## Sollevamento e trasporto delle casse

**Attenzione:** la cassa pesa circa 36,3 kg (80 libbre). La scatola deve essere tenuta in posizione verticale come indicato dalle etichette. Prestare attenzione durante gli spostamenti per evitare lesioni e danni al sistema.



## Disimballaggio e configurazione del sistema

Il sistema Faxitron Core deve essere disimballato e installato in loco da un rappresentante autorizzato Hologic Inc.

## Posizione

Lasciare almeno 15 cm (6 pollici) di spazio libero dietro il sistema Faxitron Core per consentire una corretta ventilazione e l'accesso al cavo di alimentazione e ai cavi (se applicabile).

## Condizioni ambientali

### Operativo:

Temperatura: da 15,5 a 30 °C o da 60 a 86 °F.

Umidità relativa: < 75%.

### Stoccaggio e trasporto:

Temperatura: da -20 a 50 °C o da -4 a 122 °F.

Umidità relativa: < 75%.

L'apparecchiatura è progettata per le seguenti condizioni:

- uso interno;
- 2.000 metri di altitudine (6.562 piedi);
- grado di inquinamento 2;
- categoria di sovratensione II.

### 4.1.0

## Impostazione del sistema per campioni Faxitron Core

**REQUISITI DI ALIMENTAZIONE:** 120 V c.a. 60 Hz 150 W max O 240 V c.a. 50 Hz 150 W max

**POTENZA TERMICA:** 500 BTU/h max

**CICLO DI LAVORO RAGGI X:** 50%

**PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI:** fare riferimento alla Sezione 2 del presente manuale.

## 4.1.0 Cont.

Faxitron Core è stato progettato come sistema fisso da installare su una scrivania, un piano di lavoro o un tavolo.

### Spostamento del sistema Faxitron Core – Non consigliato.

Una volta posizionato nella sua posizione finale si **raccomanda di non spostare il sistema Faxitron Core**.


Il sistema Faxitron Core non è progettato per essere un'unità portatile. Attualmente non è previsto un carrello, quindi anche il sistema informatico sarà posizionato su una superficie non trasportabile.

**Attenzione:** l'armadio radiologico Faxitron Core pesa circa 18 kg (40 libbre) e non è stato progettato per essere sollevato e trasportato. Si tratta di uno strumento di precisione che deve essere maneggiato in modo appropriato. Non tentare di sollevare o trasportare il sistema.



Non bloccare l'area dietro o immediatamente davanti all'unità in quanto questo spazio aperto è necessario per la ventilazione del sistema e del PC. Per una ventilazione adeguata, non posizionare alcun oggetto tra l'unità e la parete che contiene la presa di corrente del sistema.

Assicurarsi che davanti al sistema vi sia una superficie piana e priva di pericoli per consentire al personale di accedere in sicurezza allo sportello del campione, alla tastiera e al monitor del computer e al pannello di controllo del sistema.

 **Nota:** lasciare spazio sufficiente accanto al sistema per accedere facilmente al cavo di alimentazione.

**Attenzione:** se è necessario spostare il sistema Faxitron Core:

- Assicurarsi che tutti i componenti siano completamente spenti
- Scollegare i cavi di alimentazione dalla relativa presa
- Scollegare tutti i cavi di interconnessione (es. cavo in fibra ottica)
- Prestare attenzione quando si sposta l'armadio radiologico Faxitron Core.



**Avvertenza:** il cavo di alimentazione di Faxitron Core viene fornito con una spina con messa a terra. Se non è disponibile una presa adatta alla spina del cavo di alimentazione, rivolgersi al personale qualificato per ottenere una presa elettrica adeguata. Non tentare di modificare la spina o la presa da soli.



**Avvertenza:** per evitare danni all'unità e/o il contatto con tessuti infettivi, assicurarsi che Faxitron Core sia accuratamente pulito e adeguatamente imballato prima di spostarlo per la manutenzione, il trasporto o lo smaltimento.



## 4.2.0 Spostamento del sistema per campioni Faxitron Core

# 5

## SEZIONE 5

# **Avvio rapido e funzionamento di base del Sistema Faxitron Core**

Prima di accendere il sistema, assicurarsi che i cavi di alimentazione siano saldamente collegati all'armadio Faxitron Core, al computer e al monitor prima di collegare i cavi alle prese di alimentazione degli impianti. Inoltre, se necessario, collegare un cavo di rete Cat5 o Cat6 al sistema Faxitron Core e alla connessione di rete della struttura.

Fare riferimento alla Sezione 4, Installazione e configurazione, del presente manuale, e alle Guide di configurazione rapida e di avvio rapido fornite con il sistema Faxitron Core.

## 5.0.0

### Panoramica avvio rapido

**Figura 5.0.1**

Pannello frontale Faxitron Core



### Procedure di imaging di base

**Avvertenza:** l'uso di Faxitron Core in un modo diverso da quello descritto nel presente manuale potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchiatura o lesioni personali.

**Avvertenza:** utilizzare contenitori o guanti approvati per evitare il contatto con campioni di tessuto del paziente potenzialmente pericolosi.

### Riepilogo della sequenza di imaging

Per un riepilogo del funzionamento del sistema, fare riferimento alla Guida di avvio rapido di Faxitron Core.

- Aprire il cassetto portacampioni (premere il pulsante **nero**).
- Collocare i campioni in un contenitore per campioni fornito da Hologic, Inc. o dal proprio istituto e inserirlo nel cassetto Faxitron Core.
- Chiudere il cassetto portacampioni (premere il pulsante **nero**).
- Scegliere o inserire un paziente nel software Vision e avviare un'acquisizione di immagini dal software.
- Premere il pulsante **Start** (Avvia, verde) sul pannello di controllo di Faxitron Core o nel software. Questo dà avvio all'esposizione ai raggi X.
- Attendere la visualizzazione dell'immagine.
- Utilizzare il mouse per spostare il cursore sull'immagine visualizzata, spostare il cursore su e giù per regolare la luminosità o a sinistra e destra per regolare il contrasto. Spostare il cursore fino a quando l'immagine si trova al livello desiderato.
- Ripetere la procedura per ulteriori campioni.

Per istruzioni operative più dettagliate, consultare la Sezione 5.2.

Per informazioni sul funzionamento avanzato del software, vedere la Sezione 6 del Manuale d'uso.






## Informazioni generali per l'avvio

L'accensione (avvio del sistema) viene completata una sola volta all'inizio dell'utilizzo del sistema. Si consiglia, una volta eseguita la sequenza di accensione, di lasciare il sistema acceso per il resto della giornata se si prevede di utilizzarlo nuovamente.

## Protocollo sequenza di avvio del sistema


### Accensione del sistema

- Accendere il computer e il monitor e consentire l'avvio completo in Windows.
- Impostare l'interruttore di alimentazione sul retro dell'armadio di Faxitron Core sulla posizione "ON". Vedere la Figura 5.1.1.
- Ruotare la chiave sulla parte anteriore dell'armadio di Faxitron Core su "ON" (in senso orario in posizione ore 3). Vedere la Figura 5.1.2.
- Verificare che il cassetto portacampioni di Faxitron Core sia vuoto.

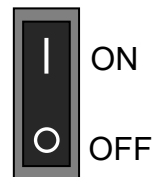

**Figura 5.1.1**

Interruttore di alimentazione principale

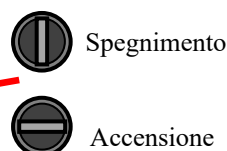

**Figura 5.1.2**

Interruttore con chiave

### Avviare il software

- Fare "doppio clic" sull'icona **Vision** sul desktop di Windows.
- Apparirà brevemente una finestra di dialogo per indicare che il software si è inizializzato e si sta caricando.
- Il software si aprirà alla schermata "Home Menu" (Menu iniziale) o "Calibration" (Calibrazione), a seconda del tempo trascorso dal completamento dell'ultima calibrazione.




**Figura 5.1.3**

Icona Desktop VISION

Se nelle ultime 12 ore è stata completata una calibrazione, il software apre la pagina dell'Home Menu (Menu iniziale).

Per garantire una qualità di immagine ottimale, Hologic consiglia di calibrare il sistema ogni giorno alla prima messa in funzione o se il sistema è stato spostato.

Per avviare manualmente la calibrazione, fare clic sul pulsante **Calibrate** (Calibra) nell'Home Menu (Menu iniziale), quindi fare clic sul pulsante **Start Calibration** (Inizia calibrazione). Il software tornerà all'Home Menu (Menu iniziale) al termine della calibrazione. Vedere le Figure 5.1.4 e 5.1.5.

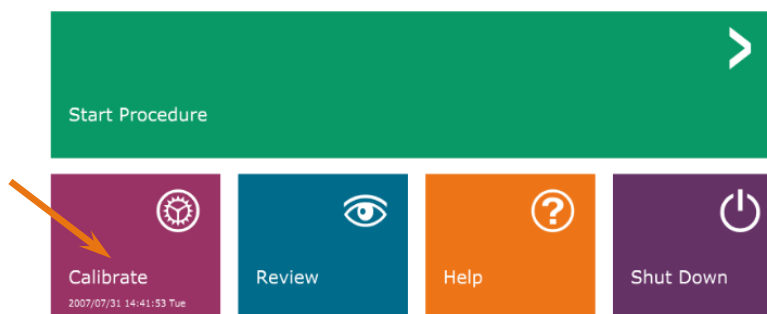


**Figura 5.1.4**

Pulsante Start Calibration (Inizia calibrazione)

## Calibra

⚠ **NOTA:** per una qualità ottimale dell'immagine si consiglia di calibrare il sistema almeno una volta al giorno, prima del primo utilizzo, o dopo uno spostamento del sistema.

- Il software si aprirà alla schermata Calibration (Calibrazione) se sono trascorse 12 ore dall'ultima calibrazione.
- Premere il pulsante **Start Calibration** (Avvia calibrazione) per consentire al sistema di completare la calibrazione.

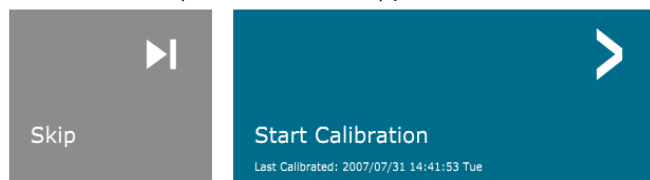

ENSURE THE CHAMBER IS EMPTY BEFORE CALIBRATION

Calibration before beginning any procedure is recommended

## 5.1.2 Calibrazione

**Figura 5.1.5**  
Pulsante Start Calibration (Avvia calibrazione)

- L'avanzamento della calibrazione appare nella finestra di dialogo Calibration (Calibrazione).




**Figura 5.1.6**  
Finestra di dialogo calibrazione raggi X

- La finestra di dialogo si chiude al termine della calibrazione. Il software si aprirà alla pagina dell'Home Menu (Menu iniziale).

## Avvio di una procedura di imaging

- Dalla pagina dell'Home Menu (Menu iniziale) (vedi Figura 5.1.4) selezionare il pulsante **Start Procedure** (Avvia procedura).
- L'utente può scegliere tra **Select from Worklist** (Seleziona da elenco di lavoro), **Manual Entry** (Inserimento manuale), **Select from Database** (Seleziona da database) o **Continue with current patient** (Continua con il paziente corrente). Vedere la Figura 5.2.1.

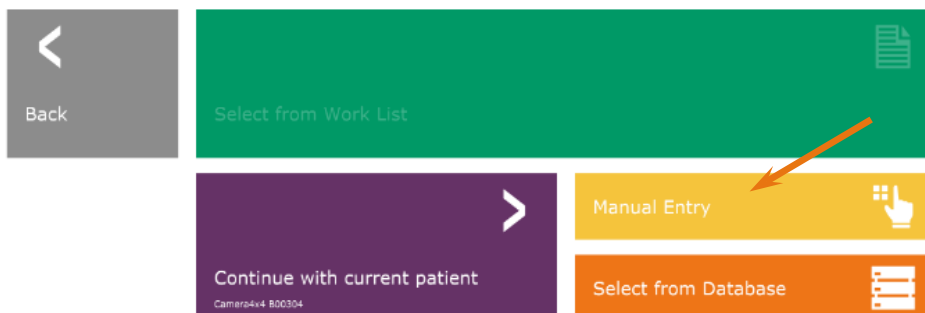

## 5.2.0 Acquisizione immagini

**Figura 5.2.1**  
Pulsanti inserimento dati paziente

Per inserire manualmente una nuova procedura, selezionare il pulsante **Manual Entry** (Inserimento manuale).

✎ **NOTA:** questa sezione riguarda solo l'“Inserimento manuale” dei dati del paziente, mentre le altre opzioni sono trattate nella sezione 6 del presente manuale.

Si apre la finestra di dialogo “Patient Information Editor” (Editor informazioni paziente).

## 5.2.1 Inserimento manuale dei dati del paziente

**Figura 5.2.2**  
Editor di informazioni per  
l'imaging

✎ **Nota:** i campi obbligatori sono indicati da un asterisco bianco (\*). I campi obbligatori predefiniti sono: Patient Name (Nome paziente), Patient ID (ID paziente), Accession Number (Numero di accesso) e Laterality (Lateralità).

Inserire tutti i campi obbligatori. Se tutti i campi obbligatori sono compilati, si attiva il pulsante **Accept** (Accetta). L'utente può decidere se compilare altri campi.

✎ **Nota:** la data deve essere inserita nel formato aaaa/mm/gg (es. 1962/08/13).


Selezionare **Accept** (Accetta) per abilitare l'acquisizione delle immagini.

Il sistema è pronto per acquisire le immagini.


## Acquisizione di un'immagine/inizio dell'esposizione ai raggi X

Per acquisire un'immagine radiografica con il sistema Faxitron Core:

- Aprire il cassetto della camera a raggi X premendo il pulsante **nero** e posizionare il vassoio Faxitron Core con i campioni nel cassetto. Chiudere il cassetto premendo nuovamente il pulsante **nero**.
- Premere il pulsante verde **Start X-Ray** (Avvia raggi X) sul pannello di controllo o sul software.
- Attendere la visualizzazione dell'immagine.

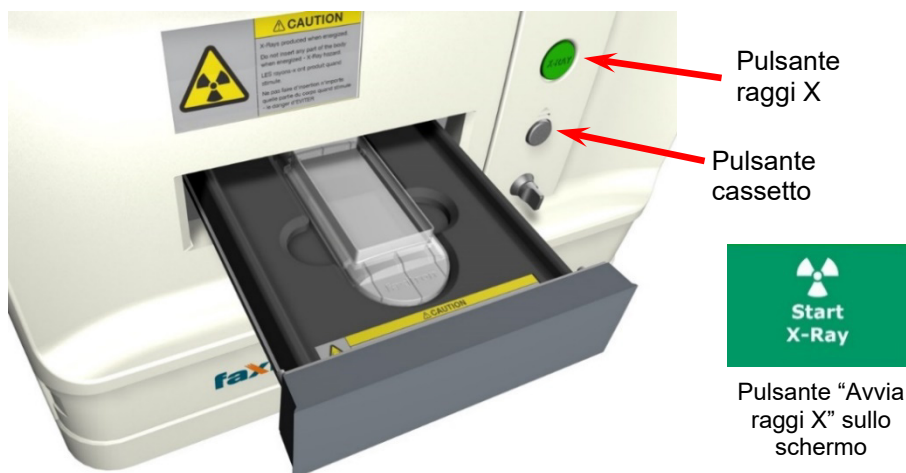

**Figura 5.2.3**  
Cassetto Faxitron Core

 **NOTA:** la modalità radiografica predefinita per Faxitron Core è Full Auto (Automatico). Il sistema esegue due radiografie, la prima per ottenere le impostazioni ottimali e la seconda per catturare l'immagine. Le impostazioni utilizzate durante l'esposizione vengono visualizzate sul display LCD dell'armadio.

Il software Vision è configurato per salvare automaticamente l'immagine nel database Faxitron sull'unità locale del computer di sistema. L'utente può anche salvare l'immagine sul server della struttura facendo clic sull'icona "PACS". Vedere le sezioni 6.4.1, 6.6.0 e 6.7.0 per ulteriori informazioni sul salvataggio delle immagini.

Per ulteriori informazioni sulla regolazione delle impostazioni dell'immagine, sui controlli radiografici e sulle opzioni di revisione e salvataggio, consultare la Sezione 6.


## Uscita dal software VISION

Fare clic sul pulsante **Shut Down** (Spegni), quindi sul pulsante **OK** per spegnere il computer. Lo spegnimento può essere selezionato anche nella schermata del menu iniziale o nella schermata di acquisizione immagini utilizzando il pulsante mostrato di seguito.

Pulsante **Shut Down** (Spegni) dalla schermata Acquisition (Acquisizione).



Pulsante **Shut Down** (Spegni) dall'Home Menu (Menu iniziale).

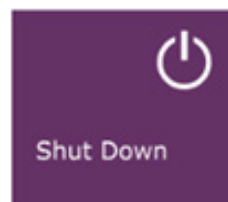

## 5.2.3 Spegnimento del sistema

**Vedere le Figure 5.3.1 e 5.3.2.**  
Pulsanti di arresto del sistema e di uscita dal programma

## Spegnimento dell'armadio radiologico Faxitron Core

Una volta che il computer è spento, spegnere l'interruttore a chiave (chiave in posizione verticale).

# 6

## SEZIONE 6


### **Software Vision**

### **Funzionamento**

Il software Vision è un pacchetto completo di acquisizione ed elaborazione delle immagini, progettato esclusivamente per funzionare con i generatori di raggi X Hologic (come i sistemi VersaVision, Faxitron Path, Faxitron Core e Faxitron OR). Oltre alle funzioni di acquisizione ed elaborazione, il software offre un ampio modulo di database che consente il controllo utente, la manutenzione dell'archiviazione, la memorizzazione, la schedatura e il recupero delle immagini. Il software è inoltre conforme allo standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), consentendo il salvataggio e la stampa delle immagini del Paziente in formato DICOM 3.0. Il software è stato preinstallato sul computer fornito con il sistema radiografico.

Per una migliore qualità dell'immagine, è necessario calibrare il sistema all'inizio di ogni nuovo giorno di utilizzo. Per garantire una qualità ottimale dell'immagine, è possibile eseguire la calibrazione in qualsiasi momento.


Dopo la calibrazione, viene visualizzato il Menu iniziale, che permette la navigazione verso tutte le altre aree del software. Per facilitarne l'uso, sono presenti dei pulsanti per le applicazioni. Vedere la Figura 6.0.1. Questi pulsanti si trovano al centro dello schermo. Le relative descrizioni e definizioni sono illustrate nelle sezioni seguenti del manuale.

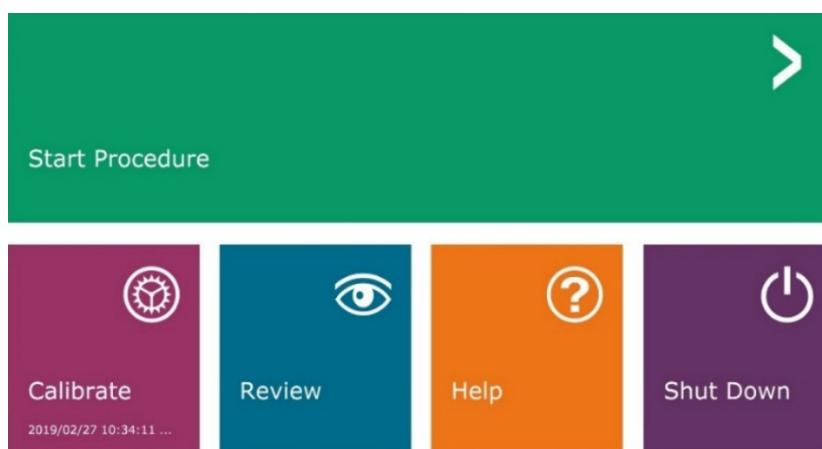

**Figura 6.0.1**  
Software Vision  
Menu iniziale (schermata di avvio)

## Protocollo di sequenza

Per garantire la corretta funzionalità del sistema e qualità dell'immagine, seguire questa sequenza di avvio:

- Accendere il sistema Faxitron Core utilizzando l'interruttore posto sul retro dell'armadio. (L'interruttore di alimentazione si trova accanto alla presa del cavo di alimentazione.) Premere "I" per "Accendere" e "0" per "Spegner".
- Accendere il sistema Faxitron Core inserendo la chiave Faxitron Core nell'interruttore fisico con chiave, situato sul pannello frontale, e ruotandolo in senso orario in posizione ore 3.  
 **Nota:** la chiave non può essere rimossa in questa posizione.
- Accendere il computer e il monitor.
- Fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona **Vision Software** (che si trova sul desktop di Windows) se Vision non si avvia automaticamente. Vedere la Figura 6.1.1. Apparirà brevemente una finestra di dialogo per indicare che il software si è inizializzato e si sta caricando.
- Il software apre la pagina del Menu iniziale (vedere Figura 6.0.1) o la pagina Calibration (Calibrazione) (vedere Figura 6.2.2) a seconda del tempo trascorso dall'ultima calibrazione del sistema.
- Per i protocolli di calibrazione, consultare la Sezione 6.2.0 "Panoramica calibrazione camera".



**Figura 6.1.1**  
Icona desktop software Vision

## 6.1.0 Avvio del software

## Introduzione alla calibrazione

Per ottimizzare la qualità dell'immagine, il software Vision e l'hardware richiedono una calibrazione periodica. Tale calibrazione richiede l'acquisizione di immagini di riferimento.

Alla prima messa in funzione del sistema, o in qualsiasi momento desiderato dall'utente, può essere richiesta ed eseguita una calibrazione del sistema. Si raccomanda di eseguire le seguenti calibrazioni dopo un periodo di dodici (12) ore.


Queste immagini di riferimento sono utilizzate per calibrare un'immagine a raggi X "grezza" pixel per pixel per generare un'immagine "corretta" da visualizzare. Le correzioni dell'immagine eseguite includono correzioni di guadagno, offset e linearità.

## Sequenza di calibrazione


Per comodità, il software Vision combina le numerose fasi di calibrazione in un singolo passaggio unificato.

Quando un sistema a raggi X Hologic è stato spento per più di dodici (12) ore, il sistema richiederà automaticamente una nuova calibrazione. Si raccomanda vivamente di ricalibrare il sistema dopo lunghi periodi di inattività o dopo che il sistema è stato spostato da una sala all'altra con impostazioni di temperatura/umidità ambientale potenzialmente diverse.

Per calibrare il sistema in qualsiasi momento, fare clic sul pulsante **Calibrate** (Calibra) nel Menu iniziale (schermata di avvio) di Vision e quindi premere **Start Calibration** (Avvia calibrazione). Vedere le Figure 6.2.1 e 6.2.2. La finestra di dialogo visualizza un messaggio di stato durante la calibrazione. Vedere la Figura 6.2.3.

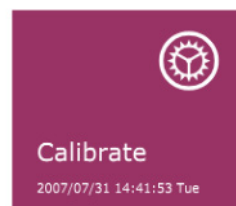

**Figura 6.2.1**  
Pulsante Menu iniziale  
calibrazione

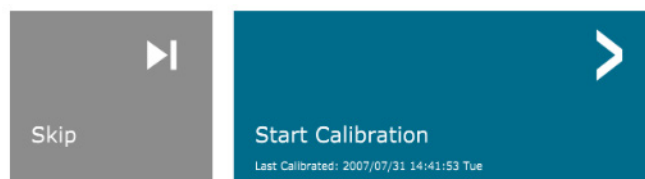

**Figura 6.2.2**  
Pulsante Inizia calibrazione

ENSURE THE CHAMBER IS EMPTY BEFORE CALIBRATION  
Calibration before beginning any procedure is recommended




**Figura 6.2.3**  
Stato calibrazione


Durante la calibrazione possono essere generati dei raggi X. Durante la generazione di raggi X, appare un pulsante **Stop X-Ray** (Arresta raggi X) per consentire all'utente di fermare i raggi X tramite il software.

Di seguito è riportato un riepilogo del protocollo di calibrazione avanzata per "Both" (Entrambi) (Campo piatto e Immagine):


Posizionare l'attenuatore uniforme sul rilevatore. L'intera superficie del rilevatore deve essere coperta dall'attenuatore. Per ottenere risultati ideali, l'attenuatore dovrebbe essere più grande dell'area di imaging del rilevatore.

Dal Menu iniziale del software di imaging, premere l'icona  in alto a destra per mettere a fuoco il menu. Selezionare la voce di menu a discesa "Tools" (*Strumenti*), nel menu orizzontale situato nella parte superiore dello schermo, e poi procedere su "Advanced Tools" (*Strumenti avanzati*) e quindi "X-Ray Calibration/Exposure Setup" (*Calibrazione raggi X/Impostazione esposizione*).

## 6.2.0 Cont.

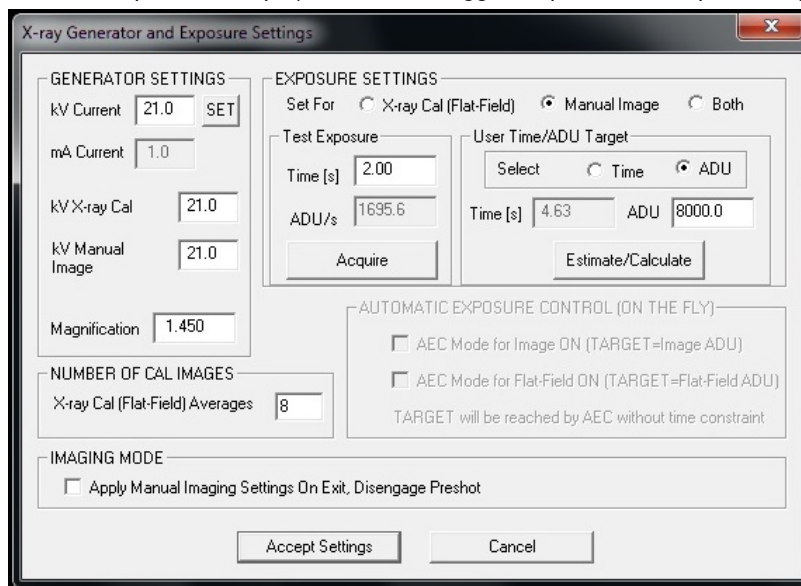

**Figura 6.2.4**  
Finestra di dialogo Generatore  
raggi X ed esposizione

 **NOTA:** i valori di kV, tempo di esposizione e ADU/s possono differire da quelli indicati.

- In "X-Ray Generator and Exposure Settings" (Impostazioni generatore di raggi X ed esposizione), inserire l'impostazione kV del generatore nel campo appropriato.
- Lasciare "Magnification" (Ingrandimento) all'impostazione predefinita di 1.450. (L'ingrandimento è fisso nel sistema Faxitron Core).
- Selezionare il pulsante "Set For" (Imposta per) "Both" (Entrambi) nella finestra di dialogo.
- Lasciare l'impostazione predefinita "user ADU target" (target ADU utente). L'esposizione ai raggi X termina quando il rilevatore ha accumulato un livello medio di segnali ADU accettabili per il generatore di raggi X di cui si dispone.
- Lasciare il tempo di esposizione predefinito di prova e fare clic sul pulsante **Acquire** (Acquisisci). Il sistema avvia automaticamente i raggi X e acquisisce un'immagine.
- Quando l'esposizione ai raggi X è completa, fare clic sul pulsante **Estimate/Calculate** (Stima/Calcola).
- Registrare la lettura del tempo "Time [s]" (Tempo [s]) di esposizione calcolata. Il sistema calcola questo tempo e il numero è visualizzato in grigio.
- Inserire la lettura del tempo "Time [s]" (Tempo [s]) di esposizione calcolata nella casella del tempo "Test Exposure" (Esposizione di prova). Premere il pulsante **Acquire** (Acquisisci) per avviare automaticamente i raggi X e ottenere un'immagine.
- Quando l'esposizione ai raggi X è completa, fare clic sul pulsante **Estimate/Calculate** (Stima/Calcola).
- Registrare la lettura del tempo "Time [s]" (Tempo [s]) di esposizione calcolata.
- Inserire nuovamente la lettura del tempo di esposizione calcolata nella casella del tempo "Test Exposure" (Esposizione di prova).



- Fare clic sul pulsante **Accept Settings** (Accetta impostazioni).
- Eseguire una procedura di calibrazione standard, come descritto nella sezione "Panoramica calibrazione camera".

Gli utenti esperti potrebbero voler impostare "X-Ray Cal (Flat Field)" (Cal. raggi X [Campo piatto]) e "Manual Image" (Immagine manuale) "Exposure Settings" (Impostazioni di esposizione) in modo indipendente oppure "Both" (Entrambi) (Campo piatto e Immagine manuale) come descritto in precedenza. Selezionando il pulsante di opzione "Flat Field" (Campo piatto), il sistema determina il tempo di esposizione ottimale per l'acquisizione di immagini Campo piatto al livello ADU desiderato. Di conseguenza, la selezione di "Manual Image" (Immagine manuale) determina il tempo di esposizione ottimale per il sistema con un oggetto che attenua il segnale dei raggi X. Per ottenere risultati ottimali, l'intera area di imaging del rilevatore deve essere coperta dall'oggetto.

Dopo aver selezionato "X-Ray Cal (Flat Field)" (Cal. raggi X [Campo piatto]) e "Manual Image" (Immagine manuale) e aver impostato il livello ADU, selezionare il pulsante **Acquire** (Acquisisci). Per la selezione "Manual Image" (Immagine manuale), è preferibile avere l'oggetto o l'attenuatore di raggi X nel fascio radiogeno. Premere il pulsante **Acquire** (Acquisisci) per generare i raggi X e ottenere un'immagine. Quando l'esposizione ai raggi X è completa, fare clic sul pulsante **Estimate/Calculate** (Stima/Calcola). Il sistema calcola il tempo ottimale e il numero è visualizzato in grigio. Fare clic sul pulsante **Accept Setting** (Accetta impostazioni) per salvare le "Exposure Settings" (Impostazioni di esposizione) nel file di configurazione del sistema.




**Nota:** vengono salvate solo le impostazioni per il pulsante di opzione selezionato.

Eseguire quindi una procedura di calibrazione standard, come descritto nella sezione "Panoramica calibrazione camera".

Talvolta può essere opportuno integrare le caratteristiche di attenuazione dei raggi X di un attenuatore uniforme nelle immagini di calibrazione di riferimento in campo piatto. Ad esempio, se tutti gli oggetti da acquisire sono posizionati su una lastra di plastica sottile, le caratteristiche di attenuazione dei raggi X della lastra saranno osservate in ogni immagine acquisita. In questo caso, collocare la lastra nel fascio radiogeno durante l'acquisizione delle immagini di riferimento di calibrazione in campo piatto potrebbe migliorare la qualità dell'immagine.

Il pulsante **Start Procedure** (Avvia procedura) (vedere Figura 6.0.1) porta l'utente alla pagina Inserimento dati paziente, che indica le modalità di inserimento dei dati del paziente. Se non è stato configurato un elenco di lavoro, l'opzione risulta disabilitata e sono disponibili solo le opzioni **Continue with Current Patient** (Continua con il paziente corrente), **Manual Entry** (Inserimento manuale) e **Select from Database** (Seleziona da database). Le opzioni sono spiegate nelle sezioni successive.

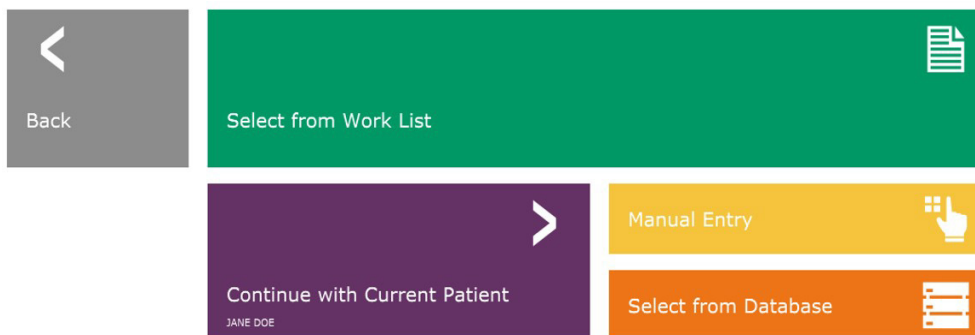

**Figura 6.3.1**  
Schermata Inserimento dati  
paziente

## 6.2.1 Calibrazione avanzata

## 6.3.0 Dati paziente

**Seleziona da elenco di lavoro (modalità elenco di lavoro remoto)**

Se è stato configurato un elenco di lavoro, l'utente può cliccare sul pulsante **Select from Work List** (Seleziona da elenco di lavoro) che mostra la pagina illustrata in Figura 6.3.2.

**Worklist**

**Search Paramet...**

Patient Name

Patient ID

Birth Date

Proc. Start Date **2019/04/15**

Accession No.

Modality

Perf. Physician

Station AE Title **FAXITRON\_DR**

Station Name

Patient ID	Accession #	Patient Name	Birth Date	Sex	Modality	Rt
AV35671	00001	KRISTY^KAITLYN	1678/03/04	F	MG	SA
AV35672	00002	GARCIA^MARIA	1678/03/04	F	MG	NE
AV35673	00003	SMITH^MARY	1678/03/04	F	MG	FA
AV35674	00004	HOUSTON^CARLA	1732/04/31	F	MG	NI
AV35675	00005	DOE^JANE	1678/03/04	M	MG	FA

**Save to Database**

**Query**

**Submit**

**Back**

**NOTA:** tutti i dati dei pazienti sono fittizi. Qualsiasi somiglianza con le persone reali è una pura coincidenza.

A sinistra vi sono vari filtri che possono essere utilizzati per cercare le procedure programmate per la stazione dell'entità applicazione (AE). Verificare che il titolo della stazione AE sia definito, quindi ogni singolo campo o qualsiasi combinazione di campi può essere utilizzato come filtro per la ricerca delle procedure programmate per l'AE. Selezionando il pulsante **Query** (Ricerca), situato nell'angolo in basso a sinistra, la tabella viene ripopolata con le voci che corrispondono alle informazioni richieste.


L'utente può quindi fare clic su qualsiasi voce e premere **Submit** (Invia) per popolare automaticamente l'Editor di informazioni per l'imaging con le informazioni del paziente.

**AVVISO:** l'utente può anche fare doppio clic su qualsiasi voce della tabella per accedere rapidamente all'Editor di informazioni per l'imaging senza dover premere **Submit** (Invia).


L'Editor di informazioni per l'imaging (finestra di dialogo Informazioni sul paziente) si apre. Vedere la Figura 6.3.3. Compilare i restanti campi obbligatori e cliccare su **Accept** (Accetta) per procedere all'acquisizione dell'immagine.


**6.3.1****Seleziona da  
elenco di lavoro****Figura 6.3.2**

Finestra di ricerca Modalità elenco di lavoro


 **Nota:** i campi obbligatori sono indicati da un asterisco bianco (\*). I campi obbligatori predefiniti sono: nome del paziente, ID paziente, numero di accesso e lateralità.

L'utente deve inserire tutti i campi obbligatori prima di poter selezionare il pulsante **Accept** (Accetta). Se lo si desidera, l'utente può anche inserire la data, il medico di riferimento, il nome della procedura, il sesso, il tecnico, la vista della posizione, la parte del corpo e l'ID dello studio. Il nome della procedura, la vista della posizione e la parte del corpo sono scelti da un menu a discesa.

 **Nota:** la data deve essere inserita nel formato aaaa/mm/gg (es. 1962/08/13). Il mancato inserimento di una data valida può causare errori quando si tenta di recuperare le immagini.

 **Nota:** i "campi obbligatori" possono essere modificati o eliminati a seconda dell'applicazione. Contattare il supporto Hologic per ulteriori informazioni.

Selezionare **Accept** (Accetta) per continuare o **Start a New Patient or Procedure** (Avvia nuovo paziente o procedura) per tornare alla pagina di Inserimento dati paziente.

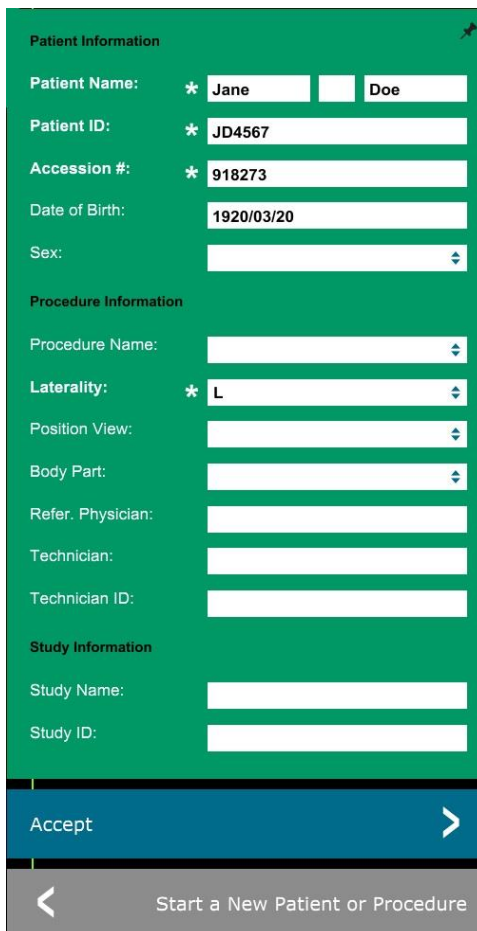

### 6.3.1 Cont.

**Figura 6.3.3**

Editor di informazioni per l'imaging

## Continue with Current Patient (Continua con il paziente corrente)

Fare clic su questo pulsante **per continuare la procedura del paziente corrente**. Si apre l'"Editor di informazioni per l'imaging". Vedere la Figura 6.3.3. Seguire la procedura e le note di cui sopra.

### 6.3.2

## Continua con il paziente corrente

## Manual Entry (Inserimento manuale)

Fare clic su questo pulsante per inserire **manualmente** una nuova Procedura. Si apre l'"Editor di informazioni per l'imaging". Vedere la Figura 6.3.3. Seguire la procedura e le note di cui sopra.

### 6.3.3

## Inserimento manuale

**Select from Database (Seleziona da database)**

Premendo il pulsante **Select from Database** (Seleziona da database) si visualizza la pagina seguente. Vedere la Figura 6.3.4 di seguito.

**Database**

Patient ID	Last Name	First Name	Middle Name	Time Modified	Date of Birth
DJ9856	DOE	JENNIFER		2019/03/22 12:4...	1935/05/0
JD4587	DOE	JANE		2019/03/22 12:5...	1920/03/0
JD56	DOE	JAN		2019/03/22 12:4...	1932/02/1

**Search Parameters:**

Patient ID:

Last Name:

First Name:

Middle Name:

Time Modified:

Date of Birth:

Sex:

**Accept**

**Back**

**NOTA:** tutti i dati dei pazienti sono fittizi. Qualsiasi somiglianza con le persone reali è una pura coincidenza.

**6.3.4****Seleziona da database****Figura 6.3.4**

Selezione paziente dalle voci del database locale

Selezionare un paziente dalla tabella sul lato destro della pagina e quindi fare clic sul pulsante **Accept** (Accetta) che apre l'Editor di informazioni per l'imaging. ( **Nota:** l'utente può anche fare doppio clic sulla voce nella tabella per aprire l'Editor di informazioni per l'imaging.) Quindi seguire la procedura e le note a pagina 6-7.

**Nota:** utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le informazioni paziente nascoste.


Vision consente all'utente di restringere l'elenco dei pazienti inserendo informazioni specifiche nella finestra "Search Parameters" (Parametri di ricerca) sul lato sinistro della pagina. In questo modo vengono visualizzati solo i pazienti che corrispondono a tutti i parametri di ricerca.

Se l'utente desidera modificare o visualizzare le informazioni dopo averle inserite, ma prima di acquisire le immagini, può fare clic sull'icona **Patient Data** (Dati paziente) nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Vedere la Figura 6.3.5.




### 6.3.5 Icona dati paziente

**Figura 6.3.5**  
Icona dati paziente

Si apre la finestra di Modifica delle informazioni paziente/imaging. Questa finestra di modifica si popola con tutte le informazioni precedentemente inserite/selezionate. Vedere la Figura 6.3.6.  Nota: la finestra di Modifica include ora un pulsante **Cancel** (Annulla).

L'utente può modificare o aggiungere informazioni come desiderato e poi cliccare su:

- Il pulsante **Accept** (Accetta) per salvare le modifiche e continuare con l'acquisizione delle immagini;
- Il pulsante **Cancel** (Annulla) per annullare le modifiche e continuare l'acquisizione delle immagini. Il software ritorna alle informazioni originali sul paziente inserite, oppure
- Il pulsante **Start a New Patient or Procedure** (Avvia nuovo paziente o procedura) che riporta l'utente alla schermata di Inserimento dati paziente. Vedere la Figura 6.3.1.

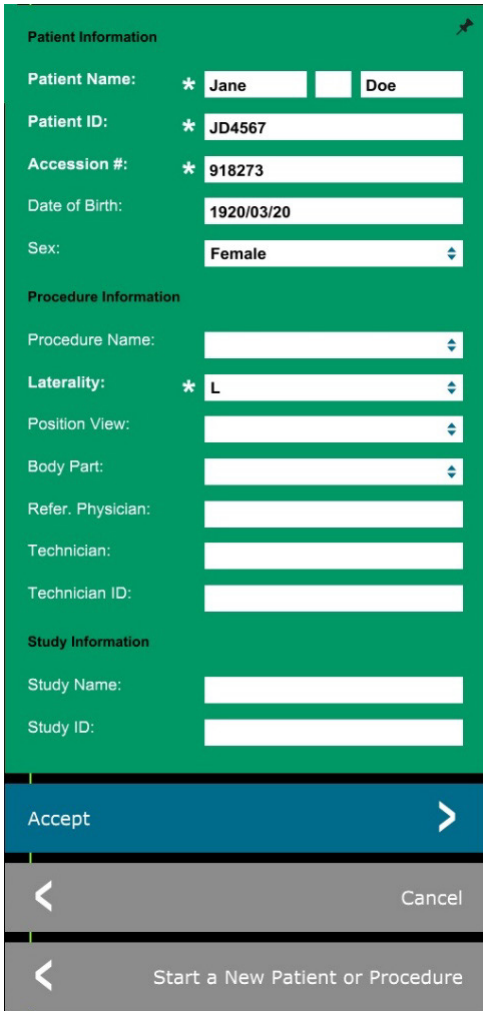

**Patient Information**

Patient Name: \* Jane Doe

Patient ID: \* JD4567

Accession #: \* 918273

Date of Birth: 1920/03/20

Sex: Female

**Procedure Information**

Procedure Name:

Laterality: \* L

Position View:

Body Part:

Refer. Physician:

Technician:

Technician ID:

**Study Information**

Study Name:

Study ID:

Accept >

< Cancel

< Start a New Patient or Procedure

**Figura 6.3.6**  
Editor di informazioni per l'imaging

Quando l'utente clicca sul pulsante **Accept** (Accetta), il sistema è pronto per l'acquisizione di immagini/raggi X.

I raggi X vengono avviati premendo il pulsante verde **Start** (Avvia) sulla parte anteriore dell'armadio Faxitron Core oppure facendo clic sul pulsante **Start X-Ray** (Avvia raggi X) nell'angolo in basso a destra dello schermo. Vedere la Sezione 5.2.2, *Avvio dell'esposizione*. Il sistema effettua una breve radiografia "campione", o un pre-scatto (spiegato nella Sezione 6.4.4), seguita da un'esposizione più lunga per acquisire l'immagine. Il software elabora l'immagine prima che venga visualizzata sullo schermo del monitor. Una volta visualizzata l'immagine, i pulsanti sul lato sinistro e destro dello schermo, descritti in questa sezione, vengono attivati.

L'utente può visualizzare ma non modificare le informazioni paziente dopo aver acquisito un'immagine cliccando sull'icona Patient Data (Dati paziente) mostrata in Figura 6.3.5. Viene visualizzata una finestra di dialogo Informazioni paziente modificata, come nella Figura 6.3.7. Questa finestra contiene due pulsanti: Close Dialog (Chiudi finestra) oppure Start a New Patient or Procedure (Avvia nuovo paziente o procedura). L'utente può visualizzare ma non modificare le informazioni paziente dopo aver acquisito un'immagine cliccando sull'icona Patient Data (Dati paziente) mostrata in Figura 6.3.4. Viene visualizzata una finestra di dialogo Informazioni paziente modificata, come nella Figura 6.3.7. Questa finestra contiene due pulsanti: "Close Dialog" (Chiudi finestra) oppure "Start a New Patient or Procedure" (Avvia nuovo paziente o procedura).

### 6.3.5 Cont.

**Figura 6.3.7**

Finestra di dialogo Informazioni paziente dopo l'acquisizione delle immagini



**Figura 6.3.8**

Finestra di dialogo Proprietà immagine

Dopo aver acquisito un'immagine, le proprietà dell'immagine corrente possono essere visualizzate premendo l'icona (i) nell'angolo in alto a destra. Vedere la Figura 6.3.8. La finestra di dialogo Proprietà immagine viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'immagine. La casella è semitrasparente per permettere di vedere l'immagine sottostante. Vedere la Figura 6.3.9.

**Figura 6.3.9**


Proprietà immagine (solo visualizzazione)

Il software Vision fornisce vari strumenti e menu per controllare i diversi attributi o parametri dell'immagine, l'acquisizione con raggi X, la visualizzazione delle immagini, gli strumenti immagine e le impostazioni/accesso DICOM. Gli strumenti usati più spesso si trovano in una Barra degli strumenti. La Barra degli strumenti e i Menu sono descritti più nel dettaglio nelle pagine seguenti.

Il software Vision consente di accedere con un solo clic a una serie di strumenti o funzioni di uso comune attraverso una barra degli strumenti verticale sul lato sinistro dello schermo. Descrizioni più dettagliate sono riportate nelle pagine seguenti. Vedere la Figura 6.4.1.

## 6.4.0 Barra degli strumenti e menu

### 6.4.1 Barra degli strumenti laterale

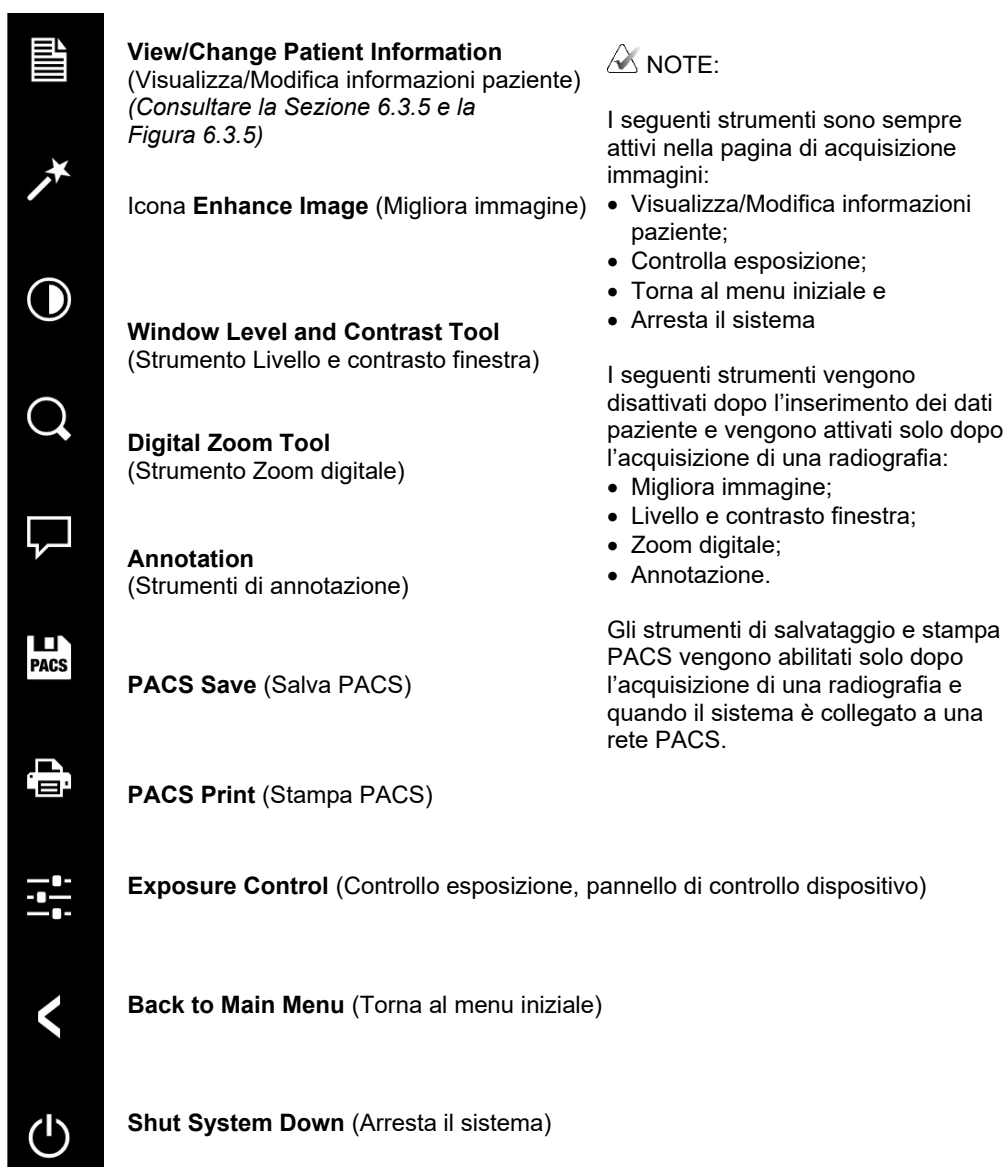

**Figura 6.4.1**  
Barra degli strumenti laterale

## Migliora immagine

### 6.4.1 Cont.

Il pulsante mostrato in Figura 6.4.2 consente di elaborare l'immagine sul display per evidenziare i dettagli più piccoli, come le microcalcificazioni e le piccole masse, presenti nell'immagine.



**Figura 6.4.2**

*Icona Migliora immagine*

L'algoritmo, comunemente noto come "Equalizzazione periferica" o "Equalizzazione dello spessore" nell'imaging avanzato, viene applicato all'intera immagine. Oltre a questo algoritmo, Hologic utilizza un secondo algoritmo sviluppato internamente chiamato "Evidenzia calcificazione". Questo algoritmo secondario è stato realizzato per evidenziare i piccoli dettagli dell'immagine e renderli molto più facili da vedere e analizzare.

Poiché le immagini paziente costituiscono una categoria più generale, in termini di possibili geometrie e varietà di spessore, possono esserci alcune geometrie campione impegnative e l'utente dovrebbe usare questo strumento con attenzione.

Il sistema è inattivo (in modalità Standby) durante l'elaborazione; al termine, il pulsante rimane premuto/attivo. È possibile annullare il processo, premendo nuovamente il pulsante.




## Inversione, regolazione livello e contrasto finestra

## 6.4.1 Cont.


Il pulsante, mostrato in Figura 6.4.3, consente di aprire lo strumento di regolazione del livello e del contrasto della finestra. Questo strumento permette all'utente di regolare il livello e il contrasto della finestra dell'immagine. L'utente può anche ripristinare il Contrasto originale premendo il pulsante **Original Contrast** (Contrasto originale) oppure invertire l'immagine, premendo il pulsante **Invert** (Inverti). Quest'ultimo inverte la combinazione di colori, passando da una prevalenza del nero a una prevalenza del bianco o viceversa. Vedere la Figura 6.4.4 di seguito.

L'utente può anche regolare la barra di scorrimento per ottenere il contrasto immagine desiderato cliccando sulla barra e spostandola verso l'alto e verso il basso, oppure cliccando su una delle frecce indicate sulla barra, per spostare i limiti di livello della finestra inferiore o superiore. Vedere la Figura 6.4.3 (Informalmente noto anche come "Livellamento finestra").

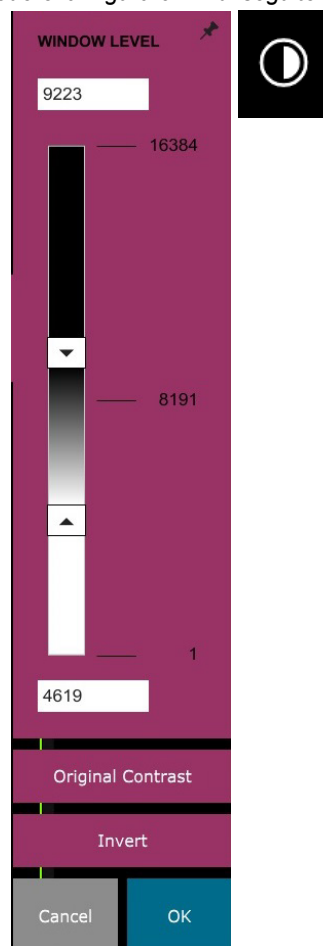

**Figura 6.4.3**  
Icona e controlli Strumento Livello  
e contrasto finestra

Di seguito è riportato un esempio di inversione:

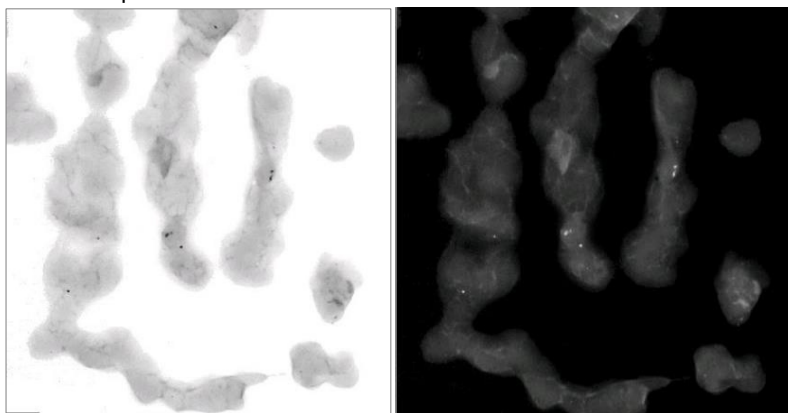

**Figure 6.4.4**  
Esempio di inversione con  
strumento Livello e contrasto  
finestra

## Regolazione dinamica dello zoom



### 6.4.1 Cont.

L'icona **Zoom Tool** (Strumento Zoom), *Figura 6.4.5*, consente di aprire lo strumento Regolazione zoom. Dopo aver aperto questo strumento, è possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di zoom o fare clic sui pulsanti **Fit to Specimen** (Adatta al campione), **Fit to Screen** (Adatta allo schermo) oppure **Zoom 1.0x** (risoluzione massima). Vedere la Figura 6.4.6. Dopo l'ingrandimento è necessaria una panoramica per spostarsi all'interno dell'immagine. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo viene visualizzata una finestra di dialogo di anteprima. Vedere la Figura 6.4.7 di seguito. Fare clic e tenere premuto il pulsante sinistro sopra l'immagine e muovere il mouse per spostare l'immagine nella schermata principale.

⚠ Si noti che tradizionalmente questa funzione è chiamata anche "Vista panoramica" e/o "Panoramica e scansione".



**Figura 6.4.5**  
Icona strumento Zoom

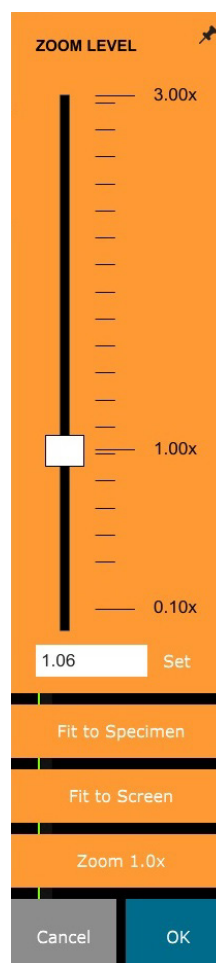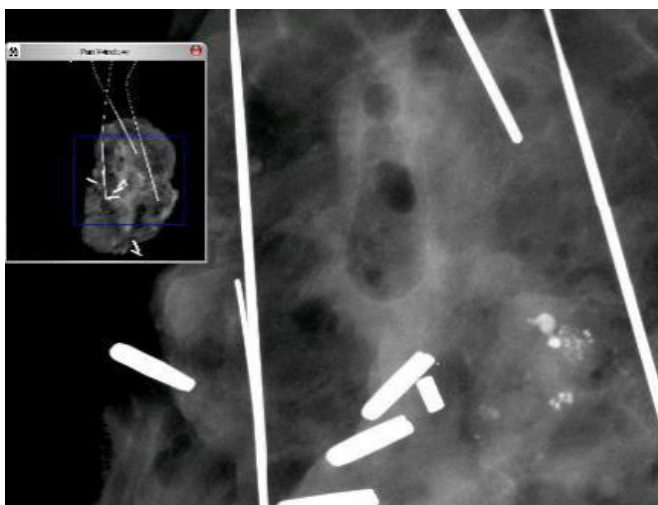

**Figura 6.4.6**  
Strumento Regolazione livello zoom

**Figura 6.4.7**  
Esempio Vista panoramica (a sinistra)

Il pulsante **Fit to Specimen** (Adatta al campione) cerca di rilevare e ingrandire il campione in modo da assicurare che il campione si veda integralmente. Se non viene rilevato alcun campione, torna per impostazione predefinita alla modalità precedente ("Adatta allo schermo" oppure "Zoom 1.0x").

**Fit to Screen** (Adatta allo schermo) adatta l'immagine allo schermo.

L'opzione **Zoom 1.0x** è tradizionalmente chiamata "Risoluzione massima", in quanto visualizza l'immagine 1:1 con la risoluzione del monitor.

## Annotazioni

Il pulsante mostrato in Figura 6.4.8 apre gli strumenti di annotazione. Questi strumenti e le loro numerose caratteristiche sono trattate più in dettaglio nella Sezione 6.8.0.



**Figura 6.4.8**  
Icona Annotazioni

## Archivio PACS

Il pulsante mostrato in Figura 6.4.9 funziona solo se il sistema è installato in una struttura sanitaria con rete PACS. Per salvare i file localmente, fare riferimento alla sezione 6.7.0.



## 6.4.1 Cont.

**Figura 6.4.9**  
Icona Archivio PACS

## Stampa PACS

Il pulsante mostrato in Figura 6.4.10 funziona solo se il sistema è installato in una struttura sanitaria con rete PACS. Per la stampa locale, fare riferimento alla sezione 6.7.0.




**Figura 6.4.10**  
Icona Stampa PACS

## Pannello di controllo dispositivo


Il pulsante mostrato in Figura 6.4.11 apre il Pannello di controllo dispositivo, che permette di controllare il sistema a raggi X attraverso il software. L'utente può facilmente selezionare la modalità di esposizione, l'impostazione kV del tubo radiogeno, il tempo di esposizione e il numero di immagini da acquisire per raggiungere una media di immagini (se lo desidera) e avviare l'esposizione ai raggi X.



**Figura 6.4.11**  
Icona Pannello di controllo dispositivo


 **NOTA:** lo stato, o disponibilità, delle Exposure Settings (Impostazioni di esposizione) è indicato dalle frecce su/giù accanto all'impostazione. Le frecce sono bianche per le impostazioni attive e blu chiaro per le impostazioni inattive. Le Exposure Settings (Impostazioni di esposizione) attive dipendono dalla Exposure Mode (Modalità di esposizione) selezionata.

La Figura 6.4.12 a destra mostra la modalità Full Manual (Manuale completa) selezionata e le impostazioni kV, Time (s) (Tempo (s)) e Image Averages (Medie immagine) attive. L'utente può regolare ciascuna di queste impostazioni.

 Si noti che l'impostazione mA nel sistema Faxitron Core non è regolabile via software e sarà sempre inattiva.

Al termine, fare clic sul pulsante **Request X-Rays** (Richiedi raggi X) per acquisire un'immagine, o sul pulsante **SET** (Imposta) per salvare le impostazioni e chiudere il Pannello di controllo dispositivo.

Se si clicca sul tasto **Cancel** (Annulla), il Pannello di controllo dispositivo si chiude senza salvare nessuna delle modifiche.

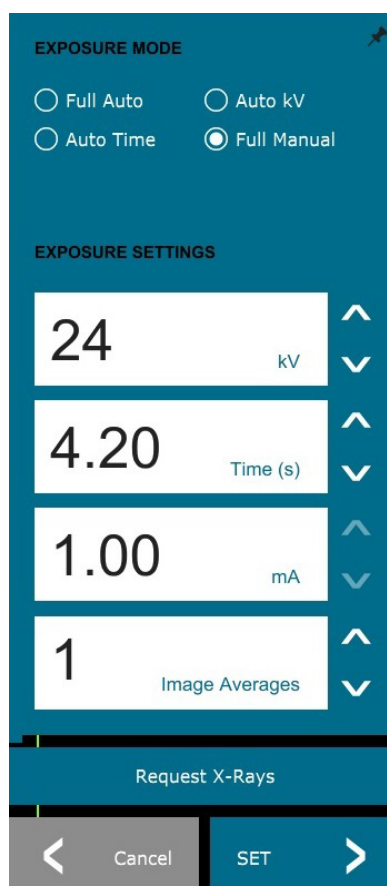

**Figura 6.4.12**  
Pannello di controllo dispositivo

### Torna alla procedura

Il pulsante mostrato in Figura 6.4.13 consente di uscire dalla modalità di acquisizione immagini e di ritornare alla schermata del Menu iniziale.



#### 6.4.1 Cont.

**Figura 6.4.13***Icona Torna al menu iniziale*

### Spegnimento

Il pulsante, illustrato in Figura 6.4.14, consente di uscire dal software e di arrestare il sistema.

**Figura 6.4.14***Icona Arresta il sistema*

### Note di dialogo aggiuntive


Quando si apre una finestra di dialogo, questa viene "agganciata" al lato sinistro dello schermo. Se si desidera deselezionare la finestra di dialogo, fare clic sull'icona a forma di puntina in alto a destra per scollegare e trascinare liberamente la finestra di dialogo. La "puntina" si trasforma in un'icona a "X" che consente una chiusura rapida.

È anche possibile navigare rapidamente tra le varie finestre di dialogo facendo clic sul menu a sinistra. In questo modo, il menu a sinistra si chiude rapidamente e apre le finestre di dialogo applicabili, a seconda dei casi.

### Barra del Menu superiore

Il software consente di accedere alle funzioni "View" (Visualizza), "Tools" (Strumenti), "Image Tools" (Strumenti immagine), "DICOM Utilities" (Utilità DICOM) e "Help" (Guida) attraverso una Barra del menu superiore. Vedere la Figura 6.4.15. La Barra del menu superiore è nascosta per impostazione predefinita e viene visualizzata facendo clic sul pulsante **Arrow** (Freccia) nell'angolo superiore destro dello schermo. Vedere la Figura 6.4.16. Il pulsante **Arrow** (Freccia) è di colore nero o bianco a seconda della pagina del software/sfondo dello schermo. Ogni voce del menu è trattata in dettaglio nelle pagine seguenti.

File Edit View Tools Image Tools DICOM Utilities Help

 **Nota:** l'icona freccia punta verso il basso quando la Barra del menu superiore è nascosta e verso l'alto quando è visualizzata.




#### 6.4.2

### Barra del Menu superiore

**Figura 6.4.15***Barra del Menu superiore***Figura 6.4.16***Pulsanti Barra del menu superiore*

### Menu View (Visualizza)

Il menu "View" (Visualizza) si trova nel Menu iniziale in alto e contiene le voci del sottomenu mostrate nella Figura 6.4.17 di seguito. Ogni voce del sottomenu è trattata in dettaglio nelle pagine seguenti.

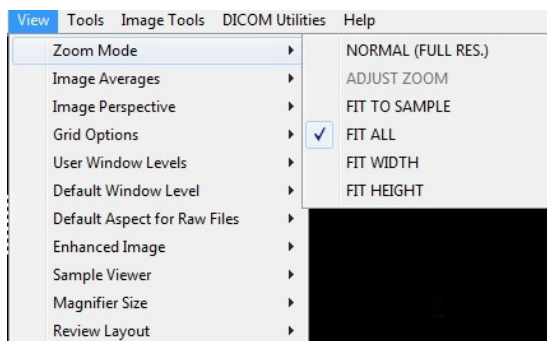

#### 6.4.3

### Menu Visualizza

**Figura 6.4.17***Menu Visualizza*

## Zoom Mode (Modalità zoom)

### 6.4.3 Cont.

### Normal (Normale)

Visualizza l'immagine acquisita nel suo formato nativo. Il formato nativo per l'immagine Faxitron Core si adatta all'interno dell'area di visualizzazione dei monitor. Se lo si desidera, l'immagine può essere ingrandita. Consultare la Sezione 6.4.1 Regolazione dinamica dello zoom.

### Adjust Zoom (Regolazione zoom)

Questa opzione è visualizzata in grigio e non è disponibile al momento.

### Fit to Sample (Adatta al campione)

Questa opzione regola l'immagine acquisita per adattare al meglio il campione all'interno dell'area di visualizzazione dei monitor.

### Fit All (Adatta tutto)

Questa opzione visualizza l'intera immagine acquisita, indipendentemente dal suo formato nativo. L'opzione Risoluzione massima non funziona in questa modalità di visualizzazione.

### Fit Width (Adatta larghezza)

Questa opzione visualizza l'immagine acquisita su tutta la larghezza disponibile dell'intera area di visualizzazione.

### Fit Height (Adatta altezza)

Questa opzione visualizza l'immagine acquisita su tutta l'altezza disponibile dell'intera area di visualizzazione.

### Image Averages (Medie immagine)

Questa opzione consente di regolare il numero di medie dell'immagine da acquisire per ogni esposizione. Le opzioni disponibili sono 1x, 2x, 4x o 8x scatti. L'impostazione predefinita è 1x scatto. Se si selezionano 2, 4 o 8 scatti, il software acquisisce il numero di immagini selezionate in sequenza con una sola pressione del pulsante di avvio e ne ricava la media in una singola immagine.


### Image Perspective (Prospettiva immagine)

Questa opzione consente di ruotare l'immagine visualizzata a 0, 90, 180 e 270 gradi di orientamento.

### Grid Options (Opzioni griglia)

Quando si visualizza un'immagine, che sia acquisita o recuperata dal database, è possibile attivare una griglia e impostarne la spaziatura (pitch). Vedere l'esempio di seguito.

#### 6.4.3 Cont.

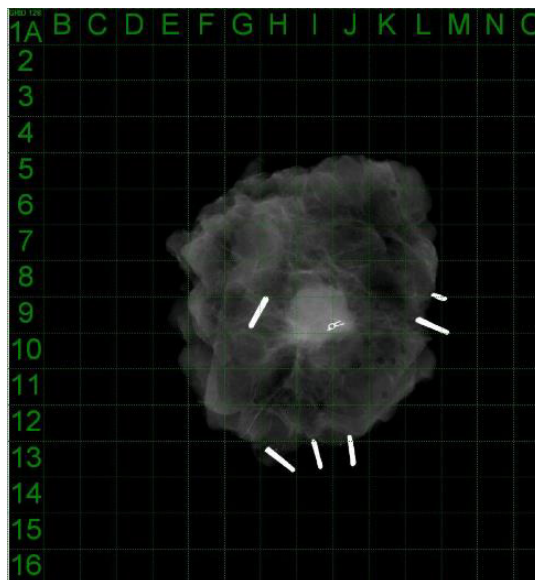

**Figura 6.4.18**  
Visualizzazione griglia campione

### User Window Levels (Livelli finestra utente)

Consente di definire fino a tre (3) livelli di finestra (WL) predefiniti e impostati dall'utente. Innanzitutto selezionare il pulsante **Window Level** (Livello finestra) e regolare il WL al livello desiderato. Dagli strumenti "View" (Visualizza), selezionare "User Window Levels" (Livelli finestra utente). Selezionare "Record current WL" (Registrare WL attuale) come UTENTE WL n. 1, n. 2 o n. 3. Il livello modificato viene salvato nella scelta precedentemente selezionata.

### Default Window Level (Livello finestra predefinito)

È possibile scegliere tra due "Default Window Levels (WL)" (Livelli finestra [WL] predefiniti). "Optimize for Whole Area" (Ottimizza per l'intera area) che adatta il WL all'immagine intera, oppure "Optimize for Sample" (Ottimizza per il campione), che adatta il WL solo all'area sotto il campione. Inoltre, vi è l'opzione "Set Default Window Level" (Impostare livello finestra predefinito) utilizzata per tutte le immagini ottenute che si trovano anche qui. Consente di impostare il livello finestra predefinito in base alle statistiche delle immagini, da farsi separatamente per le immagini potenziate e non.

### Default Aspect of Raw Files (Aspetto predefinito per file non elaborati)

Aiuta l'importazione/apertura di file immagine precedentemente salvati con attributi di file sconosciuti o dati immagine binari senza alcuna informazione di intestazione. Poiché la dimensione esatta della matrice del detettore di immagine non è disponibile nell'intestazione del file di dati immagine, per importare/aprire tali immagini sono utilizzate delle dimensioni dell'imager quanto più vicine possibile, in base al fatto che la larghezza sia maggiore o minore rispetto all'altezza (informazioni sull'aspetto predefinito).

### Migliora immagine (come il pulsante Migliora immagine)

Elabora l'immagine del paziente attuale e migliora la visualizzazione del tessuto situato vicino ai margini esterni del campione.

### Sample Viewer (Visore campione)

Il visore campione consente di alternare un visualizzatore di webcam per facilitare l'allineamento dei campioni. Non è possibile aggiungere una webcam al sistema Faxitron Core.



### Magnifier Size (Dimensione ingrandimento)

#### 6.4.3 Cont.

Consente di selezionare la dimensione dello strumento Lente di ingrandimento (vedere il menu Image Tools (Strumenti immagine)). Le opzioni sono "Small" (Piccolo), "Medium" (Medio) e "Large" (Grande).

### Review Layout (Layout revisione)

Aiuta a configurare più riquadri immagine nella Modalità revisione (Database) del programma. Le opzioni di layout disponibili sono: "(1 X 1) Singola", "(2 X 1) Doppia H", "(1 X 2) Doppia V", "(1 + (2 X 1) Tripla" e "(2 X 2) Quadrupla". Durante l'operazione a più riquadri, è possibile cliccare sul riquadro/immagine desiderati una volta per renderli la selezione corrente. La scelta è confermata dalla comparsa di un bordo verde rettangolare intorno al riquadro selezionato. Facendo doppio clic sulle immagini nella vista elenco database, o vista anteprime database, queste vengono aperte nel riquadro selezionato. Inoltre è possibile aprire le immagini nei riquadri desiderati direttamente facendo clic con il tasto destro del mouse sul menu delle viste database di cui sopra. Dopo aver attivato il menu con il tasto destro del mouse, è possibile scegliere tra i riquadri elencati in APRI IN→ che fornirà i riquadri disponibili per aprire l'immagine (a sinistra, a destra, in alto, in basso, ecc.).

#### 6.4.4 Menu Strumenti

### Menu Tools (Strumenti)

Il menu "Tools" (Strumenti) si trova nella Barra del menu superiore nell'angolo superiore a sinistra della schermata principale.

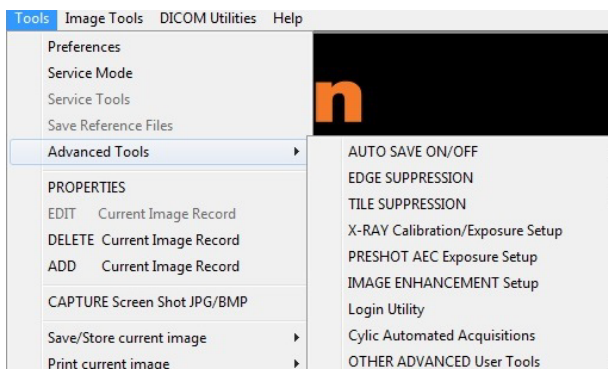


Figura 6.4.19  
Menu Strumenti

### Preferences (Preferenze)

Il menu "Preferences" (Preferenze) apre un'utilità di gestione della configurazione che può essere utilizzata per modificare varie opzioni o parametri.

**NOTA:** lo strumento "Preferences" (Preferenze) è protetto da password e può accedervi solo un rappresentante autorizzato di Hologic.

**NOTA:** la modifica dei parametri di configurazione senza un'adeguata conoscenza o autorizzazione può provocare la perdita di qualità delle immagini, danni al sistema e malfunzionamento del sistema.

### Service Mode (Modalità assistenza)

La "Service Mode" (Modalità assistenza) è protetta da password e attivata dai tecnici autorizzati Hologic per la risoluzione dei problemi.

### Service Tools (Strumenti di assistenza)

La voce "Service Tools" (Strumenti di assistenza) è visualizzata di solito in grigio. Si accende solo quando il sistema è in "Service Mode" (Modalità assistenza).

## Save Reference File (Salva file di riferimento)

### 6.4.4 Cont.

La voce *Save Reference File (Salva file di riferimento)* è visualizzata di solito in grigio. Si accende solo quando il sistema è in "Service Mode" (Modalità assistenza).

## Opzioni Advanced Tools (Strumenti avanzati)

La voce "Advanced Tools" (Strumenti avanzati) offre diverse opzioni per configurare aspetti del software come la post-elaborazione e le opzioni di configurazione.

## Auto Save (Salvataggio automatico) On/Off

Quando l'opzione *Auto Save (Salvataggio automatico)* è "on", tutte le immagini acquisite successivamente vengono salvate nel database. I file vengono scritti in una directory dati definita nel file di configurazione.

## X-Ray Calibration/Exposure Setup (Calibrazione raggi X/Impostazione esposizione)

L'opzione "X-Ray Calibration/Exposure Setup" (Calibrazione raggi X/Impostazione esposizione) si trova in Advanced Tools (Strumenti avanzati) e aiuta a determinare il tempo di esposizione corretto per un'impostazione kV selezionata per la migliore qualità dell'immagine. Per una descrizione più dettagliata consultare la Sezione 6.2.0 e la Figura 6.2.4.

## Preshot AEC Exposure Setup (Impostazione esposizione AEC pre-scatto)

Il sistema Faxitron Core utilizza il controllo automatico dell'esposizione (AEC) per fornire la migliore qualità d'immagine possibile con una sola pressione del pulsante **Start X-Ray** (Avvia raggi X). Il software utilizza un'esposizione *pre-scatto* per calcolare le impostazioni ottimali di esposizione kV e tempo. Il *pre-scatto* è un'esposizione ai raggi X breve, di solito di 2–3 secondi. Il software analizza i risultati per determinare il kV e il tempo necessari per produrre la migliore qualità dell'immagine. L'esposizione AEC pre-scatto è configurata in fabbrica ed è attivata per impostazione predefinita.

L'opzione "Preshot AEC Exposure Setup" (Impostazione esposizione AEC pre-scatto) consente di regolare il sistema per particolari esigenze di imaging o per compensare l'invecchiamento del sistema.


Per accedere alla finestra di dialogo "Preshot AEC Exposure Setup" (Impostazione esposizione AEC pre-scatto) presente nella Barra del menu superiore, selezionare "Tools" (Strumenti), "Advanced Tools" (Strumenti avanzati) e poi "PRESHOT AEC Exposure Setup" (Impostazione esposizione AEC PRE-SCATTO). Vedere la Figura 6.4.19. Si apre la finestra di dialogo Impostazione AEC pre-scatto mostrata in Figura 6.4.20.



Inserire i valori di AEC PRE-SCATTO nella finestra mostrata a destra.

Le impostazioni mostrate riflettono un'esposizione di 23 kV con un tempo di 2 secondi e un'intensità target di 8.000 ADU per l'impostazione pre-scatto. È possibile inserire la selezione dei parametri pre-scatto solo con la selezione di DYNAMIC METHOD (Metodo dinamico) (nella sezione PRESHOT ANALYSIS METHOD (Metodo di analisi pre-scatto). La selezione STATIC METHOD (Metodo statico) utilizza parametri predefiniti di Hologic. Inoltre, è possibile selezionare le impostazioni del kV e del tempo di esposizione dalla sezione EXPOSURE TUNING METHOD (Metodo di sintonizzazione esposizione).


Per immagini più accurate, l'utente può inserire lo spessore TESSUTO MORBIDO (campione) e l'INTENSITÀ TARGET in ADU.

 **Nota:** i valori mostrati sono all'interno dell'intervallo tipico di un sistema Faxitron Core, ma possono variare.

Per la modalità CONTROLLO ESPOSIZIONE AUTOMATICO, premere il pulsante **Start** (Avvia) all'interno del software Vision (o sul Pannello di controllo). Il software Vision effettua un pre-scatto (una breve pre-esposizione a bassa dose) del campione per creare una Regione di Interesse (ROI) per ottenere i parametri di esposizione per un'esposizione ottimale dell'immagine.


### Login Utility (Utilità di accesso)

L'Utilità di accesso si trova nel menu "Advanced Tools" (Strumenti avanzati) e consente di configurare e attivare l'autenticazione con password di avvio del software Vision. L'attivazione di questa funzione è opzionale sul sistema Faxitron Core. Se l'utente attiva l'autenticazione con password, ad ogni apertura del programma verrà richiesta la password. Il programma si chiude se non viene inserita la password corretta.

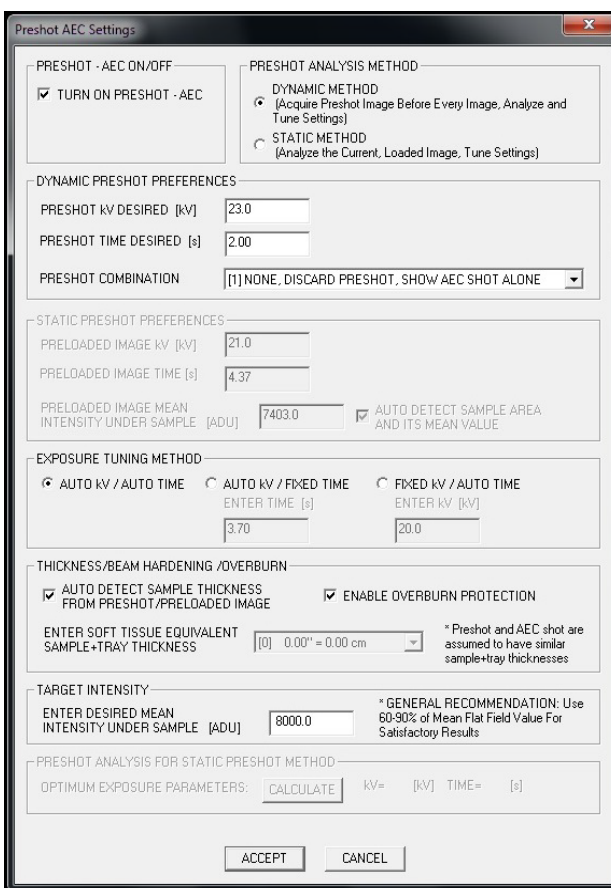

#### 6.4.4 Cont.

**Figura 6.4.20**  
Impostazione esposizione AEC pre-scatto

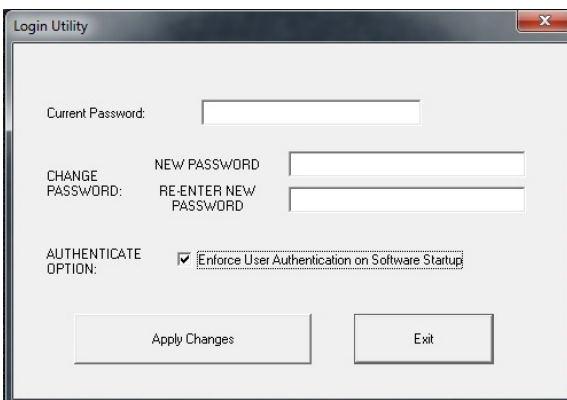

**Figura 6.4.21**  
Utilità di accesso

**Properties (Proprietà)****6.4.4 Cont.**

La voce *"Properties" (Proprietà)* nasconde o mostra il Riquadro informazioni immagine. Vedere la Figura 6.3.9.

**Edit Current Image Record (Modifica record immagine corrente)**

Attualmente non utilizzato.

**Delete Current Image Record (Elimina record immagine corrente)**

Cancella l'immagine corrente dalla directory del file, come specificato nel file di configurazione.

**Add Current Image Record (Aggiungi record immagine corrente)**

Aggiunge l'immagine corrente alla directory del file, come specificato nel file di configurazione.

**Capture Screen Shot JPG/BMP (Cattura schermata JPG/BMP)**

Selezionando questa opzione di menu, è possibile acquisire un'immagine della schermata della finestra attiva visualizzata. È possibile specificare un nome file e scegliere tra JPG e BMP come formato di salvataggio.

**Save / Store Current Image (Salva/Archivia immagine corrente)**


È possibile "sfogliare" la directory o la cartella del file in cui salvare l'immagine. Nel campo previsto è necessario assegnare un nome file. L'utente può salvare l'immagine come file di tipo BMP, JPEG, TIF, RAW Data o DICOM. Per salvare il file in formato DICOM, fare riferimento alla sezione "Funzionalità DICOM".

**Print Current Image (Stampa immagine corrente)**

Stampa l'immagine corrente con una stampante Windows.

**Image Tools (Strumenti immagine)**

Le seguenti funzioni sono disponibili per modificare l'immagine acquisita o recuperata cliccando sul menu *"Image Tools" (Strumenti immagine)*. Vedere la Figura 6.4.22. Le opzioni del sottomenu sono attivate o accessibili con un solo clic del mouse sull'opzione desiderata.

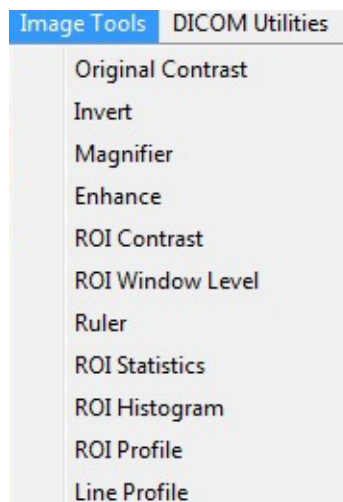**6.4.5  
Strumenti  
immagine**

**Figura 6.4.22**  
Menu Strumenti immagine

### Original Contrast (Contrasto originale)


La voce "*Original Contrast*" (*Contrasto originale*) ha la stessa funzione del pulsante **Original Contrast** (Contrasto originale) nello strumento Livello e contrasto finestra, serve cioè a ripristinare i livelli di contrasto dell'immagine. Consultare la Sezione 6.4.1 e la Figura 6.4.3.

### Invert (Inverti)

L'opzione "*Invert*" (*Inverti*) permette di invertire l'immagine visualizzata. Invertendo un'immagine si inverte anche la trasparenza, quindi le parti nere diventano bianche e quelle bianche diventano nere. Ai grigi viene assegnata la loro trasparenza speculare. Fare nuovamente clic su "*Invert*" (*Inverti*) per disattivare la funzione. Esegue la stessa funzione del pulsante **Invert** (Inverti). Fare riferimento alla Sezione 6.4.1 e alle Figure 6.4.3 e 6.4.4.

### Magnifier (Ingrandisci)

L'opzione "*Magnifier*" (*Ingrandisci*) consente di ingrandire un'area di interesse. Per utilizzare la funzione di ingrandimento, posizionare il cursore del mouse sull'area che si desidera ingrandire e fare clic con il tasto sinistro del mouse. L'area di interesse viene ingrandita. Fare nuovamente clic su "*Magnifier*" (*Ingrandisci*) per disattivare la funzione. Fare riferimento alla Figura 6.4.23. La dimensione dell'area di interesse ingrandita può essere regolata dall'utente. Fare riferimento al sottomenu "*Magnifier Size*" (*Dimensione ingrandimento*) nella sezione 6.4.3.

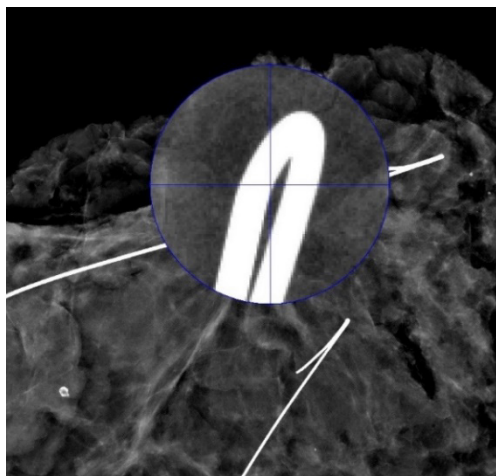

**Figura 6.4.23**  
*Ingrandisci*

### Edge Enhance (Migliora margini)

La funzione "*Edge Enhance*" (*Migliora margini*) crea una definizione più nitida intorno ai margini delle regioni con una differenza di contrasto. La funzione di miglioramento dei margini può amplificare il rumore nelle immagini in generale. Selezionando nuovamente la voce di menu, la funzione si disattiva. È possibile ripristinare l'immagine allo stato originale anche facendo clic su "*Original Contrast*" (*Contrasto originale*). Si noti che si tratta di una funzione diversa da quella di miglioramento dell'immagine descritta nelle Sezioni 6.4.1 e 6.4.3.

### ROI Contrast (Contrasto ROI)

La funzione "*ROI Contrast*" (*Contrasto ROI*) ottimizza i livelli di contrasto all'interno di una regione di interesse (ROI) definita dall'utente. Dopo aver selezionato "*ROI Contrast*" (*Contrasto ROI*), fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse nel punto iniziale della ROI desiderato, trascinare il mouse e rilasciare il tasto del mouse nel punto finale desiderato della ROI. Il contrasto si regola automaticamente ai livelli migliori per tale ROI.

### ROI Window Level (Livello finestra ROI)

Il "*ROI Window Level*" (*Livello finestra ROI*) non è disponibile nella versione corrente del software Vision.

### Ruler (Righello)

La voce "Ruler" (Righello) permette di misurare la distanza tra due punti dell'immagine visualizzata. Le misure di lunghezza sono espresse in millimetri (mm). Dopo aver selezionato "Ruler" (Righello) fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse, iniziando dal punto iniziale della misura, trascinare il mouse e rilasciare il pulsante del mouse nel punto finale della misura. Il Righello viene visualizzato come una linea rossa sull'immagine.

La misura (in mm) viene visualizzata all'estremità del righello. Il righello rimane attivo finché l'utente non seleziona un altro strumento immagine o finché non viene eseguita un'altra azione. Vedere la Figura 6.4.24. Fare nuovamente clic su "Ruler" (Righello) per disattivare la funzione.

**Suggerimento:** per ottenere una linea perfettamente orizzontale, verticale o con un angolo di 45 gradi, tenere premuto il tasto MAIUSC (sulla tastiera) mentre si tiene premuto il tasto sinistro del mouse e si trascina.

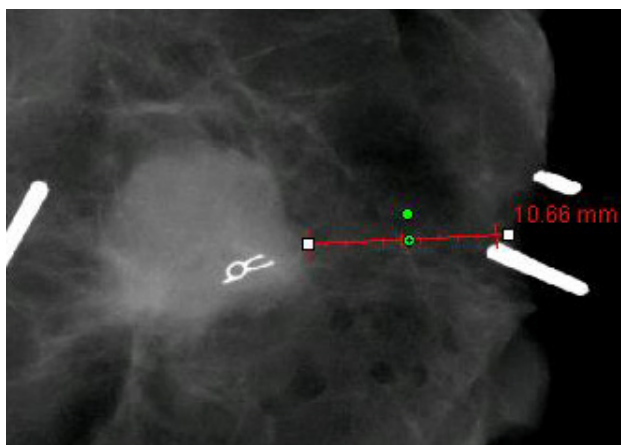


Figura 6.4.24  
Righello

### ROI Statistics (Statistiche ROI)

La voce "ROI Statistics" (Statistiche ROI) apre una finestra di dialogo contenente le statistiche dell'immagine. Fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sulla regione di interesse (ROI) dell'immagine principale, trascinare il cursore per effettuare la selezione intorno all'area, quindi rilasciare il tasto del mouse. Le informazioni statistiche per la regione selezionata vengono visualizzate sul lato sinistro della finestra di dialogo e per l'intera immagine sul lato destro della finestra. Le statistiche visualizzate sono: punti di inizio e di fine della ROI, valori di intensità minima, massima e media e deviazione standard (DS). Per chiudere la finestra di informazioni statistiche è sufficiente fare clic sul pulsante **Close** (Chiudi). Vedere la Figura 6.4.25. Fare nuovamente clic su "ROI Statistics" (Statistiche ROI) per disattivare la funzione.

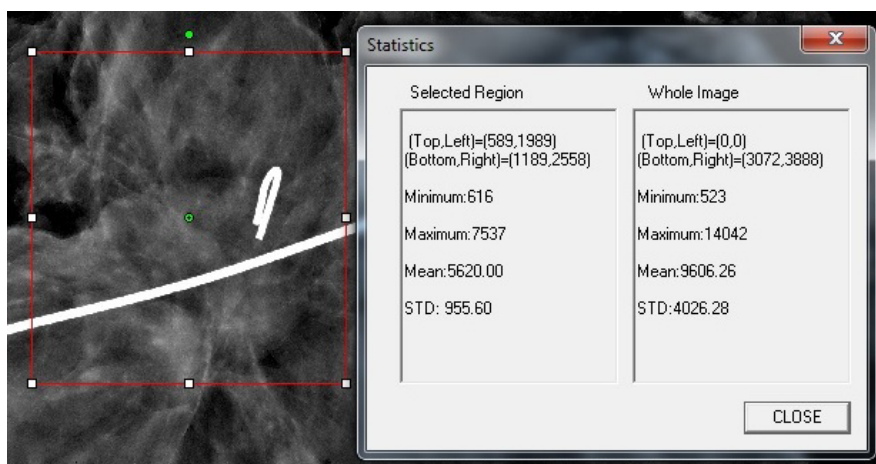


Figura 6.4.25  
Statistiche ROI

### ROI Histogram (Istogramma ROI)

#### 6.4.5 Cont.

La voce "ROI Histogram" (Istogramma ROI) crea un istogramma per una ROI definita dall'utente. Dopo aver selezionato la voce di menu, posizionare il cursore del mouse sull'immagine visualizzata, premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il cursore per selezionare la ROI desiderata. Rilasciare il tasto del mouse. Vengono visualizzati istogrammi per la ROI selezionata. Vedere la Figura 6.4.26.

La curva in nero rappresenta l'Istogramma della regione selezionata. La curva in blu rappresenta l'Istogramma dell'intera immagine. Entrambe le curve sono normalizzate rispetto al valore massimo di picco dei pixel della regione di interesse selezionata. Fare nuovamente clic su "ROI Histogram" (Istogramma ROI) per disattivare la funzione.

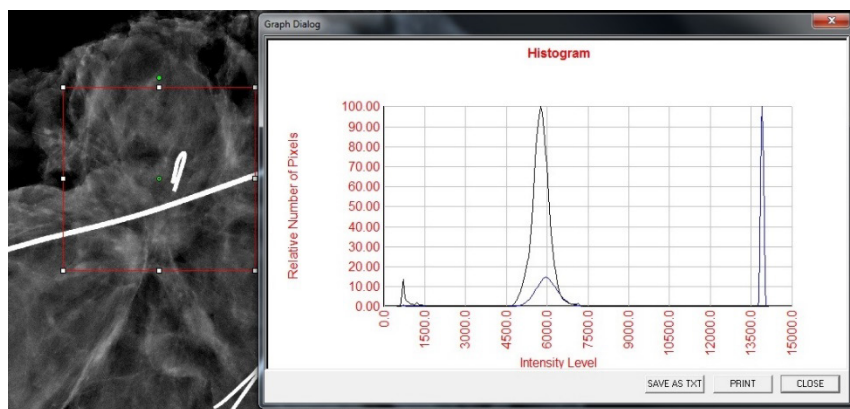


Figura 6.4.26  
Istogramma ROI

### ROI Profile (Profilo ROI)

La funzione "ROI Profile" (Profilo ROI) crea un profilo per una ROI definita dall'utente. Dopo aver selezionato la voce di menu, posizionare il cursore sull'immagine visualizzata. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostare il cursore sull'immagine per disegnare una casella definita dall'utente intorno alla ROI desiderata. Rilasciando il tasto sinistro del mouse, viene visualizzato un profilo con i valori dei singoli pixel della ROI definita. Vedere la Figura 6.4.27. Per impostazione predefinita, la direzione media della ROI selezionata è l'asse corto. L'asse può essere spostato avanti e indietro selezionando il pulsante **SWITCH, HOR<->VERT** (CAMBIA, ORIZ<->VERT). Fare nuovamente clic su "ROI Profile" (Profilo ROI) per disattivare la funzione.

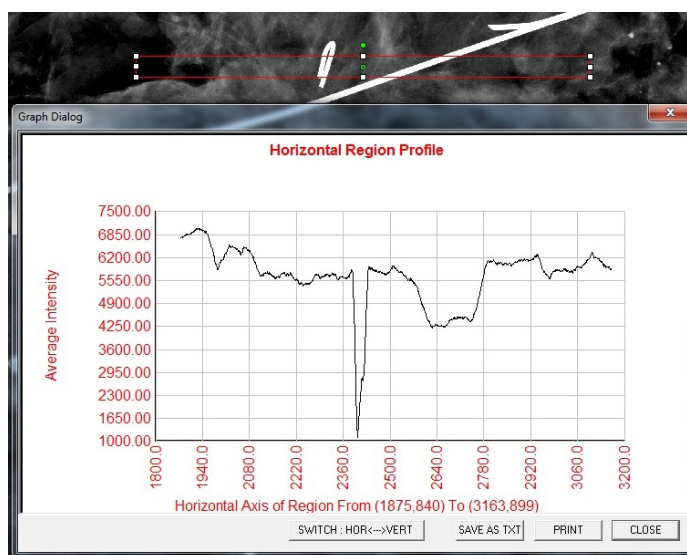



Figura 6.4.27  
Profilo ROI



### Line Profile (Profilo Linea)

#### 6.4.5 Cont.

La voce "Line Profile" (Profilo Linea) visualizza un profilo di una linea definita dall'utente. Dopo aver selezionato "Line Profile" (Profilo Linea), posizionare il cursore sull'immagine visualizzata. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostare il cursore sull'immagine per tracciare una linea definita dall'utente. Rilasciando il tasto sinistro del mouse, viene visualizzato un profilo con i valori dei singoli pixel della linea definita. *Vedere la Figura 6.4.28.* Per impostazione predefinita, il primo punto selezionato è sempre la porzione più a sinistra (vicina all'origine) del grafico (cioè l'asse orizzontale del grafico può avere indici di pixel (i,j) crescenti o decrescenti, a seconda dei punti di inizio/fine selezionati). Fare nuovamente clic su "Line Profile" (Profilo Linea) per disattivare la funzione.

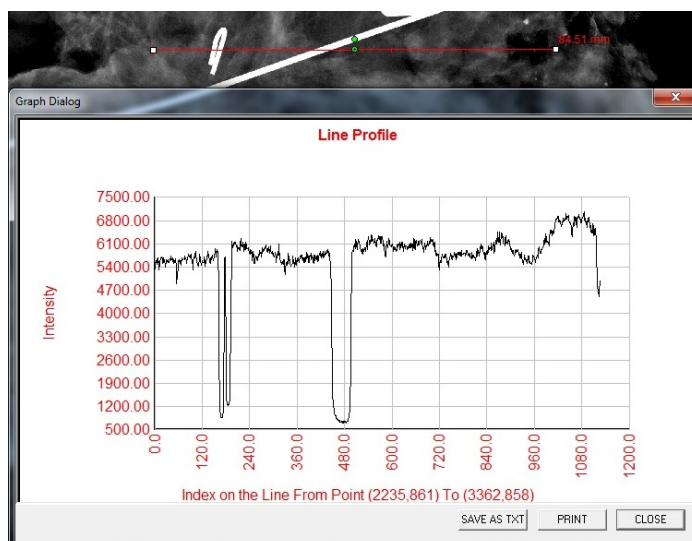

**Figura 6.4.28**  
Profilo linea

### Livello finestra incorporato

Il software Vision è dotato di una funzione di Livello finestra incorporata. Non ci sono pulsanti o voci di menu per selezionarla. La funzione Livello finestra viene attivata automaticamente ogni volta che un'immagine viene acquisita o recuperata dal database per la revisione. Questa funzione consente di regolare il contrasto e i livelli di luminosità dell'immagine utilizzando il mouse/cursore.


Fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine visualizzata e spostare il cursore su e giù per modificare il livello di luminosità. Oppure spostare il cursore a sinistra e a destra per regolare il contrasto. Spostare il cursore fino a quando l'immagine si trova ai livelli desiderati.

Premendo il pulsante, mostrato in Figura 6.5.1, situato lungo la parte inferiore della finestra di acquisizione delle immagini, appare l'anteprima delle immagini del paziente corrente. Vedere la Figura 6.5.2.



## 6.5.0 Browser immagini paziente corrente

**Figura 6.5.1**  
Icona Browser immagini  
paziente corrente

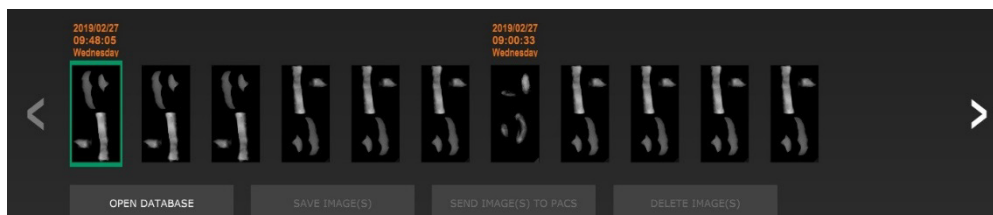

**Figura 6.5.2**  
Browser immagini paziente  
corrente



**Figura 6.5.3**  
Pulsante Database immagini

Le anteprime mostrano la data della procedura per ogni singola serie di immagini sotto forma di testo arancione nella parte superiore.

L'immagine corrente visualizzata nella finestra di acquisizione immagini viene evidenziata in verde.


Le anteprime supportano le operazioni di trascinamento per inserire le immagini nei riquadri di visualizzazione o di revisione, se necessario.

Inoltre, con un solo clic, è possibile selezionare più immagini e poi selezionare tra le varie opzioni per Salvare le immagini su una chiavetta USB, inviarle al PACS o cancellarle. Le immagini selezionate vengono evidenziate in arancione.

Vi sono delle frecce a sinistra e a destra. Nel caso in cui siano state acquisite molte immagini, è possibile scorrerle in ordine di data crescente premendo le frecce sinistra/destra.

È inoltre disponibile un'opzione **Open the Database** (Apri database) (vedere la Figura 6.5.3), che attiva la modalità di revisione. Questo pulsante equivale alla selezione **Review Mode** (Modalità di revisione) dal Menu iniziale. Vedere le Figure 6.0.1 e 6.6.1.

È possibile entrare in modalità di revisione facendo clic sul pulsante **Review** (Revisione) nella pagina del Menu iniziale, *Figure 6.6.1 e 6.0.1*, o sul pulsante **Open Database** (Apri database) nel Browser immagine corrente. Vedere la *Figura 6.5.3* di cui sopra. Facendo clic su uno di questi pulsanti si apre il Database come mostrato in *Figura 6.6.2*. Il sistema è in Standby mentre è in modalità di revisione.

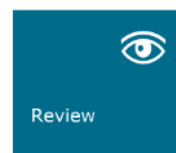

### 6.6.0 Database

**Figura 6.6.1**  
Icona Modalità di revisione  
visualizzata nel Menu iniziale

Il Database è composto essenzialmente da tre sezioni o sottofinestre. La sezione Patient List Table (Tabella elenco pazienti), in alto, la sezione Procedure List Table (Tabella elenco procedure), al centro, e la sezione Image Thumbnail List/Viewer (Elenco anteprime/visualizzatore), in basso.

**Select Patient**

Patient ID	Last Name	First Name	Middle Name	Time Modified	Date of Birth	Sex
JD6749	DOE	JAN		2019/03/27 10:45:40		
JD987	DOE	JENN		2019/03/27 10:44:31	1930/03/03	
JD123	DOE	JANE		2019/03/27 10:43:06	1920/03/27	

**Filter by Procedure(s)**

Procedure ID	Accession #	Study ID	Study Name	Procedure Time	Procedure Name	Body Part	Laterality	Position	Physician	Technician II
P201903271...	946130			2019/03/27 10...			L			

**Image Thumbnail List/Viewer**

Thumbnail	File Name	Procedure	Study	Laterality	Date/Time
	I20190327104306.DCM	P20190327104029			2019/03/27 10:43:06 Wednesday
	I20190327104230.DCM	P20190327104029			

**Figura 6.6.2**  
Database immagini



Le tabelle dell'elenco funzionano nell'ordine dall'alto verso il basso, come indicato dalla freccia:  
Elenco pazienti--->Elenco procedure--->Elenco anteprime/visualizzatore.

Quando si seleziona un campo Patient (Paziente), la finestra Procedure (Procedura) diventa attiva. La finestra Procedure (Procedura) mostra un elenco di tutte le procedure eseguite sul paziente selezionato. Inoltre, tutte le immagini corrispondenti al paziente sono visualizzate in basso a destra.

Quando si seleziona una procedura, l'elenco anteprime immagini/visualizzatore viene filtrato per mostrare solo le immagini corrispondenti alla procedura selezionata. È possibile selezionare più procedure tenendo premuto il tasto MAIUSC e facendo clic con il tasto sinistro del mouse su ciascuna procedura. Tutte le immagini per le procedure selezionate vengono visualizzate di conseguenza.

È possibile modificare l'ordine di visualizzazione nel database facendo clic sui campi in alto, come ad esempio ID paziente e Cognome. Quando si clicca con il cursore del mouse su uno dei campi del database, all'interno del campo viene visualizzato un piccolo indicatore a freccia. Utilizzando il tasto sinistro del mouse e selezionando nuovamente il campo, la freccia cambia da ascendente a discendente o viceversa. Il campo selezionato viene automaticamente ordinato di conseguenza.

Le barre di scorrimento si trovano nel database per facilitare la navigazione.

L'elenco anteprime/visualizzatore permette di cliccare sul simbolo "+" per aggiungere automaticamente l'immagine in un riquadro di revisione. Un utente può aggiungere fino a quattro immagini nei riquadri di revisione. I riquadri di revisione vengono regolati automaticamente per includere le quattro immagini.

Tutte le opzioni disponibili nel browser delle immagini del paziente corrente (vedere Figura 6.5.2) si trovano anche nella parte superiore della pagina Database. Inoltre, le opzioni aggiuntive sono descritte nella sezione 6.6.1.

**Nota importante:** le immagini "anteprima" (.PNG) sono file separati dai file di dati dell'immagine effettiva (DCM, DAT, DMM o RAW). Hanno lo stesso nome del file immagine, ma hanno un'estensione (.PNG). È possibile avere un file immagine e nessuna "anteprima". In tal caso, Vision prova a creare automaticamente un'anteprima dell'immagine da caricare nel database. Tuttavia, se questo non è possibile, l'immagine non viene visualizzata.

## Save Images (Salva immagini)

Il pulsante **Save Images(s)** (Salva immagini) è disponibile quando si seleziona una voce da Image Table (Tabella immagini) o da Thumbnail List (Elenco anteprime) oppure attraverso le immagini paziente corrente, altrimenti è disabilitato. L'immagine selezionata può essere salvata nei seguenti formati comuni di immagine a 8 bit: JPEG, BMP, TIFF e RAW. Può anche essere salvata in formato TIFF a 16 bit.


Il livello finestra dell'immagine salvata è il livello finestra predefinito. Se si desidera organizzare il livello finestra, è necessario caricare l'immagine nella Image View (Vista immagini) e stampare da qui, anziché stampare dalla finestra di dialogo del database.

## Send Image(s) to PACS (Invia immagini al PACS)

Questa funzione invia le immagini a un server DICOM PACS pre-configurato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Sezione 6.7.0.

## Funzioni e strumenti del menu database immagini

Vi sono funzioni per navigare, cercare nel database e per modificare, cancellare e aggiungere record al database. Queste funzioni sono spiegate attraverso le voci di menu del database. L'accesso avviene tramite il pulsante di primo livello denominato **Additional Options** (Opzioni aggiuntive) all'interno del database.

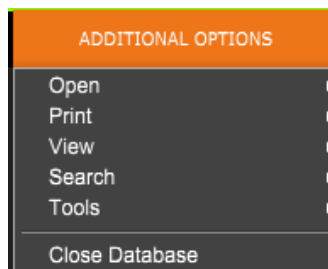

### 6.6.0 Cont.

### 6.6.1 Opzioni aggiuntive database

**Figura 6.6.3**  
Menu Opzioni aggiuntive


### Menu Open (Apri)

#### 6.6.1 Cont.

Il menu "Open" (Apri) ha una sola opzione "Open Image from File" (Apri immagine da file) che apre una finestra di dialogo di Windows che permette di navigare e aprire i file di immagine che si trovano su unità locali o di rete.

### Menu Print (Stampa)

Il menu "DB-Print" (Stampa DB) fornisce la funzionalità di stampa di immagini/procedure/pazienti. Vedere la Figura 6.6.4.

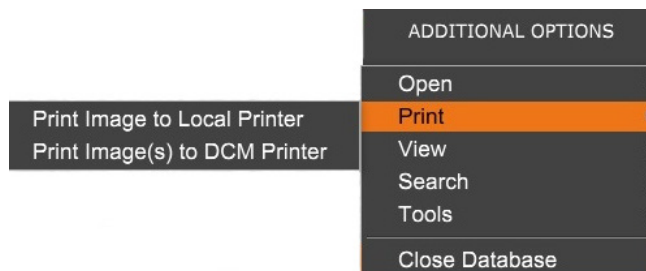

**Figura 6.6.4**  
Menu Stampa DB

### Print Image to Local Printer (Stampa immagini su stampante locale)

La funzione "Print Image to Local Printer" (Stampa immagini su stampante locale) è disponibile quando si seleziona una voce dalla Tabella immagini o dall'Elenco anteprime, altrimenti è disabilitata. L'immagine selezionata viene stampata utilizzando la stampante locale predefinita del sistema Windows.


Il livello finestra dell'immagine stampata è il livello finestra predefinito. Si sconsiglia di stampare da questo menu, a meno che non si sia soddisfatti con le stampe impostate ai livelli finestra predefiniti come calcolati dal programma. È possibile caricare prima l'immagine nella finestra Image View (Review) (Vista immagine (Revisione)) e poi regolare l'immagine ai livelli finestra desiderati. Quando si è soddisfatti del livello finestra, si può avviare la stampa dal menu della finestra Image View (Vista immagini). Una finestra di dialogo Format Options (Opzioni formato) consente di scegliere tra i formati di stampa.

### Print Image(s) to DCM Printer (Stampa immagini su stampante DCM)

Questa funzione invia le immagini a una stampante DICOM preconfigurata.

### Menu View (Visualizza)

Il menu "View" (Visualizza) fornisce all'utente una serie di opzioni che influenzano la visualizzazione del Database. Vedere la Figura 6.6.5.

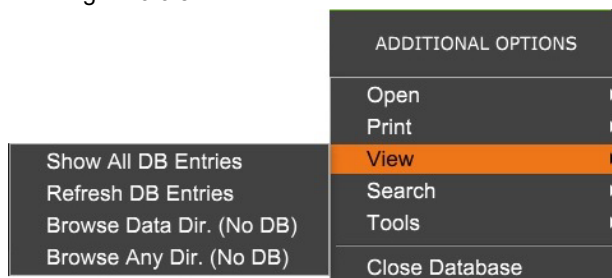

**Figura 6.6.5**  
Menu Vista Database

### Show All DB Entries (Mostra tutte le voci del DB)

Ricarica la tabella Paziente dal file Database. Eventuali nuove modifiche o aggiunte al Database vengono applicate alla tabella. Questa selezione cancella anche eventuali Filtri di ricerca attivi che possono essere stati applicati alle tabelle. Il Filtro di ricerca è spiegato in dettaglio di seguito nella sezione sulla Ricerca nel database.

### Refresh DB Entries (Aggiorna le voci del DB)

Aggiorna la tabella Paziente, ma mantiene qualsiasi Filtro di ricerca esistente applicato.

**Browse Data Directory (No DB) (Sfogliare la directory dati [no DB])****6.6.1 Cont.**


Visualizza tutte le immagini in anteprima nella Directory dei dati stabilita dal file di configurazione. Questi file vengono visualizzati nel Visualizzatore anteprime. Non sono associati al Database o agli elenchi di tabelle. Questo strumento è utile per rivedere le immagini non registrate o per risolvere i problemi del database con le immagini nella directory dei dati correnti.

**Browse Any Directory (No DB) (Sfogliare qualsiasi directory [no DB])**

Consente di sfogliare qualsiasi directory di file. Questi file vengono visualizzati nel Visualizzatore anteprime. Non sono associati al Database o agli elenchi di tabelle. Questo strumento è utile per rivedere una directory di immagini che non è mai stata registrata nel database o quando i record del database sono danneggiati.

**Menu Search (Ricerca)**


Gli strumenti di "Search" (Ricerca) del database, vedere la Figura 6.6.6, forniscono ricerche dettagliate o filtri del database. Il menu "DB-Search" (Ricerca DB) permette di effettuare una ricerca dettagliata e specifica. Quando si inseriscono e si attivano criteri di ricerca nella finestra di dialogo Ricerca DB, vedere la Figura 6.6.7, il filtro di ricerca viene applicato a tutte le tabelle dell'elenco nella finestra di dialogo Database immagini. Il criterio di ricerca attivato si chiama Filtro di ricerca e questo filtro rimane attivo finché l'utente non seleziona "Stop Search" (Termina ricerca) dal menu "DB-Search" (Ricerca DB) oppure "Show All DB Entries" (Mostra tutte le voci del DB) dal menu "DB-View" (Visualizza DB). Il filtro di ricerca attivo viene sempre visualizzato nella didascalia della finestra di dialogo Database immagini.

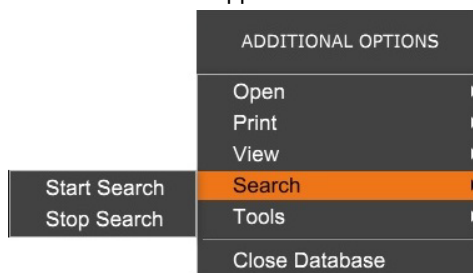

**Figura 6.6.6**  
Menu Ricerca DB

**Start Search (Avvia ricerca)**

La funzione "Start Search" (Avvia ricerca) apre la finestra di dialogo Ricerca DB che permette di inserire un FILTRO DI RICERCA attivo nel database. Quando si apre la finestra di dialogo Ricerca, la pagina Database viene chiusa e il software ritorna alla pagina Image Acquisition (Acquisizione immagini). La pagina Database si riapre automaticamente dopo la chiusura della finestra di dialogo Search (Ricerca).

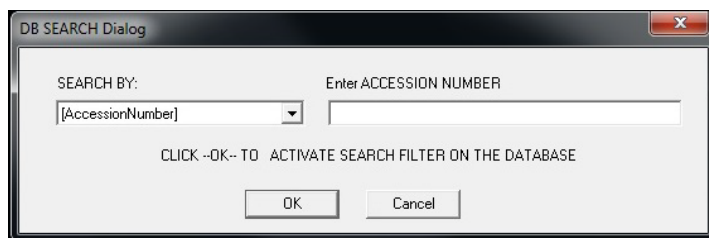

**Figura 6.6.7**  
Avvio di una ricerca nel database

I menu a discesa forniscono un elenco delle categorie di ricerca. Selezionare una categoria di ricerca e digitare il parametro di ricerca desiderato per avviare la ricerca. Selezionare "Start" (Avvia) per avviare la ricerca. Se la categoria può avere più di una voce distinta, vengono visualizzate tutte le voci di quella categoria.


**Stop Search (Termina ricerca)**

La funzione "Stop Search" (Termina ricerca) disattiva qualsiasi Filtro di ricerca attivo, cancella tutte le tabelle dell'elenco e ricarica l'elenco di tutti i pazienti nella tabella Patient List (Elenco pazienti).

## Menu Tools (Strumenti)

### 6.6.1 Cont.

Il menu *"DB-Tools"* (*Strumenti DB*) fornisce le funzioni Immagini/Procedure/Pazienti e alcune funzioni utili per riparare o riformattare il database.

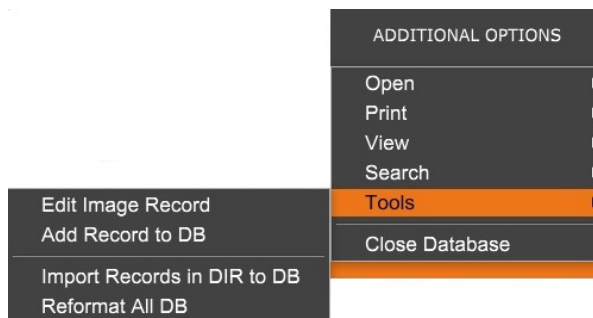

**Figura 6.6.8**  
Menu Strumenti DB

### Edit Image Record (Modifica record immagine)

La funzione *"Edit Image Record"* (*Modifica record immagine*) non è attualmente disponibile nel software Vision.

### Add Record to DB (Aggiungi record al DB)

Disponibile quando la voce dalla Image Table (Tabella immagini) o dalla Thumbnail List (Elenco anteprime) è selezionata, altrimenti disabilitata. Questo è particolarmente utile quando una directory viene sfogliata senza che il database abbia voci disponibili per le immagini in quella directory. L'utente può selezionare una singola immagine dall'elenco delle anteprime e aggiungere i record di quell'immagine nel database. Se la voce del database esiste già per l'immagine selezionata, non vi sono conseguenze in quanto può solo aggiornare il database su dove si trova attualmente il file immagine, cioè il nome del file/cartella.

### Import Records in DIR to DB (Importa record da DIR a DB)

Questo strumento aiuta a sfogliare e selezionare una cartella, e quindi a popolare il database con tutte le voci corrispondenti per tutti i file immagine nella directory selezionata (incluse le sottodirectory). I formati per le immagini possono essere DCM, DAT, DMM e RAW. Se mancano le anteprime delle immagini, questo strumento genera anche le anteprime BMP nella stessa directory.

### Reformat All DB (Riformatta tutti i DB)



Lo strumento *"Reformat All DB"* (*Riformatta tutti i DB*) aiuta a riformattare i campi delle tabelle Data [AAAA/MM/GG], Data/Ora [AAAA/MM/GG HH:MM:SS] e scrive in maiuscolo le voci per alcuni altri campi. È uno strumento utile quando viene importato e aperto per la prima volta qualche vecchio file di database oppure quando l'utente modifica manualmente le voci del database utilizzando MS Access.

## Note aggiuntive sul Database

- La possibilità di Uscire dal database, rimanendo nella Modalità revisione, si trova in **Additional Options** (Opzioni aggiuntive).
- Il pulsante in alto a sinistra cambia assumendo le funzioni **Back to Acquisition** (Torna all'acquisizione), **Back to the Main Menu** (Torna al menu iniziale) oppure **Close Database** (Chiudi Database), a seconda del flusso di lavoro utilizzato per entrare nella schermata Database e di ciò che è più appropriato.

## Modifica o elimina informazioni paziente dal database

È possibile modificare o eliminare le informazioni paziente dal database. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce del paziente nella sezione superiore del database per aprire una Finestra di dialogo. Vedere la Figura 6.6.9.

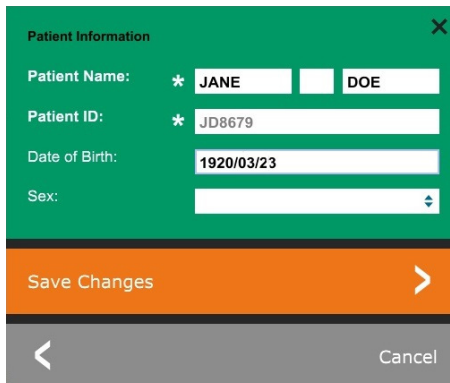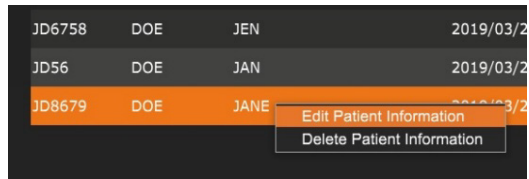


**Figura 6.6.9**

Finestra di dialogo  
Modifica/Cancel (sinistra)

**Figura 6.6.10**

Informazioni paziente (destra)

Facendo clic su "Edit Patient Information" (Modifica informazioni paziente), si apre una finestra di dialogo "Patient Information" (Informazioni paziente). Vedere la Figura 6.6.10. Fare clic su **Cancel** (Annulla) per tornare al database senza apportare o salvare le modifiche. Facendo clic su **Save Changes** (Salva modifiche) si apre una Finestra di dialogo di "Conferma". Fare clic su **Yes** (Sì) per confermare e procedere. Le modifiche vengono ora salvate e l'utente viene riportato nel database. **No** annulla le modifiche e riporta l'utente al database. **Cancel** (Annulla) riporta l'utente alla finestra di dialogo "Patient Information" (Informazioni paziente).


 **Nota:** se il sistema ha una password di avvio attivata (vedere l'argomento Utilità di accesso nella Sezione 6.4.4 e la Figura 6.4.21), verrà richiesta la stessa password quando si tenta di "Delete Patient Information" (Eliminare informazioni paziente) dal database.

## Lo standard DICOM Che cos'è lo standard DICOM?

Lo standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) è una serie di protocolli utilizzati da apparecchiature e software medici che permette di rendere i dati compatibili e intercambiabili con altre apparecchiature o software medici.

Quando un file viene salvato in formato DICOM, viene creato un file che include i Dati del paziente importanti, le apparecchiature di imaging, i dati hardware e i dati immagine, il tutto in un unico file. Inoltre, il file salvato contiene caratteristiche specifiche che lo identificano nel computer e nel software come file DICOM Standard. Una volta che un'applicazione software riconosce il file come file DICOM Standard, può avviare un lettore DICOM ed estrarre i dati correttamente, indipendentemente dalla provenienza del file.

Un file creato con il protocollo DICOM ha la seguente struttura:

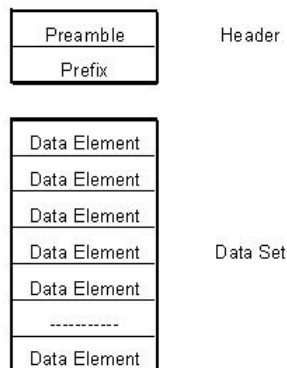


**Figura 6.7.1**

Struttura del protocollo DICOM

Dove il Preambolo è di 128 byte, tutti tipicamente impostati a 00H a meno che non sia utilizzato da un Profilo Applicativo o da una specifica implementazione; il Prefisso è di 4 byte, che costituiscono la stringa di caratteri "DICM" codificata come caratteri maiuscoli del Repertorio caratteri ISO 8859 G0; gli Elementi dati sono arbitrariamente grandi (o piccoli) e contengono i dati.


## Modalità

Le impostazioni di Modalità del file DICOM sono accessibili dalla Barra del menu superiore selezionando "DICOM Utilities" (Utilità DICOM), quindi "DICOM Modality Setup " (Impostazione modalità DICOM).

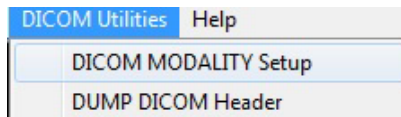

**Figura 6.7.2**  
Menu Utilità DICOM

È possibile selezionare il tipo di archiviazione DICOM: per la Presentazione o per l'Elaborazione. La stessa finestra di dialogo permette di selezionare la Modalità immagine DICOM, sia per la radiografia digitale che per la mammografia digitale. La Sintassi di trasferimento e la Rappresentazione del valore non sono definibili dall'utente. Sono sempre assegnati a META HEADER PRESENT, LITTLE\_ENDIAN e VR\_IMPLICIT.

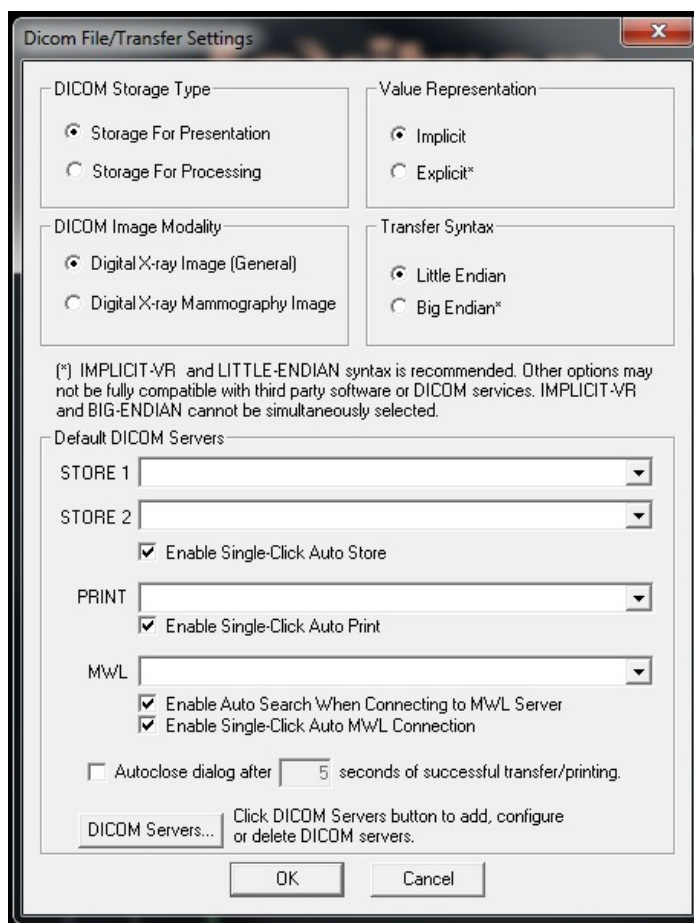

**Figura 6.7.3**  
Impostazioni Modalità DICOM  
Impostazioni predefinite mostrate

**NOTA:** una volta selezionate le Modalità DICOM, queste rimangono attive anche dopo la chiusura del software Vision. Le impostazioni di modalità vengono memorizzate e rimangono nel modo configurato fino a quando non vengono modificate nuovamente utilizzando le Impostazioni file DICOM. Queste impostazioni (Tipo e modalità di archiviazione, Sintassi di trasferimento e Rappresentazione del valore) saranno efficaci per tutte le funzionalità di salvataggio in locale o stampa DICOM.



## Server DICOM predefiniti

### 6.7.0 Cont.

Questa sezione contiene le impostazioni per i server DICOM predefiniti e per automatizzare alcuni dei processi di archiviazione, stampa o ricerca nei server PACS e MWL.

Le caselle di controllo "Enable Single-Click Auto Store" (Abilita auto archiviazione con un solo clic), "Print" (Stampa) o "MWL Connection" (Connessione MWL) consentono di memorizzare o stampare immagini o di connettersi automaticamente al server MWL. Se si utilizza un singolo server PACS per tali azioni o la maggior parte del lavoro coinvolge un singolo server PACS, selezionare una casella di controllo per automatizzare tali azioni.

L'opzione "Enable Auto Search When Connecting to MWL Server" (Abilita auto ricerca in connessione con il server MWL) dice all'applicazione di eseguire automaticamente una ricerca con le impostazioni di ricerca predefinite quando si cercano i dati del paziente.

L'opzione "Auto close dialog after N seconds of successful transfer/printing" (Chiudi automaticamente finestra di dialogo dopo N secondi di trasferimento/stampa riusciti) chiude automaticamente la finestra di dialogo DICOM Networking dopo il numero specificato di secondi trascorsi. La finestra di dialogo non si chiude automaticamente se si è verificato un errore di trasferimento o di stampa.

Facendo clic sul pulsante **DICOM Servers** (Server DICOM), si apre la finestra di dialogo DICOM Networking, dove è possibile aggiungere, modificare o cancellare i server DICOM. Vedere la Figura 6.7.5.

## Salva DICOM in locale


Per salvare l'immagine corrente in un'unità locale/direttamente, fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi dell'immagine. Viene visualizzata la finestra di dialogo mostrata nella Figura 6.7.4 di seguito. Fare clic su "Save/Store current image" (Salva/Archivia immagine corrente) e poi su "As local DICOM image" (Come immagine locale DICOM). In questo modo viene visualizzata la finestra di dialogo standard di Windows per il salvataggio dei file. Sfogliare o cliccare direttamente sulla directory/cartella desiderata, inserire il nome del file e cliccare su **Save** (Salva).



**Figura 6.7.4**  
Finestra di dialogo Salva  
immagine corrente

## Archivio PACS e Stampa PACS

Il software Vision consente l'archiviazione e la stampa tramite PACS (DICOM). Queste opzioni sono disponibili in tutto il software. Ad esempio, se si seleziona il tasto **PACS Store** (Archivio PACS), può essere visualizzata la seguente finestra di dialogo DICOM Networking. Questa finestra di dialogo permette all'utente di archiviare o stampare un file DICOM, oppure di aggiungere, modificare o rimuovere Connessioni di rete o Periferiche DICOM.

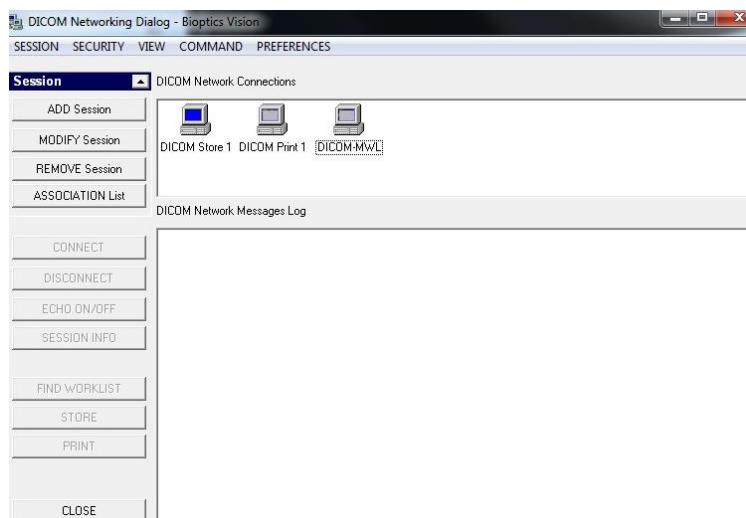

**Figura 6.7.5**  
Finestra di dialogo DICOM  
Networking

## PACS DICOM Store

## 6.7.0 Cont.

Il software Vision supporta il servizio DICOM 3.0 C-STORE. Questo consente di inviare un'immagine o una serie di immagini (secondo una specifica Procedura) a un sistema di archiviazione remoto conforme alle norme DICOM entità applicazione (AE) come il PACS. Anche in questo caso, la funzionalità di salvataggio DICOM è disponibile in tutto il software Vision. Le modifiche alla Presentazione e all'Elaborazione possono essere effettuate tramite Impostazione modalità DICOM, nel menu Strumenti.

 **Nota:** in DICOM Store, l'opzione "IMPOSTA attributi PELLICOLA" è visualizzata in grigio.

L'utente può aggiungere una nuova configurazione per un'AE DICOM remota a cui inviare l'immagine o selezionarne una già configurata, mostrata sotto le connessioni di rete DICOM, nella finestra di dialogo DICOM Networking. Facendo doppio clic [o un solo clic, seguito dal pulsante **Connect** (Connetti)] sull'icona dell'AE DICOM remota, il software Vision si collega e stabilisce un'associazione DICOM con l'AE remota selezionata. Una volta che l'associazione è stata stabilita con successo, l'immagine può essere inviata per l'archiviazione premendo il pulsante **Store** (Archivia). Dopo aver selezionato il pulsante **Store** (Archivia), il software Vision invia l'immagine selezionata all'AE remota DICOM definita. Se l'operazione Archivia funziona, l'AE DICOM remota invia una conferma di ricezione e archiviazione delle immagini. Se l'operazione fallisce, l'AE DICOM remota invia un codice di errore che indica il motivo del mancato funzionamento.

È possibile inoltre inviare una singola immagine per l'archiviazione cliccando con il Tasto destro del mouse sull'immagine in anteprima mentre si trova nel Browser Database e seguendo la stessa procedura descritta in precedenza. È possibile inviare un'intera Serie (Procedura) di immagini per l'archiviazione facendo clic con il Tasto destro del mouse sul nome della Serie (Procedura), visualizzato nella schermata Database Browser e seguendo di nuovo lo stesso protocollo descritto sopra.

## Add Session (Aggiungi sessione)

Il pulsante **Add Session** (Aggiungi sessione) apre la finestra di dialogo Sessione con cui è possibile configurare una nuova connessione a un'entità applicazione DICOM remota.


Per creare una nuova configurazione di connessione a un'AE DICOM remota, bisogna avere a disposizione le seguenti informazioni: il Titolo dell'entità applicativa (Titolo AE), la scelta della "funzione da eseguire" DICOM/PACS, l'Indirizzo IP e il Numero di porta per il Server (cioè la stampante DICOM o il sistema PACS).

Sono necessari anche il Titolo AE e il Numero di porta del sistema dell'utente (cioè del cliente). Completare i campi dati appropriati e selezionare **OK** per creare una nuova configurazione.

Scelta del comportamento funzione sessione predefinita  
DICOM/PACS

Vi sono attualmente quattro (4) tipi di funzioni che una sessione DICOM può rappresentare come predefinite. Questi si trovano nell'elenco a discesa Funzione (casella combinata) mostrato nella Figura 6.7.6 di seguito. Segue anche un elenco:

1. Un collegamento GENERALE DICOM/PACS
2. Una connessione DICOM STORE
3. Un collegamento con la stampante DICOM PRINTER
4. Una modalità di connessione DICOM WORKLIST

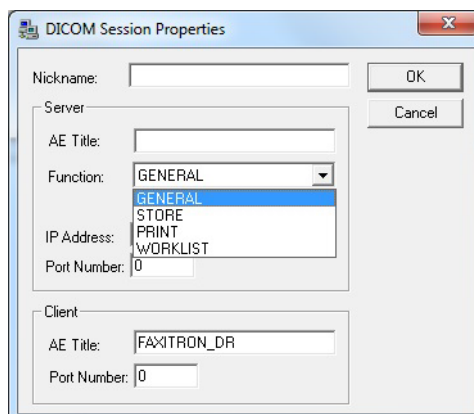

**Figura 6.7.6**  
Finestra di dialogo Proprietà  
sessione



Lo scopo della “Funzione” DICOM è quello di consentire la creazione (aggiunta) di una Sessione/Connessione che permette di utilizzare un “dispositivo” DICOM/PACS solo per una particolare categoria di funzioni, come configurata dall'utente. Una volta configurata, quando si visualizza o si utilizza la finestra di dialogo “DICOM Networking” (vedere figura 6.7.5), solo l'icona che corrisponde alla funzione scelta sarà “attiva e accesa”. Cioè, viene visualizzata in blu e non in grigio. Ad esempio, nella figura 6.7.5 sono presenti tre (3) icone che rappresentano, nell'ordine: un Archivio PACS (*DICOM Store 1*), una Stampa PACS (*DICOM Print 1*) e una Modalità Worklist (*DICOM-MWL*). Poiché l'icona **DICOM Store** (Archivio DICOM) è stata scelta in precedenza, è l'unica attiva (schermata blu). Funziona allo stesso modo anche per gli altri modalità.


## 6.7.0 Cont.

### Modify Session (Modifica sessione)

Il pulsante **Modify Session** (Modifica sessione) apre la finestra di dialogo per l'AE DICOM selezionata. In questa finestra, l'utente può modificare le informazioni sul Server e sul Client descritte nella descrizione Aggiungi Sessione.

### Remove Session (Rimuovi sessione)

Il pulsante **Remove Session** (Rimuovi sessione) rimuove la configurazione AE DICOM selezionata dal software Vision. Una volta rimossa, una configurazione AE DICOM non può essere ripristinata, a meno che l'utente non inserisca manualmente i dati richiesti con il pulsante Aggiungi sessione. Sarà richiesta una conferma dell'azione, vedere di seguito.

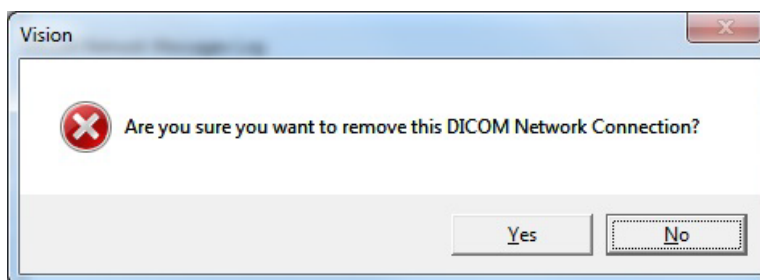


**Figura 6.7.7**  
Verifica della rimozione di una  
connessione di rete DICOM  
esistente

## Associazione

## 6.7.0 Cont.


Il pulsante **Association List** (Elenco associazioni) apre la finestra di dialogo Associazione, mostrata di seguito, con cui è possibile modificare i parametri e i protocolli utilizzati dal software Vision durante la negoziazione di una connessione con un'AE DICOM remota. Queste opzioni devono essere modificate solo da un utente esperto che abbia familiarità con i protocolli di associazione DICOM.

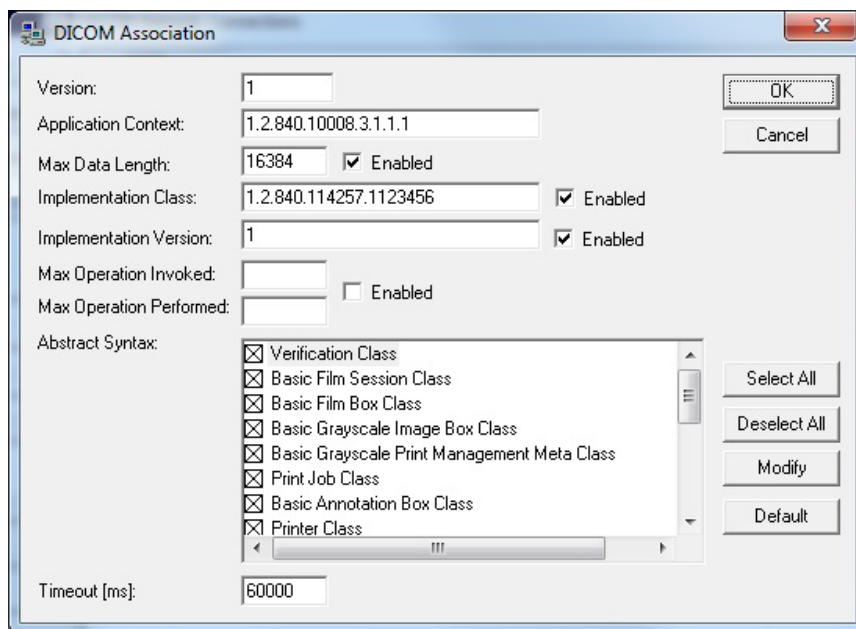

**Figura 6.7.8**  
Finestra Associazione DICOM

## Attributi pellicola

Selezionando *Set DICOM Print Film Attributes* (Imposta attributi pellicola DICOM Print) nel menu *Command* (Comando) (Figura 6.7.9), viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione stampante DICOM. Vedere la Figura 6.7.10. In questa finestra di dialogo, l'utente può selezionare varie opzioni che regolano il formato della pellicola e della stampa. Selezionando **Default** (Predefinito) si ripristinano tutte le opzioni predefinite. Le configurazioni delle impostazioni sono fornite attraverso un menu a discesa. Per accettare la configurazione modificata, selezionare **OK**. Per rifiutare le opzioni e uscire dalla finestra senza apportare modifiche, selezionare **Cancel** (Annulla).

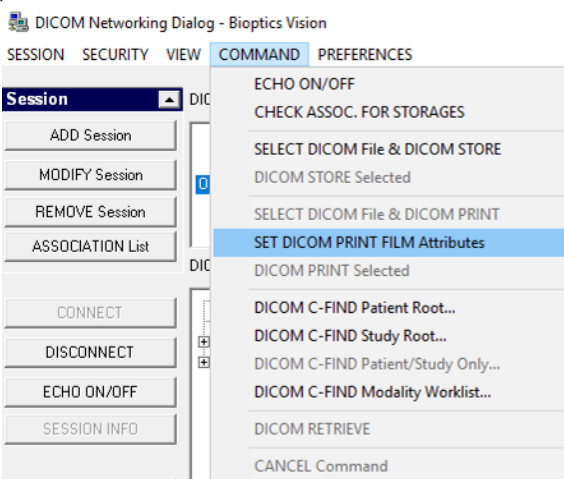

**Figura 6.7.9**  
Imposta Attributi PELLICOLA  
DICOM PRINT

## 6.7.0 Cont.

DICOM Printer Setup

Medium Type: Blue Film

Print Priority: High

Number of Copies: 1

Film Destination: Magazine

Film Orientation: Portrait

Empty Image Density: Black

Border Density: Black

Magnification Type: REPLICATE

Film Size ID: 8INX10IN

Polarity: Normal

Smoothing Type: Medium

Film Density:

Max Density: 415

Min Density: 0

Image Display Format:

☒ STANDARD \ C 1 R 1

☐ Slide

Default OK Cancel

**Figura 6.7.10**

Finestra di dialogo Impostazione stampante DICOM

**PACS Print (Stampa PACS)**

L'opzione **PACS Print** (Stampa PACS) invia l'immagine selezionata alla stampante PACS DICOM selezionata. L'immagine viene stampata in base alle opzioni di formato pellicola e stampa che si trovano nella finestra di dialogo Imposta attributi pellicola descritta in precedenza. Se l'utente avvia Stampa PACS da Vista immagini, il livello finestra sarà scelto da Vista immagini. Se Stampa PACS viene avviato dalla finestra di dialogo Database, allora il livello finestra sarà il livello finestra predefinito calcolato dal software Vision.

**Close (Chiudi)**

Il pulsante **Close** (Chiudi) chiude la finestra di dialogo DICOM Networking e riporta l'utente all'area da cui è stato eseguito il comando DICOM. Questo comando chiude anche la connessione o l'associazione tra il software Vision e il dispositivo DICOM remoto, se è stata stabilita una connessione.

## Panoramica

Le annotazioni utente nel software Vision consentono di applicare una “sovrapposizione” grafica trasparente a un'immagine, comunemente chiamata “annotazione”. Queste annotazioni possono essere in forma di testo, linee, linee “a forma libera” (curve di Bezier), frecce, ellissi e caselle. In questo modo è possibile aggiungere ulteriori informazioni e “marcatori” sull'immagine, se lo si desidera. Si noti che tutte le annotazioni possono essere facilmente attivate o disattivate, in altre parole possono essere mostrate o nascoste a piacimento.

## Funzionamento

Per iniziare ad annotare, selezionare lo strumento **Annotations** (Annotazioni) dal menu a sinistra. Vedere le Figure 6.4.1 e 6.8.1. Aprendo questa finestra di dialogo, il software mette immediatamente l'utente in modalità di progettazione. Viene anche visualizzata una “Palette strumenti”. Vedere la Figura 6.8.2 di seguito.




**Figura 6.8.1**  
Palette strumenti per  
la progettazione annotazioni  
utente

Selezionando **Save** (Salva) o **Cancel** (Annulla) in questa finestra di dialogo si cancellano le annotazioni precedenti o si salvano le annotazioni correnti nella finestra. Inoltre, riporta alla modalità di imaging normale.

La palette strumenti è costituita da quindici (15) opzioni strumenti descritti di seguito. Tuttavia, gli strumenti possono essere ridotti in base alle esigenze dell'utente agli 8 strumenti più comuni, che vengono visualizzati nella riga superiore della finestra di dialogo.

Si noti che il comportamento della maggior parte di queste opzioni strumento comporta l'uso del mouse per guidare la posizione e la forma dinamica sullo schermo. I “clic” del mouse vengono utilizzati per impostare la posizione e la forma finale.

Il termine “scorrere” significa tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare l'oggetto intorno allo schermo. Lasciando andare il tasto sinistro del mouse o facendo clic con il tasto destro del mouse, si “imposta” l'annotazione in una posizione “permanente” o finale.

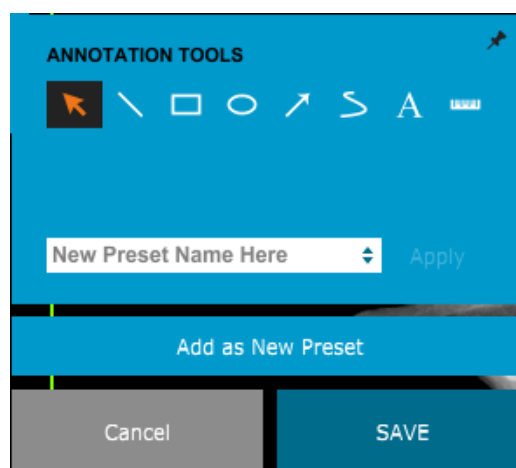

**Figura 6.8.2**  
Palette strumenti per  
la progettazione annotazioni  
utente

Partendo dall'alto a sinistra della figura precedente, viene fornita una descrizione di ogni opzione strumento.


## 6.8.0 Cont.

1. **Selection Tool** (Strumento di selezione): utilizzare quest'opzione per selezionare (evidenziare) un oggetto di annotazione corrente. Fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse verso il basso per impostare una posizione di partenza, quindi spostare il mouse. Tutte le annotazioni contenute nella casella visualizzata saranno selezionate per un ulteriore utilizzo. Rilasciare il tasto sinistro del mouse per terminare l'operazione.
2. **Line Tool** (Strumento linea): con quest'opzione è possibile disegnare una linea retta. Utilizzare il mouse come sopra.
3. **Box Tool** (Strumento casella): disegna una casella. Utilizzare il mouse come sopra.
4. **Ellipse (and Circle) Tool** [(Strumento Ellisse (e Cerchio))]: disegna un'ellisse o un cerchio. Utilizzare il mouse come sopra.
5. **Arrow Tool** (Strumento freccia): disegna una linea con una freccia all'estremità. Utilizzare il mouse come per lo Strumento linea.
6. **Polygon Open Line Tool** (Strumento poligono linea aperta): disegna linee "aperte segmentate" non dritte. Fare clic con il tasto sinistro del mouse, tenerlo premuto e disegnare. Rilasciare il tasto sinistro, questo imposta un segmento di linea. Ripetere come desiderato. Cliccare con il tasto destro del mouse e l'operazione dello strumento è completa.
7. **Text Tool** (Strumento di testo): crea una "casella di testo" dove è possibile digitare dati testuali.
8. **Ruler Tool** (Strumento righello): crea un segmento di linea retto. Molto simile alla funzione Righello degli Strumenti immagine.
9. **Polygon Closed Line Tool** (Strumento poligono linea chiusa): disegna linee "chiuse segmentate" non dritte. Fare clic con il tasto sinistro del mouse, tenerlo premuto e disegnare. Rilasciare il tasto sinistro, questo imposta un segmento di linea. Ripetere come desiderato. Cliccare con il tasto destro del mouse e l'operazione dello strumento è completa.
10. **Curved Open Line Tool** (Strumento linea aperta curva): disegna linee "aperte segmentate" curve (curve di Bezier). Fare clic con il tasto sinistro del mouse, tenerlo premuto e disegnare. Rilasciare il tasto sinistro, questo imposta un segmento di linea ricurvo. Ripetere come desiderato. Cliccare con il tasto destro del mouse e l'operazione dello strumento è completa.
11. **Curved Closed Line Tool** (Strumento linea chiusa curva): disegna linee "chiuse segmentate" curve (curve di Bezier). Fare clic con il tasto sinistro del mouse, tenerlo premuto e disegnare. Rilasciare il tasto sinistro, questo imposta un segmento di linea ricurvo. Ripetere come desiderato. Cliccare con il tasto destro del mouse e l'operazione dello strumento è completa.
12. **Text "Balloon" Tool** (Strumento "nuvoletta" di testo): crea una casella di testo con un segmento di linea che sporge da un angolo della stessa. Questo può essere usato per "collegare" il testo a un elemento sull'immagine.
13. **Segmented Ruler** (Righello segmentato): disegna righe "aperte segmentate" non dritte. Fare clic con il tasto sinistro del mouse, tenerlo premuto e disegnare. Rilasciare il tasto sinistro, questo imposta un segmento di riga. Ripetere come desiderato. Cliccare con il tasto destro del mouse e l'operazione dello strumento è completa. La lunghezza di tutti i segmenti di riga è indicata alla fine del righello. Utile per una stima approssimativa dei margini esterni di un oggetto o di un Paziente.
14. **Protractor Tool** (Goniometro): disegna un angolo sullo schermo e fornisce il grado dell'angolo. Proprio come un goniometro.
15. **Orthogonal Ruler Tool** (Strumento righello ortogonale): fornisce due (2) linee rette ortogonali tra loro.

## Modalità di progettazione e menu tasto destro del mouse

### 6.8.0 Cont.


In Modalità di progettazione annotazioni utente, ma non in una modalità operativa specifica, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse e ottenere un menu contestuale. Vedere sotto.

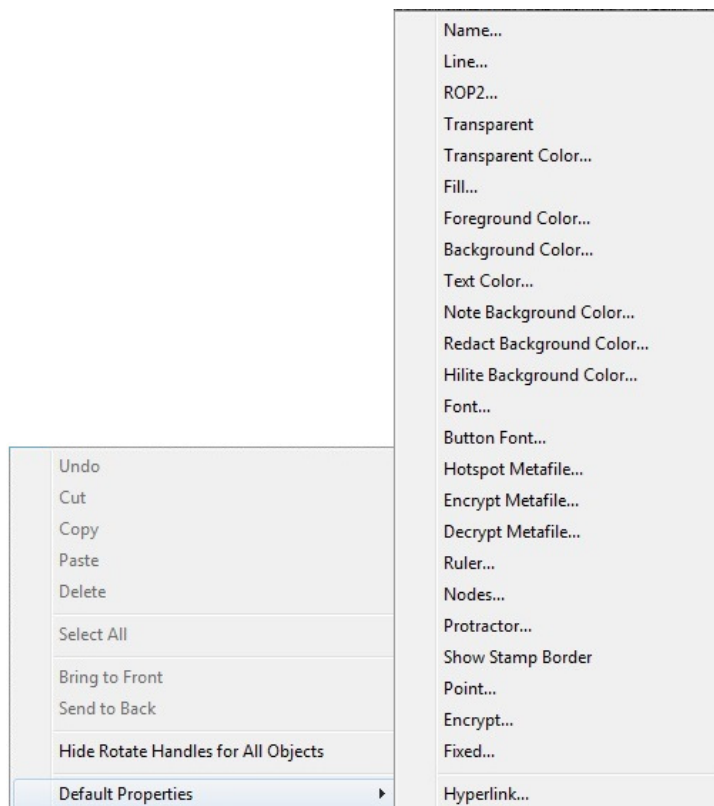

**Figura 6.8.3**


Menu tasto destro del mouse contestuale (solo durante la Modalità progettazione delle annotazioni utente)

Molte impostazioni specifiche possono essere selezionate da questi menu contestuali.

 **Nota:** se un elemento sembra troppo piccolo per essere letto o visto correttamente, è possibile modificarlo attraverso i menu tasto destro del mouse mostrati sopra. In alternativa, è possibile scegliere di ingrandire l'immagine utilizzando lo strumento Zoom dinamico. Questo ingrandisce l'immagine e si dovrebbe essere in grado di vedere chiaramente qualsiasi annotazione.

## Mostra/Nascondi annotazioni

Il pulsante **Toggle Annotations** (Attiva/disattiva annotazioni), mostrato in Figura 6.8.4, consente di attivare e disattivare rapidamente le annotazioni. Per impostazione predefinita, le annotazioni sono attivate. Il pulsante si trova nel menu a destra vicino all'angolo in alto a destra.

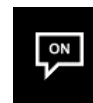


**Figura 6.8.4**

Opzione Mostra/Nascondi per Annotazioni utente

Il menu *"Help" (Guida)*, vedere Figura 6.9.1, si trova nella barra del menu superiore e consente di accedere rapidamente alle risorse di Faxitron Core *"Open User's Manual" (Apri il Manuale d'uso)* e *"About Vision" (Informazioni su Vision)*. Fare riferimento alla Figura 6.10.1.


## 6.9.0 Guida

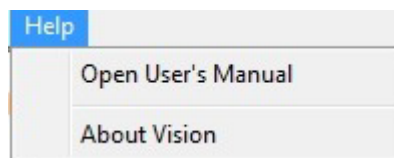

**Figura 6.9.1**  
Pulsante Guida

Il sottomenu *"About Vision" (Informazioni su Vision)* apre una finestra di dialogo che mostra la versione del software Vision, la data di copyright e le informazioni sul sistema.

## 6.10.0 Informazioni relative al software Vision

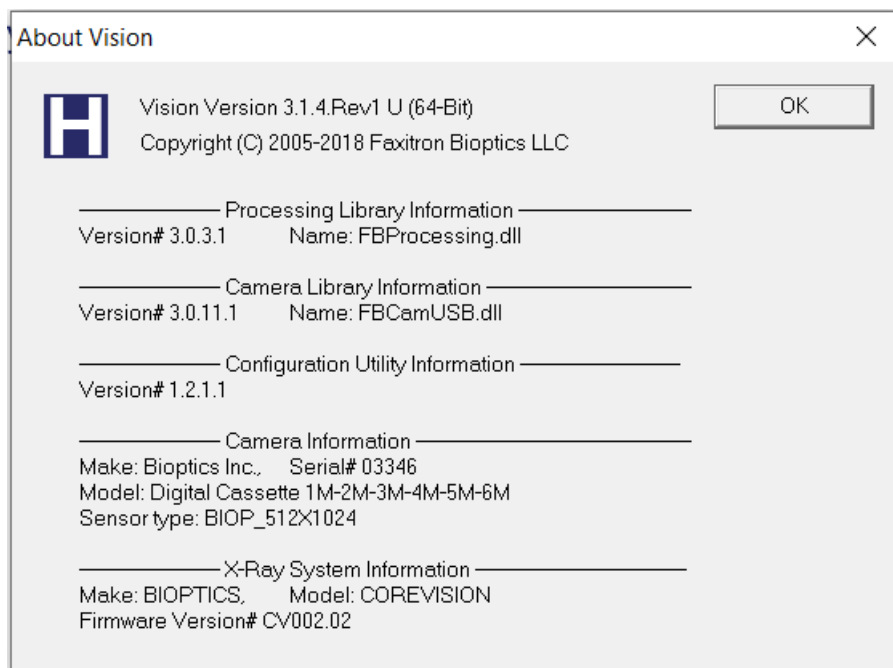

**Figura 6.10.1**  
Finestra di dialogo  
"Informazioni su Vision"