

Elučný pufer Panther Fusion®

Návod na použitie
Na diagnostické použitie *in vitro*

Určené použitie

Elučný pufer Panther Fusion je reagentia s nízkou iontovou silou, ktorý sa používa na elúciu zachytenej cieľovej nukleovej kyseliny pri príprave na „downstream“ amplifikáciu a detekciu analytu v systéme Panther Fusion®.

Tento produkt je reagentia na všeobecné účely Panther Fusion na použitie v plne automatizovanom systéme na detekciu nukleových kyselín (systém Panther Fusion).

Zásady postupu

Elučný pufer Panther Fusion sa používa na elúciu nukleovej kyseliny po tom, ako prebehne záchyt cieľa, čo vedie k izolovanej celkovej nukleovej kyseline pripravenej na prenesenie na amplifikáciu a detekciu cieľa v systéme Panther Fusion®.

Informácie o prevádzke systému Panther Fusion® nájdete v *Panther/Panther Fusion® System Operator's Manual (Prevádzková príručka systému Panther/Panther Fusion®)*.

Dodané materiály

Elučný pufer Panther Fusion

Elučný pufer Panther Fusion	2 × 89 ml alebo 2 400 testov	PRD-04334
-----------------------------	------------------------------	-----------

Varovania a bezpečnostné opatrenia

- Pozorne si prečítajte celý tento príbalový leták, *príručku pre operátora systému Panther/Panther Fusion®*. Elučný pufer Panther Fusion je navrhnutý na použitie na systéme Panther Fusion.
- Na profesionálne použitie.
- Použite rutinné laboratórne opatrenia. V určených pracovných priestoroch nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri manipulácii so vzorkami a súpravami reagentií používajte jednorazové, bezprašné rukavice, ochranné okuliare a laboratórne plášte. Po manipulácii s preparátmi a reagentiami si dôkladne umyte ruky.
- Zabráňte mikrobiálnej a ribonukleázovej kontaminácii reagentií.
- Všetok materiál, ktorý príde do kontaktu s preparátmi a reagentiami, zlikvidujte v súlade s platnými národnými, medzinárodnými a regionálnymi nariadeniami.
- Komponenty uchovávajte pri odporúčaných podmienkach na uchovávanie. Pozri Požiadavky na skladovanie a manipuláciu.
- Pred použitím skontrolujte prípadné poškodenie, únik a expiráciu. Nepoužívajte ich, ak sú poškodené, unikajú alebo ak uplynul ich dátum expirácie.
- Nedotýkajte sa fóliovej vrchnej časti alebo červeného septa.
- Nekombinujte žiadne reagentie ani tekutiny rozboru. Nedopĺňajte reagentie ani tekutiny, systém Panther Fusion overuje hladiny reagentií.
- Dátum výroby a dátum expirácie nájdete na vonkajšom obale.
- Informácie o oznámeniach o nebezpečenstve pri označovaní výrobkov uvádzaných na trh na celom svete odrážajú klasifikáciu bezpečnostných listov (SDS) USA a EÚ. Informácie o oznámeniach o nebezpečenstve, ktoré sú špecifické pre váš región, nájdete v bezpečnostných listoch pre jednotlivé regióny v knižnici bezpečnostných listov na adrese www.hologicsds.com.

Požiadavky na skladovanie a manipuláciu

- Neotvorený elučný pufer Panther Fusion uchovávajte pri teplote 15 °C až 30 °C.
- Po otvorení bude elučný pufer stabilný 60 dní.
- Zlikvidujte všetky nepoužité reagentie, ktoré prekročili obdobie stability v prístroji.
- Počas manipulácie a skladovania zabráňte krížovej kontaminácii.
- Reagentie nezmrazujte.

Postup

Keď vás na to systém upozorní, vymeňte fľaštičky v univerzálnej zásuvke na kvapaliny Panther Fusion. Pozrite si *prevádzkovú príručku systému Panther/Panther Fusion®*.

Obmedzenia

Smie používať iba vyškolený pracovník na systéme Panther Fusion®.

Kontaktné údaje a história revízií



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgicko

Adresa austrálskeho zadávateľa:
Hologic (Australia & New Zealand)
Pty Ltd Macquarie Park NSW 2113

E-mailovú adresu a telefónne číslo na technickú podporu a zákaznícky servis špecifické pre vašu krajinu nájdete na stránkach www.hologic.com/support.

Tento produkt je určený len na použitie v oblasti humánnej diagnostiky in vitro.

V prípade závažnej udalosti informujte výrobcu a príslušný úradný orgán vo vašej krajine.

Hologic, Panther, Panther Fusion a príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a/alebo v iných krajinách.

Akékoľvek ďalšie ochranné známky, ktoré môžu byť vyobrazené na tomto príbalovom letáku, sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrobok je chránený jedným alebo viacerými patentmi Spojených štátov, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.hologic.com/patents.

AW-26594-3201 Rev. 001

©2024 Hologic, Inc. Všetky práva vyhradené.

2024-11

História revízií	Dátum	Popis
AW-26594-001 Rev. 002	Júl 2024	Táto verzia je v súlade s AW-26594-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26594-001 Rev. 002.)