

Eluční pufr Panther Fusion® Elution Buffer

Návod k použití
Pro diagnostické použití *in vitro*

Určené použití

Eluční pufr Panther Fusion Elution Buffer je reagensie s nízkou iontovou silou používaná k eluci zachycené cílové nukleové kyseliny v přípravě na následnou amplifikaci analytů a detekci na systému Panther Fusion®.

Tento produkt je reagensie ke všeobecnému použití Panther Fusion určená k použití na plně automatizovaném systému k detekci nukleových kyselin (systém Panther Fusion).

Principy postupu

Eluční pufr Panther Fusion Elution Buffer se používá k eluci purifikované nukleové kyseliny po záchytu cíle, což poskytuje izolovanou celkovou nukleovou kyselinu připravenou k přenosu pro cílovou amplifikaci a detekci v systému Panther Fusion®.

Další informace týkající se obsluhy systému Panther Fusion® najdete v *příručce k obsluze systému Panther / Panther Fusion®*.

Dodávané materiály

Eluční pufr Panther Fusion Elution Buffer

Eluční pufr Panther Fusion Elution Buffer	2x 89 ml nebo 2 400 testů	PRD-04334
--	---------------------------	-----------

Varování a bezpečnostní opatření

- Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci a *příručku k obsluze systému Panther / Panther Fusion®*. Eluční pufr Panther Fusion Elution Buffer je určen pro použití v systému Panther Fusion.
- Pro profesionální použití.
- Dodržujte běžná laboratorní bezpečnostní opatření. Ve vyhrazených pracovních prostorech nejezte, nepijte ani nekuřte. Při manipulaci se vzorky a reagensiemi soupravy používejte jednorázové rukavice bez talku, ochranné brýle a laboratorní pláště. Po manipulaci se vzorky a reagensiemi si pečlivě umyjte ruce.
- Zabraňte mikrobiální a ribonukleázové kontaminaci reagensií.
- Všechny materiál, který přišel do kontaktu se vzorky a reagensiemi, zlikvidujte v souladu s příslušnými národními, mezinárodními a regionálními předpisy.
- Skladujte složky za doporučených podmínek skladování. Viz část Požadavky na skladování a manipulaci.
- Před použitím zkontrolujte případná poškození, netěsnost a datum spotřeby. Pokud nějaké poškození, netěsnost nebo prošlé datum spotřeby objevíte, roztoky nepoužívejte.
- Nedotýkejte se fóliové horní části ani červené přepážky.
- Neslévejte žádné reagensie či kapaliny z testu. Reagensie ani kapaliny nedolévejte; systém Panther Fusion ověřuje hladiny reagensií.
- Datum výroby a datum spotřeby naleznete na vnějším obalu.
- Informace o nebezpečích pro označování výrobků uváděných na trh globálně odráží klasifikace bezpečnostních datových listů (SDS) v USA a EU. Informace o nebezpečích specifické pro váš region najdete v bezpečnostním datovém listu specifickém pro daný region v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologicsds.com.

Požadavky na skladování a manipulaci

- Neotevřený eluční pufr Panther Fusion Elution Buffer uchovávejte při teplotě 15 °C až 30 °C.
- Po otevření je eluční pufr stabilní po dobu 60 dní.
- Zlikvidujte všechny nepoužité reagensie s proslou stabilitou v systému.
- Při manipulaci s reagensiemi a jejich skladování zabraňte křížové kontaminaci.
- Reagensie nezmrazujte.

Postup

Po vyzvání systémem vyměňte lahve v zásuvce univerzálních kapalin Panther Fusion. Viz *příručka k obsluze systému Panther / Panther Fusion®*.

Limitace

K použití pouze v systému Panther Fusion® vyškoleným pracovníkem.

Kontaktní informace a historie revizí



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Adresa zadavatele v Austrálii:
Hologic (Australia & New Zealand)
Pty Ltd Macquarie Park NSW 2113

E-mailovou adresu a telefonní číslo oddělení technické podpory a zákaznických služeb ve vaší zemi najdete na adrese www.hologic.com/support.

Tento produkt je určen pouze pro použití v humánní diagnostice in vitro.

V případě vážného incidentu informujte výrobce a příslušný úřad ve vašem regionu.

Hologic, Panther, Panther Fusion a související loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA nebo v jiných zemích.

Veškeré ostatní ochranné známky, které se mohou vyskytnout v této příbalové informaci, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento produkt může být krytý jedním či více patenty USA uvedenými na webové stránce www.hologic.com/patents.

AW-26594-2601 Rev. 001

©2024 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.

2024-11

Historie revizí	Datum	Popis
AW-26594-001 Rev. 002	Listopad 2024	Tato verze je v souladu s AW-26594-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26594-001 Rev. 002.)