

Panther Fusion® Reconstitution Buffers

Návod k použití
Pro diagnostické použití *in vitro*

Určené použití

Pufry Panther Fusion Reconstitution Buffer I a Panther Fusion Reconstitution Buffer II se používají k rekonstituci lyofilizované testovací kazety s jednotkovou dávkou, aby se usnadnilo testování analytů *in vitro*.

Tyto produkty jsou reagenty pro obecné použití Panther Fusion určené k použití v plně automatizovaném přístroji pro detekci nukleových kyselin, v systému Panther Fusion®.

Principy postupu

Pufry Panther Fusion Reconstitution Buffer I a Panther Fusion Reconstitution Buffer II obsahují soli a používají se k rekonstituci lyofilizované testovací kazety s jednotkovou dávkou. Rekonstituovaná testovací směs se přidá do reakční zkumavky a připraví se na amplifikaci a detekci cíle v systému Panther Fusion®.

Informace o provozu systému Panther Fusion® naleznete v *Příručce obsluhy systému Panther Fusion®*.

Dodávané materiály

Poznámka: Rizikové a bezpečnostní informace související s reagenty naleznete v knihovně bezpečnostních listů na adrese www.hologicsds.com.

Rekonstituční pufry Panther Fusion

Rekonstituční pufr Panther Fusion Reconstitution Buffer I	2 × 87 ml nebo 1 920 testů	PRD-04333
Rekonstituční pufr Panther Fusion Reconstitution Buffer II	2 × 87 ml nebo 1 920 testů	PRD-04804

Varování a bezpečnostní opatření

- Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci a *Příručku k obsluze systému Panther Fusion®*. Rekonstituční pufry Panther Fusion Reconstitution Buffer I a II jsou určeny pro použití v systému Panther Fusion®.
- Pro profesionální použití.
- Dodržujte běžná laboratorní bezpečnostní opatření. V laboratoři nejezte, nepijte ani nekuřte. Při manipulaci se vzorky a reagenty soupravy používejte jednorázové nepudrované rukavice, ochranné brýle a laboratorní pláště. Po manipulaci se vzorky a reagenty si pečlivě umyjte ruce.

- D. Zabraňte mikrobiální a ribonukleázové kontaminaci reagensů.
- E. Všechny materiály, které přišly do kontaktu se vzorky a reagensy, zlikvidujte v souladu s příslušnými národními, mezinárodními a regionálními předpisy.
- F. Skladujte složky za doporučených podmínek skladování. Viz požadavky na skladování a manipulaci.
- G. Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, netěsnosti a zda neuplynula doba expirace. V případě poškození, netěsnosti nebo prošlé expirace nepoužívejte.
- H. Nedotýkejte se horní části fólie nebo červené přepážky.
- I. Neslévejte žádné reagensy či kapaliny z testu. Reagensy ani kapaliny nedolévejte; systém Panther Fusion ověřuje hladiny reagensů.
- J. Datum výroby a datum expirace najdete na vnějším obalu.

Poznámka: Informace v komunikaci o nebezpečí pro označování výrobků uváděných na trh globálně odráží klasifikace bezpečnostních listů (BL) v USA a EU. Informace o nebezpečích specifické pro váš region najdete v bezpečnostním listu specifickém pro daný region v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologicsds.com.

Požadavky na skladování a manipulaci

- A. Neotevřený pufr Panther Fusion Reconstitution Buffer I a pufr Panther Fusion Reconstitution Buffer II skladujte při teplotě 15 °C až 30 °C. Doba použitelnosti pufru Panther Fusion Reconstitution Buffer I a pufru Panther Fusion Reconstitution Buffer II je 26 měsíců.
- B. Po otevření jsou pufrы Panther Fusion Reconstitution Buffer I a II stabilní po dobu 60 dnů.
- C. Zlikvidujte všechny nepoužité reagensy s proslou stabilitou.
- D. Při manipulaci s reagensy a jejich skladování zabraňte křížové kontaminaci.
- E. Reagensy nezmrazujte.

Postup

Na výzvu systému vyměňte lahve v zásuvce univerzálních kapalin Panther Fusion. Viz *Příručku k obsluze systému Panther Fusion®*.

Omezení

Pro použití v systému Panther Fusion® pouze vyškoleným odborníkem.

Kontaktní údaje a historie revizí



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vinciilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Adresa zadavatele v Austrálii:

Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113

E-mailovou adresu a telefonní číslo oddělení technické podpory a zákaznických služeb požadované země najdete na adrese www.hologic.com/support.

Tento produkt je určen pouze pro použití v humánní diagnostice *in vitro*.

V případě vážného incidentu informujte výrobce a příslušný úřad ve vašem regionu.

Hologic, Panther, Panther Fusion a související loga jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

Veškeré ostatní ochranné známky, které se mohou vyskytnout v této příbalové informaci, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento produkt může být krytý jedním či více patenty USA uvedenými na webové stránce www.hologic.com/patents.

AW-26599-2601 Rev. 001

©2024 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.
2024-11

Historie revizí	Datum	Popis
AW-26599-001 Rev. 002	Listopad 2024	Tato verze je v souladu s AW-26599-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26599-001 Rev. 002.)