

Hologic

AccuProbe® Culture Identification Reagent Kit

Reagenserne i **AccuProbe Culture Identification Reagent Kit** (Best. nr. 102800) er beregnet til brug med AccuProbe analysesæt i henhold til de respektive vejledninger. Indeholder reagenser til 200 tests (bateriel identifikation) eller 100 tests (mykobakteriel/fungal identifikation).

REAGENS BESKRIVELSE

Bemærk: For oplysninger om enhver fare og sikkerheds erklæringer, der kan være tilknyttet reagenser, henvises til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdataark) på www.hologic.com/sds.

Reagent 1 (Lysis Reagent)

Stødpudeopløsning til lysering af prøve tilsat 0,04% natriumazid; 10 mL

Reagent 2 (Hybridization Buffer)

Stødpudeopløsning til hybridiseringsprocessen; 10 mL

Reagent 3 (Selection Reagent)

Stødpudeopløsning til probe separation; 60 mL

RISIKO & SIKKERHED

Undgå direkte kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved spild skylles straks med rigelige mængder vand. Natriumazid kan i kontakt med kobber eller bly danne eksplosive forbindelser. Ved bortkastning i udslagsvask efterskylles med rigelige mængder vand.

OPBEVARING & HOLDBARHED

Reagenserne skal opbevares ved 2 - 25°C og er holdbare indtil den anførte udløbsdato.

Reagenserne må ikke udsættes for frysning.

BEMÆRK

Hvis Reagent 2 (Hybridization Buffer) har været placeret i køleskab kan der dannes et bundfald. Bundfaldet opløses ved at placere reagentet i vandbad ved 37 eller 60°C.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Dette produkt kan være dækket af et eller flere amerikanske patenter. Se www.hologic.com/patents.

102848F-01-DA Rev. 003 2018-03

©1998 – 2018 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

