

ThinPrep® s otopinom CytoLyt®

Upute za uporabu

**NAMJENA**

Otopina CytoLyt® puferirana je otopina za ispiranje stanica na bazi vode koja je osmišljena za liziranje crvenih krvnih stanica, sprečavanje taloženja bjelančevina, otapanje sluzi i očuvanje morfologije općih citoloških staničnih uzoraka prije pripreme stakalca s pomoću procesora ThinPrep®.

Napomena: Otopina CytoLyt nije namijenjena za uporabu s uzorcima obrađenima procesorom ThinPrep3000

SAŽETAK I OBJAŠNJENJE

Otopina CytoLyt osmišljena je za uporabu s procesorom ThinPrep®, uređajem za citološku pripremu kojim se stvaraju stakalca za pregled pod mikroskopom. Otopina CytoLyt omogućuje transport i čuvanje stranica do osam dana pri temperaturi 15 °C – 30 °C.

NAČELA POSTUPKA

Otopina CytoLyt medij je za prikupljanje i liziranje crvenih krvnih stanica. Kada se upotrebljava na uzorcima obrađenim s pomoću procesora ThinPrep, ona omogućava prijenos stanica na mikroskopsko stakalce, pružajući tanak i ravnomjeran sloj stanica pogodan za citološku procjenu.

SASTAV

Puferirana otopina za čuvanje na bazi metanola. CAS 67-56-1

UPOZORENJA

Opasnost. Zapaljivo. Sadrži metanol.

H302 – Štetno ako se proguta.

H312 – Štetno u dodiru s kožom.

H332 – Štetno ako se udahne.

H370 – Uzrokuje oštećenje organa.

H226 – Zapaljiva tekućina i para.

Za *in vitro* dijagnostičku uporabu. Upotrebljavati uz odgovarajuće prozračivanje. Nije za vanjsku ili unutrašnju uporabu u ljudi ili životinja. Ne može se učiniti neotrovnom.

MJERE OPREZA

P210 – Čuvati podalje od topline / iskri / otvorenih plamena / vrućih površina.

Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Nositi rukavice i zaštitu za oči prilikom rukovanja otopinom. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Ne upotrebljavati ako je oštećena primarna ambalaža.

Prilikom transporta bočice otopine CytoLyt koja sadrži stanice potrebno je provjeriti da je bočica čvrsto zatvorena. Potrebno je poravnati oznaku na čepu s oznakom na čašici ili epruveti da bi se spriječilo istjecanje.

Kao što je to slučaj sa svim laboratorijskim postupcima, potrebno je pridržavati se univerzalnih mjera opreza.

PREDOBRADA

Nema potrebe za rekonstitucijom, miješanjem ili razrjeđivanjem.

ThinPrep s otopinom CytoLyt

Upute za uporabu

Hrvatski AW-19143-2502 Rev. 001 6-2019

1/3



ThinPrep® s otopinom CytoLyt®

ČUVANJE

Čuvati otopinu CytoLyt bez citoloških uzoraka na temperaturi od 15 °C do 30 °C (od 59 °F do 86 °F). Ne upotrebljavati otopinu CytoLyt nakon datuma isteka trajanja označenog na spremniku. Zatvoriti bočicu od 946 ml nakon svake uporabe.

IZGLED I INTEGRITET

Bistra, nesterilna otopina.

PRIKUPLJANJE I PRIPREMA UZORAKA

Prikupite neginekološke uzorke na uobičajen način i pogledajte upute za pripremu u priručniku za uporabu procesora ThinPrep. Zabilježite potrebne podatke o pacijentu na predviđenom mjestu. (Pogledati sliku.)

Čuvanje i rukovanje

Otopina CytoLyt čuva stanice do osam dana pri temperaturama između 15 °C (59 °F) i 30 °C (86 °F).

UPUTE ZA OBRADU

Citološki uzorci prikupljeni u otopini CytoLyt dodatno se pripremaju otopinom PreservCyt®, a zatim se obrađuju na procesoru ThinPrep u skladu s uputama u priručniku za uporabu procesora ThinPrep.

OGRANIČENJA POSTUPKA

Otopina CytoLyt ne može se zamijeniti nijednom drugom otopinom za prikupljanje, pripremu i obradu uzorka na bilo kojem procesoru ThinPrep.

RADNE ZNAČAJKE


Pogledati priručnik za uporabu procesora ThinPrep.

ZBRINJAVANJE

Zbrinjavati sukladno svim važećim propisima.

MJERE PRVE POMOĆI

U SLUČAJU GUTANJA: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika ako se ne osjećate dobro. Potpuni sigurnosno-tehnički list potražite na adresi www.hologiccsds.com.

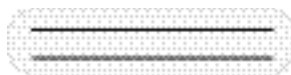

Slika

ThinPrep® s otopinom CytoLyt®



Proizvođač



Pogledati upute za uporabu



In vitro dijagnostički
medicinski proizvod



Ovlašteni predstavnik
u Europskoj zajednici



Kataloški broj



Upotrijebiti do



Broj serije



Ograničenje temperature



Zapaljivo



Nadražujuće sredstvo, nadraživanje
dišnog sustava, uzrokuje
preosjetljivost kože



Uzrokuje preosjetljivost dišnog
sustava, toksičnost za ciljne organe



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 SAD
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com



Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija

Naručitelj za Australiju: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel.: 02 9888 8000