

ThinPrep® UroCyt® PreservCyt® oldat

Használati útmutató

R_{csak}

IVD



15 °C | 30 °C

**ALKALMAZÁSI TERÜLET**

Vizeletminták citológiai vizsgálat céljából történő tárolására és szállítására ThinPrep® feldolgozó rendszer és UroCyt® tárgylemez-preparáló rendszer vagy Vysis® UroVysion® húgyhólyagrák-vizsgálati készlet és vizeletcitológiai készlet segítségével.

Megjegyzés: Az UroCyt PreservCyt oldat nem alkalmas a ThinPrep® 3000 feldolgozó rendszerrel történő együttes használatra.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS MAGYARÁZAT

A PreservCyt® oldat a vizelet szállítását és tárolását teszi lehetővé.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A PreservCyt oldat a vizeletminták sejtjeinek és DNS-ének tárolására szolgáló hordozóanyag.

ÖSSZETÉTEL

Metanol alapú, tartósító pufferoldat. 35–55% metanol. CAS 67-56-1

FIGYELMEZTETÉSEK

Veszély. Gyúlékony. Metanolt tartalmaz.

H301 - Lenyelve mérgező.

H311 - Bőrrel érintkezve mérgező.

H370 - Károsítja a szerveket.

H331 - Belélegezve mérgező.

H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

In Vitro diagnosztikai felhasználásra.

Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni.

Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Vizsgálja át a csomag tartalmát, látható-e valahol sérülés.

P210 - Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó.

P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó.

P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

Mint minden laboratóriumi eljárás során, itt is követni kell az általános óvintézkedéseket.

ThinPrep® UroCyt® PreservCyt® oldat

Ne használja az oldatot, ha az illetéktelen felnyitás ellen védő zárófolia szakadt.

Az oldat jól szellőző helyen használandó.

Ne érintkezzen közvetlenül az oldattal.

ELŐKEZELÉS

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A fel nem használt PreservCyt oldatot 15 °C–30 °C hőmérsékleten kell tárolni. Ne használja az oldatot a lejáratási időn túl. A PreservCyt oldat fioláját és mintavevő edényét a használatig zárva kell tartani.

A vizeletmintával együtt a PreservCyt oldatot 4 °C és 30 °C között kell tárolni. A mintát 48 órán belül fel kell dolgozni.

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Tiszta, nem steril oldat.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

A PreservCyt egy bakteriosztatikus oldat, és a vizelettel 2:1 arányban alkalmazva, 4 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten megakadályozza a vizeletmintákban az organizmusok elszaporodását. További információkért tekintse meg a ThinPrep feldolgozó rendszer kezelői útmutatóját.

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

Megjegyzés: a Vysis UroVysion húgyhólyagrák-vizsgálati készlethez minimum 33 ml mennyiségű, rutinszerűen begyűjtött vizelet szükséges.

1. Óvatosan öntse bele a PreservCyt oldat fiolájának teljes tartalmát a vizeletet tartalmazó mintatartó edénybe. Szorosan zárja le a mintatartó edényt, hogy megakadályozza a szivárgást.
2. A PreservCyt oldattal kevert mintát 4 °C–30 °C között kell tárolni. Ideális esetben jégakkun (pl. polisztirolhabba csomagolt kék jégakku) kell tárolni és szállítani.
3. A mintát 48 órán belül fel kell dolgozni a ThinPrep feldolgozó rendszer kezelési útmutatójában szereplő utasítások, illetve a Vysis UroVysion húgyhólyagrák-vizsgálati készlet gyártói utasításai szerint.

AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A használt mintavevő edényt, nedvszívó párnát, szállítópárnát és az esetlegesen fennmaradt mintát biológiai veszélyt jelentő hulladékként kell kezelni. A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A PreservCyt oldat nem helyettesíthető mintavételre, -előkészítésre és -feldolgozásra szolgáló egyéb oldattal. A mintavétel előtt csökkentse minimálásra a kenőanyagok használatát (pl. KY® géli), mivel az ilyen anyagok zavarják a sejtszállítást.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy forduljon orvoshoz. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd a www.hologicds.com oldalon.

ThinPrep® UroCyt® PreservCyt® oldat



Gyártó



Lásd a használati útmutatót



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



Hivatalos képviselő az
Európai Közösségben



Katalógusszám



Lejárat dátum



Gyártási tételszám



Hőmérsékleti korlátok



Újrafelhasználni tilos!



Tűzveszélyes



Akut toxicitás



Légzőszervi érzékenyítő,
célszervi toxicitás



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium