

Soluție ThinPrep® de albăstrire

Instrucțiuni de utilizare



UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Soluția ThinPrep® de albăstrire este destinată folosirii în cadrul procedurii de colorație Papanicolau împreună cu soluția de colorație a nucleelor ThinPrep, soluția de spălare ThinPrep, soluția ThinPrep Orange G și soluția ThinPrep EA.

REZUMAT ȘI EXPLICAȚII

Soluția de albăstrire ThinPrep este o soluție apoasă și alcalină, care întunecă componentele celulare colorate cu soluție de colorație a nucleelor ThinPrep în albastru/violet în preparatele de pe lame în vederea evaluării citologice.

PRINCIPIILE PROCEDURII

Folosită împreună cu soluțiile de colorație ThinPrep și preparatele pe lame citologice, soluția de albăstrire ThinPrep va întuneca acele componente celulare colorate cu soluția de colorație a nucleelor ThinPrep, îmbunătățind morfologia nucleelor.

COMPOZIȚIE

Soluție apoasă de carbonat de litiu.

AVERTISMENTE

Pentru utilizarea la diagnosticarea in vitro.

Nu este adecvat pentru uz extern sau intern, la oameni sau animale.

Poate să cauzeze iritarea ochilor la contact.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Evitați contactul cu ochii.

La manevrarea soluției, purtați mănuși și echipament de protecție pentru ochi.

Țineți recipientul închis atunci când nu îl folosiți direct.

Rezultatele cu probe de citologie altele decât ThinPrep nu au fost evaluate.

Nu utilizați produsul dacă ambalajul primar este deteriorat.

PRETRATARE

Nu este necesară reconstituirea, amestecarea sau diluarea.

DEPOZITARE

Depozitați soluția ThinPrep de albăstrire nefolosită la temperaturi între 15 °C (59 °F) și 30 °C (86 °F) în recipientul furnizat. Nu folosiți soluția ThinPrep de albăstrire după data expirării indicată pe recipient.

Soluție ThinPrep® de albăstrire

ASPECT ȘI INTEGRITATE

Soluție limpede, nesterilă.

RECOLTAREA ȘI PREGĂTIREA PROBELOR

Pentru utilizarea cu probe citologice ginecologice care au fost prelucrate pe orice sistem ThinPrep.

PROCEDURĂ

Pentru protocoalele de colorație specifice, consultați manualul de utilizare a colorației ThinPrep.

LIMITĂRILE PROCEDURII

Trebuie să fie folosită în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în manualul de utilizare al colorației ThinPrep. Soluția ThinPrep de albăstrire nu poate fi înlocuită cu nicio altă soluție.

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Folosită conform instrucțiunilor cu preparatele pe lame citologice, soluția de albăstrire ThinPrep va întuneca acele componente celulare colorate cu soluția de colorație a nucleelor ThinPrep.

ELIMINARE

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Nu sunt anticipate efecte adverse. Consultați www.hologicsds.com pentru fișa completă cu date de securitate.



Producător



Consultați instrucțiunile de utilizare



Dispozitiv medical pentru diagnosticare *in vitro*



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană



Număr de catalog



Valabil până la



Codul lotului



Limitare de temperatură



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 SUA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia

Sponsor australian: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tel.: 02 9888 8000