

# Hologic

## *AccuProbe® Culture Identification Reagent Kit*

Reagenserne i **AccuProbe Culture Identification Reagent Kit** (Best. nr. 102800) er beregnet til brug med AccuProbe analysesæt i henhold til de respektive vejledninger. Indeholder reagenser til 200 tests (bateriel identifikation) eller 100 tests (mykobakteriel/fungal identifikation).

### REAGENSBEKRIVELSE

**Bemærk:** For oplysninger om enhver fare og sikkerhedserklæringer, der kan være tilknyttet reagenser, henvises til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdataark) på [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

#### Reagent 1 (Lysis Reagent)

Stødpudeopløsning til lysering af prøve tilsat 0,04% natriumazid; 10 mL

#### Reagent 2 (Hybridization Buffer)

Stødpudeopløsning til hybridiseringsprocessen; 10 mL

#### Reagent 3 (Selection Reagent)

Stødpudeopløsning til probe separation; 60 mL

### RISIKO & SIKKERHED

Undgå direkte kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved spild skylles straks med rigelige mængder vand. Natriumazid kan i kontakt med kobber eller bly danne eksplosive forbindelser. Ved bortkastning i udslagsvask efterskylles med rigelige mængder vand.

### OPBEVARING & HOLDBARHED

Reagenserne skal opbevares ved 2 - 25°C og er holdbare indtil den anførte udløbsdato.

*Reagenserne må ikke udsættes for frysning.*

### BEMÆRK

Hvis Reagent 2 (Hybridization Buffer) har været placeret i køleskab kan der dannes et bundfald. Bundfaldet opløses ved at placere reagentet i vandbad ved 37 eller 60°C.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

102848F-01-DA Rev. 002 2017-05

©1998 – 2017 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.