

Aptima Auto Detect-sats (Panther™-systemet)

För *in vitro*-diagnostiskt bruk.

Avsedd användning

Aptima Auto Detect-sats är avsedd för användning på Panther-systemet.

Tillhandahållen materiel

Anteckning: Information om uttalanden om eventuella risker och försiktighetsåtgärder som kan förekomma i samband med reagenser finns i Safety Data Sheet Library (bibliotek med säkerhetsdatablad) på www.hologic.com/sds.

Aptima Auto Detect-sats (kat.nr 303013)

(Förvaras vid 15 °C till 30 °C efter leverans)

Symbol	Komponent	Antal
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Vattenhaltig lösning som innehåller 0,1 % väteperoxid och 0,001 N salpetersyra.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N natriumhydroxid.</i>	1 x 245 mL

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Undvik hud-, ögon och slemhinnekontakt med Auto Detect 1 och 2. Om dessa vätskor kommer i kontakt med huden eller ögonen ska de påverkade områdena tvättas med vatten. Om dessa vätskor spills, ska spillet spädas ut med vatten innan det torkas upp.
- Iaktta sedvanliga säkerhetsrutiner för laboratorier.

Krav på förvaring och hantering

- Förvara Aptima Auto Detect-satsen vid 15 °C till 30 °C.
- Vätskorna måste ha uppnått 15 °C till 30 °C före användning. När de öppnats är vätskorna stabila i 60 dagar.
- Om utfällningar har bildats uppvärms vätskorna till 37 °C till 60 °C för att underlätta upplösningen av utfällningarna. Kyl vätskorna till rumstemperatur och blanda grundligt före användning.
- Använd inte satsen efter utgångsdatum.

Procedur

Byt ut flaskorna i universalvätskelådan när systemet uppmanar om detta. Se *Panther-systemets användarmanual*.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Kundsupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Besök www.hologic.com för ytterligare kontaktinformation.

Hologic, Aptima, och Panther eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken som uppträder i denna bipacksedel är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

©2001–2017 Hologic, Inc. Med ensamrätt.

502180SV Rev. 002
2017-04