

**I. BEOOGD GEBRUIK:**

Dit product is bedoeld voor het extraheren van nucleïnezuur uit monsters die zijn blootgesteld aan een formalinefixatief.

II. MEEGELEVERDE REAGENTIA

Opmerking: Informatie over eventuele gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen die met reagentia in verband worden gebracht, vindt u in de Safety Data Sheet Library (bibliotheek met veiligheidsinformatiebladen) op www.hologic.com/sds.

Conversieoplossing (2 flesjes à 115 mL)

III. SAMENSTELLING VAN HET REAGENS

Buffermengsel met Tris-bufferoplossing en EDTA

pH 7,52 +/- 0,32

Geleiding 52,6 mS/cm, +/- 6,4

IV. OPSLAG EN HANTERING

Reagentia moeten bij kamertemperatuur worden bewaard en zijn stabiel tot de vervaldatum op het flesje.

Productbestanddelen (productrestanten, verpakking) kunnen als laboratoriumafval worden beschouwd. Voer ongebruikte reagentia en afval af overeenkomstig de toepasselijke landelijke, provinciale en lokale regelgeving.

V. GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder zoveel mogelijk fixatief van het celmateriaal.

Suspendeer celmateriaal in 0,2 mL conversieoplossing.

Incubeer het monster bij 115 °C gedurende 1 uur.

OPMERKING: HET VOLUME CONVERSIEOPLOSSING, DE INCUBATIETEMPERATUUR EN -DUUR MOETEN EMPIRISCH WORDEN VASTGESTELD, AFHANKELIJK VAN MONSTERTYPE EN EXTRACTIECHEMIE.

VI. BEPERKINGEN

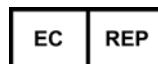
Dit product is getest op monsters blootgesteld aan een 10% neutraal gebufferde formalineoplossing en op monsters blootgesteld aan een op alcohol gebaseerde conserveringsvloeistof met formaline. Gebruik van de conversieoplossing met aan andere formalinefixatieven of alcoholgebaseerde oplossingen blootgestelde monsters is niet onderzocht.

VII. CONTACTINFORMATIE**Fabrikant:**

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Klantenservice:

+1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

**Geautoriseerd vertegenwoordiger voor de Europese Gemeenschap:**

Hologic Ltd.
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road
Wythenshawe, Manchester
M23 9HZ, Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)161 946 2206
Fax: +44 (0)161 602 0995
Email AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com

VIII. KENNISGEVING VOOR ONTVANGER INZAKE BEPERKTE LICENTIE

Ontvangst van een product van Hologic of haar erkend distributeur omvat een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie onder bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Hologic. Deze licentie geldt alleen voor het gebruik van het product voor de methoden waarvoor ze zijn bedoeld. Deze beperkte licentie omvat geen licentie om het product te gebruiken voor nieuwe productontwikkelingen of research, productfabricage, reverse engineering, verbeteringen van de producttechnologie of ander commercieel doel. Het is de klant niet toegestaan dit product voor welk doel dan ook door te geven aan derden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hologic. Behalve waar anders aangegeven in deze paragraaf wordt geen licentie verleend, zij het expliciet, impliciet of door uitsluiting.

Legal Department, Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, (508) 263-2900.

IX. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

GARANTIES. De oorspronkelijke koper wordt gegarandeerd dat installatie, materiaal en software functioneren volgens de gepubliceerde productspecificaties, gedurende een (1) jaar vanaf de datum van installatie (indien van toepassing) of levering, waarbij de eerste datum geldt. Opties en accessoires na verkoop worden gegarandeerd gedurende zes (6) maanden en röntgenbuizen worden gegarandeerd op een rechtevenredige basis overeenkomstig de desbetreffende productspecificaties ("garantieperiode"). Reserveonderdelen worden gegarandeerd voor de resterende garantieperiode van negentig (90) dagen na levering, waarbij de langste periode geldt. Verbruiksartikelen worden gegarandeerd overeenkomstig de gepubliceerde specificaties gedurende een periode die eindigt op de vervaldatum aangegeven op de desbetreffende verpakking. Diensten worden gegarandeerd vakkundig te worden geleverd. Hologic garandeert niet dat het gebruik van de producten ononderbroken of foutloos verloopt of dat producten functioneren in combinatie met niet door Hologic erkende producten van derden. **DE VOLLEDIGE GARANTIEVERANTWOORDELIJKHEID VAN HOLOGIC IS EXPLICIET BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANGING (NAAR OORDEEL VAN HOLOGIC EN IN DE OORSPRONKELIJK VERZENDVORM) VAN PRODUCT OF HERSTEL VAN GERECLAMEERDE DIENSTEN OF, NAAR KEUZE VAN HOLOGIC, TERUGBETALING OF CREDITERING VAN DE KLANT VAN EEN BEDRAG EVENREDIG AAN DE HOLOGIC-PRIJS, -VERGOEDING OF -**

KOSTEN DAARVOOR. DE VOORNOEMDE GARANTIES KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES DIE HIER NIET UITDRUKKELIJK WORDEN GENOEMD, ZIJ HET EXPLICIET, IMPLICIET OF VAN RECHTSWEGE, EN SLUITEN DIE UIT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DERGELIJKE BEPERKTE GARANTIE WORDT UITSLUITEND VERLEEND AAN DE OORSPRONKELIJK KOPER EN WORDT NIET VERLEEND AAN, NOCH KAN DAAROP WORDEN GEREKEND DOOR ENIGE DERDEN, WAARONDER ZONDER BEPERKING, KLANTEN VAN DE KLANT. DEZE GARANTIE VERVALT BIJ OVERDRACHT VAN PRODUCT DOOR DE KLANT AAN EEN ENTITEIT DIE MINDER DAN VIJFTIG (50) PROCENT EIGENDOM HEEFT VAN HET PRODUCT. SOMMIGE LANDEN STAAN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE. BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN VOOR U DUS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND VARIËREN. Deze garanties zijn niet van toepassing op producten die: (a) zijn gerepareerd, verplaatst of veranderd anders dan door Hologic erkend onderhoudspersoneel; (b) fysiek zijn misbruikt (inclusief door inwerking van hitte of elektriciteit), of onderworpen zijn geweest aan overmatige belasting of verkeerd gebruik; (c) zijn opgeslagen, onderhouden of bediend op een wijze die niet overeenkomt met de toepasselijke specificaties of instructies van Hologic; of (d) zijn gekenmerkt als geleverd onder andere garantievoorwaarden dan die van Hologic of als "pre-release" of "zoals gezien".

RECLAMERINGEN EN RECHTSMIDDELEN. In geval van reclamering zal Hologic elk deel of onderdeel van een installatie of verbruiksartikel dat de garantie schendt, vervangen door nieuwe of gerepareerde items en redelijke inspanningen ondernemen om snelle reparatie of alternatieve werkwijzen te bieden voor enig softwaredefect of enige softwarefout die het gebruik volgens de functionele specificaties aanzienlijk verhindert. Hologic kan er ook voor kiezen de klant een bedrag te crediteren of terug te betalen dat overeenkomt met de aanschafprijs van de defecte installatie, het defecte onderdeel, de defecte software of de ondeugdelijke verbruiksmiddelen of diensten. Vervangen items worden eigendom van Hologic. Alle reclameringen moeten plaatsvinden door contact op te nemen met Hologic binnen de desbetreffende garantieperiode en binnen dertig (30) dagen na het ontdekken van het mankement. Hologic moet redelijk toegang worden verleend en in de gelegenheid worden gesteld alle daarmee samenhangende materialen te inspecteren. Als Hologic en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen aangaande een reclamering en de klant Hologic niet binnen een (1) jaar na het optreden van de reclameringsreden op de hoogte heeft gesteld, verliest de klant daarna het recht gerechtelijke stappen te ondernemen. Deze rechtsmiddelen vormen de gehele aansprakelijkheid van Hologic en het exclusieve verhaal van de klant bij schending van de garantie en vervangen ieder ander rechtsmiddel.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. HOLOGIC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF VERVOLGSCHADE, ONKOSTEN OF UITGAVEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEBRUIK), DIRECT OF INDIRECT, TEN GEVOLGE VAN VERKOOP, TRANSPORT, ONDERHOUD OF GEBRUIK VAN HET BESTELDE OF GELEVERDE PRODUCT, OF DOOR ENIGE OORZAAK DIE DAARMEE VERBAND HOUDT,

TENZIJ DOOR BEIDE PARTIJEN EXPLICIET SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN. MET UITZONDERLING VAN PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN TEN GEVOLGE VAN NALATIGHEID OF OPZETTELIJKE ONRECHTMATIGE DADEN OF VERONACHTZAMING IS HOLOGIC IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ONDER ENIGE RECHTSLEER OF VOOR ENIG DOEL, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIG HANDELEN, NALATIGHEID OF ANDERE RECHTSLEER, ZELFS INDIEN DAAROVER OF OVER DE MOGELIJKHEID DAARVAN GEÏNFORMEERD, VOOR ENIG BEDRAG HOGER DAN DE PRIJS, VERGOEDING OF KOSTEN DAARVOOR ONTVANGEN DOOR HOLOGIC.

Hologic is een handelsmerk en/of gedeponeerd handelsmerk van Hologic, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken die mogelijk op deze bijsluiter vernoemd zijn, zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars.

©2011-2016 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onderdeelnummer LBL-02204-1501, herziening 101