

# Aptima<sup>®</sup> 多重检测拭子标本采集盒


## 患者采集样本指南

### 阴道拭子标本的采集




**开始采集前请洗手。如果您对此程序有任何疑问，请咨询您的医护服务提供者。**

剥开拭子包装的一部分，取出拭子。不要触摸拭子软的一头，或将棉拭子放下。**如果触摸了拭子软的一头，放下了拭子，或拭子跌落，则申请一个新的 Aptima 多重检测拭子标本采集盒。**握住拭子，把拇指和食指放在拭子柄中间黑色划线上。

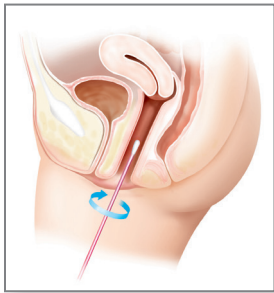

小心地棉拭子插入阴道口约 2 英寸（5 厘米），轻轻旋转拭子 10 至 30 秒。确保拭子接触到阴道壁，以使拭子吸收水分。取出拭子，不要碰到皮肤。

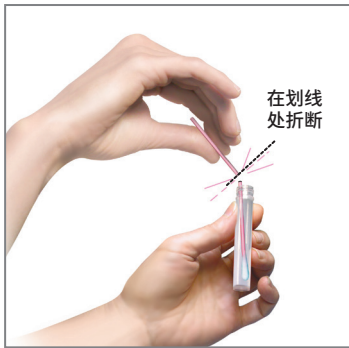

一手握住拭子的同时，拧开管帽。不要把管子的内含物洒出来。**如果管子的内含物洒出，请申请一个新的 Aptima 多重检测拭子标本采集盒。**立即将拭子放到运送管中，使黑色划线位于管子的顶部。将划线与管子的顶部边缘对齐，并小心地将拭子柄折断。拭子会掉到管瓶的底部。将拭子柄的上半部丢弃。



将盖子紧紧拧到管子上。  
按照您的医护服务提供者的指示交回管子。

Hologic 提供本采集指南，仅是用来告知信息；本指南不要求一定要按其操作或按其操作一定能保证采集性能。阅读和理解相应的包装说明书，并遵守适用的当地、州和联邦规章制度，这完全是临床医生的责任。

[hologic.com](http://hologic.com) | [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com) | +1.888.484.4747

DS-01553-401 Rev. 003 © 2017 Hologic, Inc. 保留所有权利。Hologic、The Science of Sure、Aptima 以及相关徽标是 Hologic, Inc. 和/或其子公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。这些信息旨在提供给美国与其它市场的医务人员，无意于在禁止产品招揽或促销活动区域作为此类活动的资料。Hologic 的资料是通过网站、网播和贸易展览分发的，因此有时无法控制此类资料会出现在哪些区域。若想了解有哪些产品在某个特定国家市售的具体信息，请联系您的 Hologic 代表，或发送电子邮件至：[diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com)。